


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Des Kits de Montage du Joystick

ART NOS. PC202, PC205, PC206 & PC207

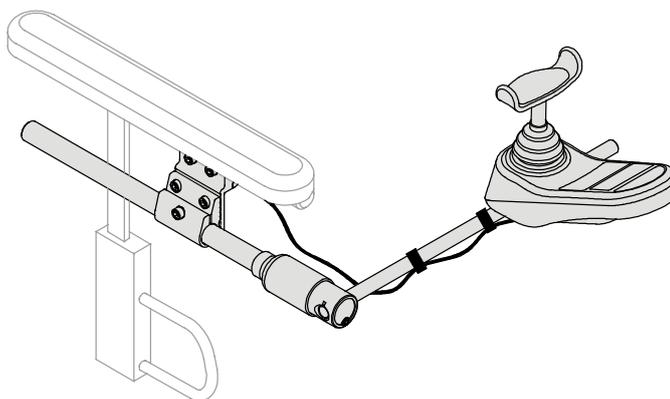

Ces instructions fournissent d'importantes informations pour une utilisation et un entretien sûrs de tous les kits de montage du joystick Bodypoint. Les remettre à l'utilisateur ou au soignant et lui demander de s'assurer qu'il les a comprises.

⚠ ATTENTION ! Couper le circuit électrique du fauteuil roulant avant l'installation.


GARANTIE : Ce produit est assorti d'une garantie limitée à vie contre les défauts d'exécution et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale par le client initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour exercer son droit de garantie.

Pour plus d'informations sur les produits Bodypoint et obtenir la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, visitez le site www.bodypoint.com.


CONTENU DU COLIS

Le colis peut contenir un ou plusieurs articles suivants :


- Patte de montage du joystick
- Tige de rotation Tri-Lock™
- Bras Midline
- Adaptateur de montage du joystick
- Levier d'ouverture rapide (en option) Ou un kit de montage complet du joystick. Réf.: PC202-, PC205-, PC206-, PC207-

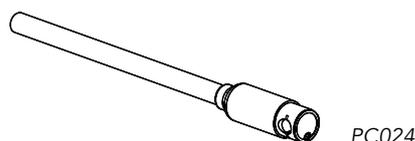


PC024

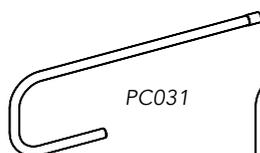

PC031

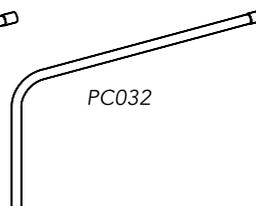

PC032

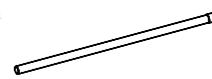

PC033



PC042




PC045




PC046



PC047

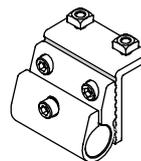

PC010

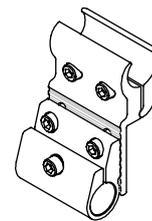

PC011


BP Bodypoint®



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany




PATTE DE MONTAGE DU JOYSTICK



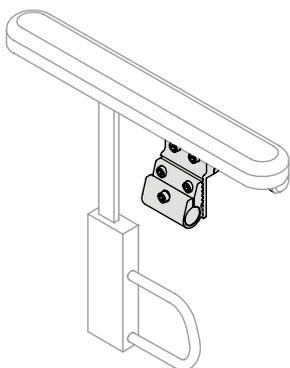


Les pattes de montage du joystick peuvent être installées sur l'accoudoir droit ou gauche. Fixer la patte sur le l'accoudoir, la pousser aussi loin que possible et serrer.

Art. No.
FA171

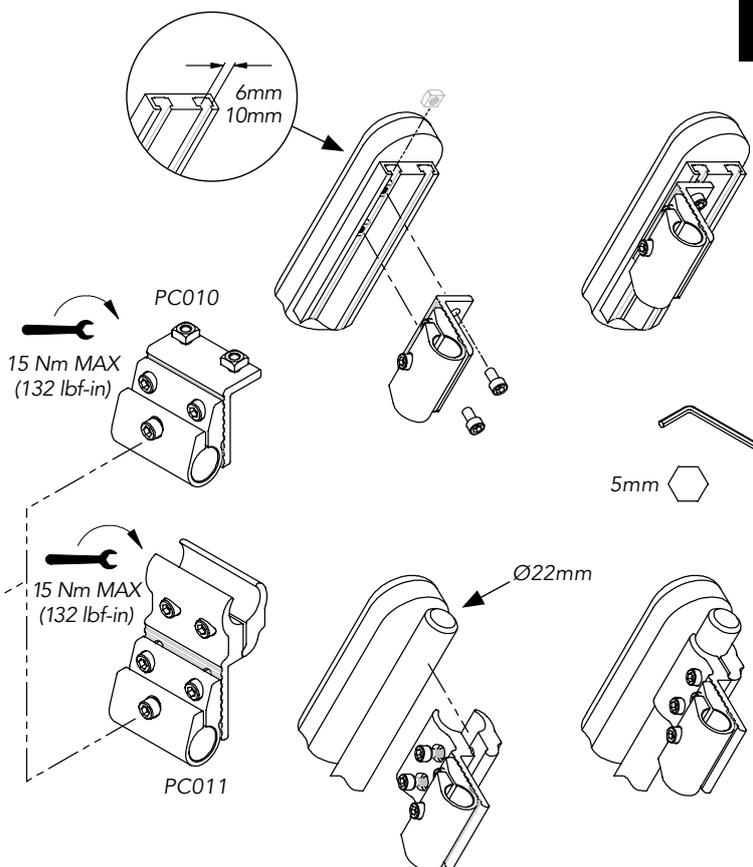


TIGE DE ROTATION TRI- LOCK™

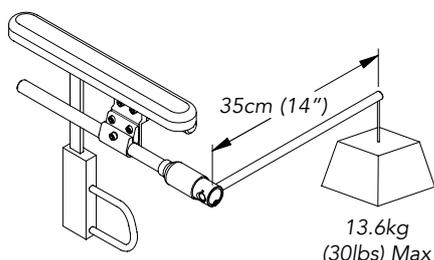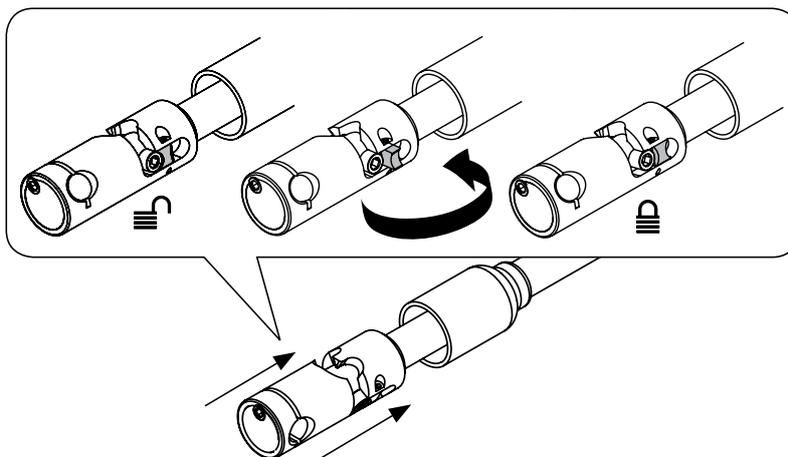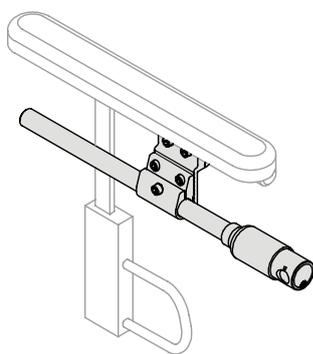


La tige de rotation Tri-Lock peut être montée à droite et à gauche. La faire pivoter dans la patte de montage pour vérifier que ses positions de rotation sont correctes.


La butée permet de passer de la position non verrouillée à verrouillée. La position horizontale (0°) est alors verrouillée. Appuyer sur l'extrémité pour la déverrouiller.

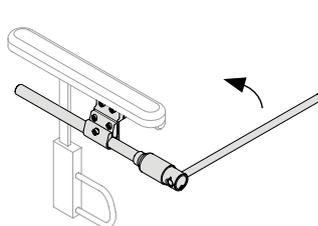

0° Position de commande

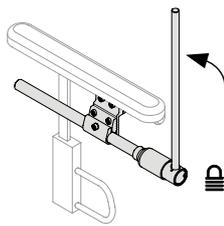

Vertical


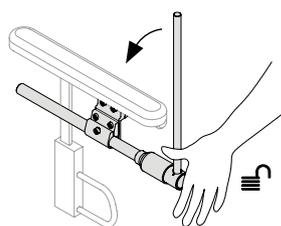


Appuyer sur l'extrémité pour déverrouiller




Rotation complète

BRAS MEDLINE

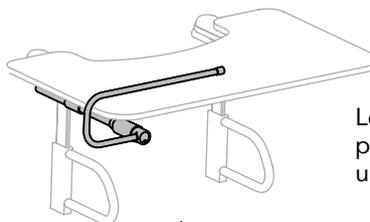
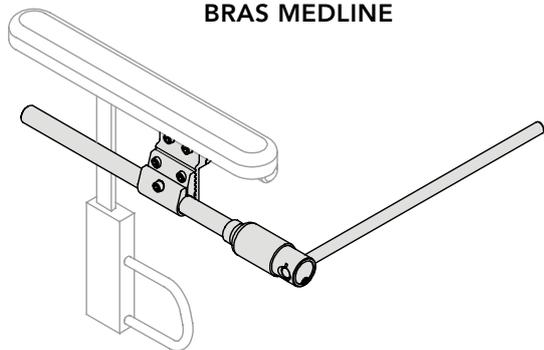


Le bras Midline en J peut être utilisé sur une tablette.

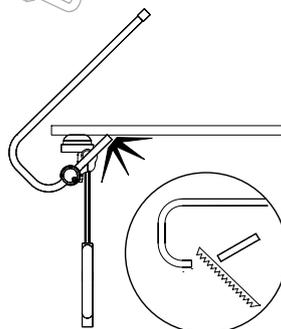

REMARQUE : Le bras Midline en aluminium peut être coupé à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie à métaux.



ADAPTADORES DE MONTAJE DEL JOYSTICK

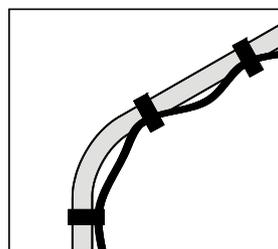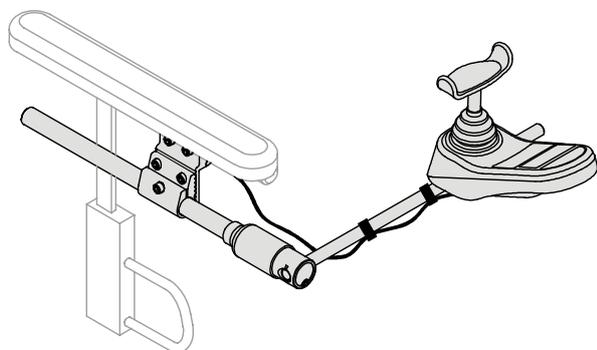

Fije los cables sueltos con los amarres de nylon incluidos.


INVACARE

Art. No. PC042

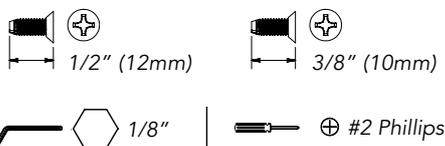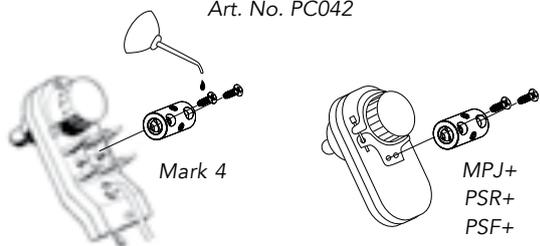



PGDT R-NET & VSI

Art. No. PC046

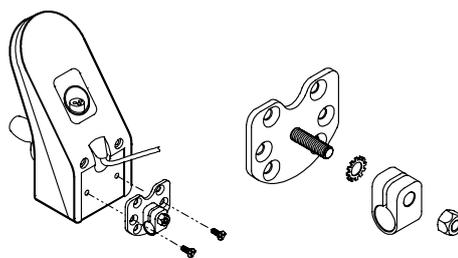

PGDT PILOT PLUS

Art. No. PC045

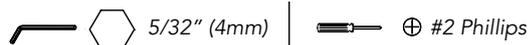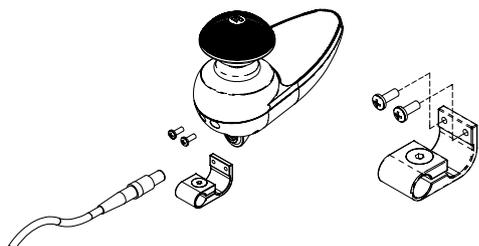

COMPACT JOYSTICKS

Art. No. PC047

