


CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

De La Ceinture De Bain Aeromesh® Rapid-Dry Une Pièce

ART NOS. BB111 & BB112

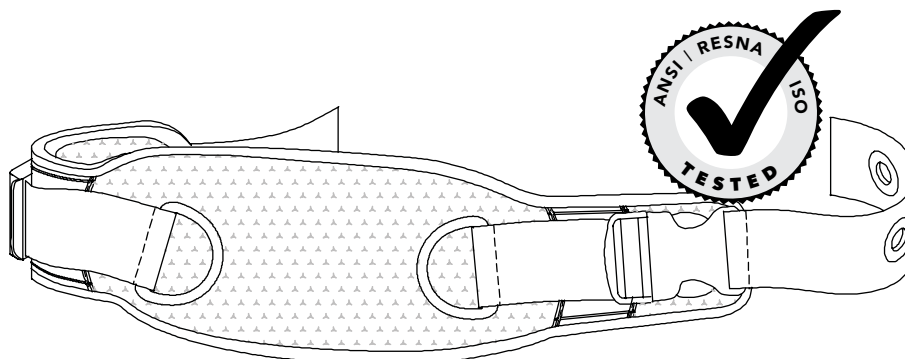

Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l'entretien de toutes les ceintures de bain une pièce Aeromesh® Rapid-Dry de Bodypoint. Remettre ces consignes à l'utilisateur ou au soignant et lui demander de s'assurer qu'il les a comprises.

⚠ ATTENTION ! En raison du risque d'étranglement, il est dangereux d'employer une ceinture thoracique sans stabiliser le bassin. Utiliser systématiquement avec une ceinture genouillère ou cuissarde correctement ajustée.

Des matériels de montage à sangles Bodypoint facultatifs peuvent être employés pour le montage sur les fauteuils roulants et des systèmes de sièges.

UTILISATION :

⚠ ATTENTION ! Ce produit doit servir uniquement à placer une personne dans un fauteuil de douche ou garde-robe. Il n'est PAS prévu pour servir de ceinture de sécurité ou de dispositif personnel de retenue, ou pour toute autre application où sa défaillance pourrait causer un préjudice corporel. Une mauvaise utilisation de ce produit est interdite et dangereuse.

⚠ ATTENTION ! L'ouverture accidentelle de ce produit risque de faire glisser ou tomber l'utilisateur hors du fauteuil de douche ou garde-robe. Si les mouvements ou l'aptitude mentale de l'utilisateur impliquent un risque d'ouverture accidentelle, un thérapeute devra toujours être présent lors de l'utilisation. S'assurer que tout le personnel soignant sait

comment détacher le produit. Dans le cas contraire, cela pourrait occasionner une perte de temps en cas d'urgence.

ENTRETIEN : Suveiller régulièrement les traces d'usure au niveau des coutures, des sangles et des coussinets. En cas d'usure importante, contacter le fournisseur pour obtenir une réparation par du personnel qualifié ou un remplacement par Bodypoint. En aucune circonstance ce produit ne doit être modifié ou réparé par des personnes non qualifiées. La santé et la sécurité de l'utilisateur en dépendent!

🧺⚠🕒 NETTOYAGE HABITUEL : Lavage en machine à 60°C (140°F) en utilisant de la lessive. Séchage en machine ou séchage par égouttement. °Ne pas repasser.

GARANTIE : Ce dispositif est assorti d'une garantie limitée à vie contre les défauts d'exécution ou de fabrication dans le cadre d'utilisation normale par le consommateur initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la garantie.



Pour plus d'information sur ce produit ou d'autres produits Bodypoint, ou pour consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur www.bodypoint.com

BP Bodypoint®

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE

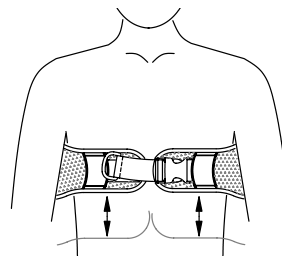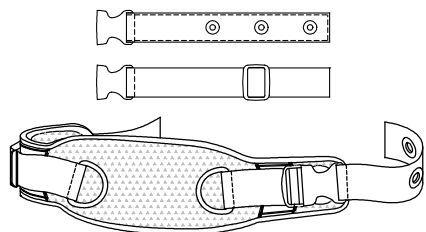


CONTENU

L'emballage peut contenir un ou plusieurs des éléments suivants :

- Ceinture de bain Aeromesh® Rapid-Dry
- Sangles de fixation avec œillet, ou
- Sangles de montage avec dispositif de réglage coulissant
- Option : Fixations de cadre (Art. No. HW310), Fixations de ceinture (Art. No. HW320), Bouton (Art. No. FA812-BP)

POSITIONNEMENT

Asseoir l'utilisateur dans un fauteuil de douche ou une chaise d'aisance et définir le bon maintien. Déterminer la position souhaitée pour la ceinture. Lors du choix de la position, tenir compte des interférences avec les autres équipements. Un ajustement ni trop haut ni trop bas de la ceinture permet de réduire les risques d'étranglement et d'instabilité du buste.

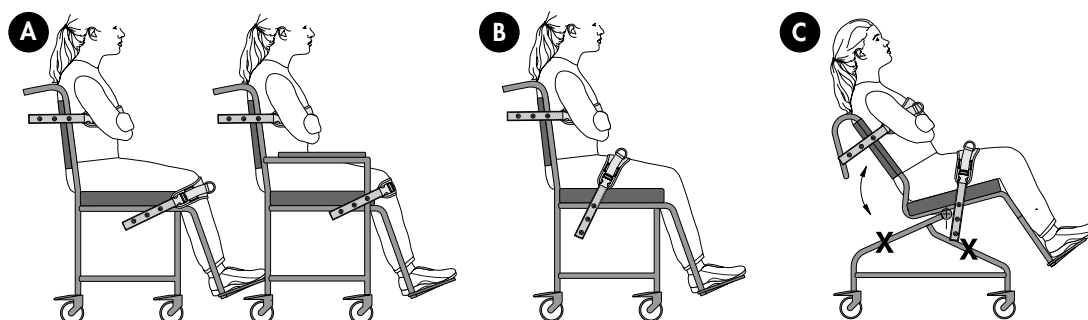

SUGGESTIONS DE MONTAGE




A Au niveau de la poitrine, Au niveau du genou (à privilégier)

En tenant compte des impératifs de l'utilisateur, trouver un emplacement de montage adapté sur le fauteuil roulant qui permette le montage de la ceinture à l'une des positions à privilégier indiquées.

B En travers des cuisses (en option)

C Fauteuils inclinables

La ceinture doit impérativement être montée sur le cadre supérieur, au-dessus du point de pivotement. Un montage de la ceinture au-dessous du point de pivotement peut causer des interférences ou influencer sur la tension de la ceinture.

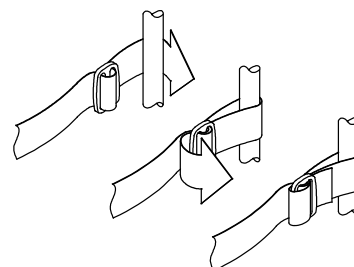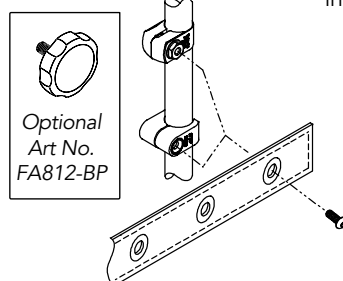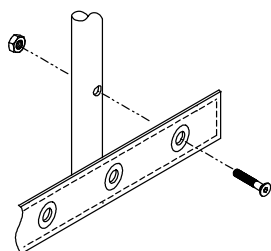

INSTALLATION


Avec fixations de cadre ou fixations de ceinture

Monter les fixations sur le fauteuil de douche ou à la chaise d'aisance et serrer pour maintenir. Introduire une deuxième vis à tête conique par un œillet de la ceinture, dans la fixation du cadre. Bien serrer.

Montage direct par vis

En cas de montage direct sur des sièges/dossiers pleins ou le cadre d'un fauteuil, utiliser des vis à tête plate ou ronde de 6 mm (1/4-20). Les vis de montage doivent avoir une résistance à l'arrachement de 90 kg au minimum. Non incluses.

Montage avec le dispositif de réglage coulissant

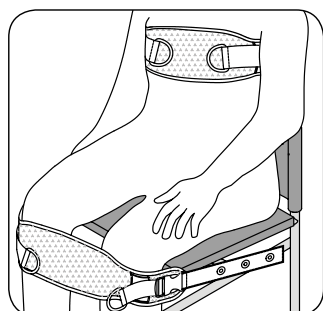

AJUSTEMENT

Veiller à ce que l'utilisateur soit bien assis, vérifier l'ajustement de la ceinture, elle doit être serrée afin de bien maintenir l'utilisateur. L'ajustement précis est effectué par à-coups à l'aide de l'anneau en D de la sangle de serrage. L'ajustement général est effectué à l'aide des œillets de montage.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Demander à l'utilisateur, correctement installé dans son fauteuil roulant, de se pencher en avant et latéralement d'un côté et de l'autre pour vérifier l'ajuste-

ment. Contrôler les points suivants :

1. Bon fonctionnement des boucles et des sangles de réglage.
2. Confort – Rechercher des zones d'irritation éventuelle.
3. Position – Si trop haut ou trop bas, régler les points de montage.
4. Interférence avec d'autres dispositifs – Déplacer les points de montage comme il convient.
5. Faire décrire au fauteuil toute sa gamme de mouvements : incliner, replier et rouler. S'assurer qu'il n'y a pas d'interférence.