

Spécialiste
en produits
de positionnement
et en prévention
d'escarres

MARS
2023

inspiral



SÉCURITÉ - FONCTIONNALITÉ - CONFORT



ÉQUIPEMENT



POSITIONNEMENT



OUTILS D'ÉVALUATION POSTURALE





QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 2013, Inspiral se spécialise dans l'assise et le positionnement des utilisateurs de fauteuils roulants en leur fournissant des produits et services supplémentaires en matière de fonctionnalité, de confort et de protection de la peau.



Notre mission est de :

Élargir le choix des clients en fournissant et en formant des cliniciens et des prestataires de services français avec des produits de coussins/sièges modulaires innovants et uniques pour améliorer la vie de nos utilisateurs de fauteuils roulants.

Notre devise :

- **SÉCURITÉ** Protéger le patient des problèmes cutanés liés à l'immobilisme en position assise ou couchée
- **FONCTIONNALITÉ** Améliorer ou maintenir l'indépendance de nos consommateurs
- **CONFORT** Maximiser le confort de nos clients

Nos services

- **Devis, commandes et support technique** par mail ou par téléphone :
@ : info@inspiral.fr ☎ : 02.47.79.75.52
- **Prêt gratuit** des gammes de positionnement **VICAIR** et **NXT** pour les évaluations cliniques et validations médicales sur info@inspiral.fr.
- **Formation Produits et / ou Positionnement INSPIRAL**, en Visio ou sur site.
Prendre contact auprès de votre responsable régional ou réserver sur www.inspiral.fr.
- **Proposition d'une gamme de positionnement complète** avec des aides-techniques pouvant « habiller » le patient des pieds à la tête.
- Nos partenaires de **marques mondiales** :



SOMMAIRE

inspiral	Page 2
Vicaïr technologie	Page 4
Bénéfices & avantages - les housses	Page 5
Evolution Vicaïr 02	page 6

POSITIONNEMENT

COUSSINS

Adjuster 02	Page 7
Active 02	Page 8
Vector 02	Page 9
XXTRA 02	Page 10
Adjuster 02 12	Page 11
Centre 02	Page 12
Junior 02	Page 13

DOSSIERS

Liberty	Page 14
Anatomic	Page 15
Multifunction	Page 16
Options Multifunction	Page 17
Flex	Page 18

LES DOSSIERS NXT

Xtend	Page 19
Xtend Low	Page 20
Optima	Page 21
Classic	Page 22 - 23
Optima Carbone	Page 24 - 25
Nxt® Armadillo et Nxt® Armadillo Vicaïr	Page 26 - 27
	Page 28 - 29

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Cale-tronc pour dossiers Nxt®	Page 30
Accessoires de positionnement Nxt®	Page 31
Appui Têtes Symmetric Designs®	Page 32-35
Supports Thoraciques Stealth®	Page 35
Sangles Harnais Bodypoint®	Page 36

EQUIPEMENT

Vicaïr 4	Page 37
Liberty & Liberty Profile	Page 38
Soutien Lombaire Butterfly	Page 39
Coussinets Vicaïr Confort	Page 40
Matelas	Page 41
Talonniers De Décharge	Page 42
Minerves Headmaster	Page 43 - 44
Nomad 02 Vicaïr	Page 45
ISHEAR®	Page 46
iPressure®	Page 47

TARIFS

	Page 48 - 51
Tarif KITS Positionnement	Page 48
Gant d'évaluation	Page 48
Tarifs	Page 49-51
CGV	Page 52
Notes	Page 53-54
Interlocuteurs Inspiral	Page 55



WE
R
I
A
M
M
O
S

VICAIR®
technologie

Le moyen le plus efficace pour redistribuer les pressions est l'air.

Malheureusement, il présente quelques inconvénients : l'air est instable et a tendance à fuir. Vicair a réussi à contourner ces 2 problèmes en créant des berlingots Vicair.



UNE COMBINAISON UNIQUE : PROTECTION DE LA PEAU ET POSITIONNEMENT

Lorsque vous êtes assis sur un coussin Vicair, vous êtes soutenu par des centaines de berlingots d'air. Les couches de berlingots à l'intérieur des compartiments du coussin bougent avec si peu de friction que leur comportement ressemble à celui d'un fluide visqueux s'ajustant lentement à la forme de votre corps. De leur côté les berlingots suffisamment souples pour se déformer individuellement s'adaptent aux contours de votre corps. Il en résulte une meilleure redistribution des pressions. De plus, la forme en tétraèdre des berlingots et le design des compartiments rendent le coussin ultra stable et empêche l'utilisateur de glisser vers l'avant. Le coussin réduit ainsi les forces de cisaillement au minimum et aide à maintenir une posture fonctionnelle optimale.

Cette technologie unique Vicair, basée sur les berlingots d'air a été développée en coopération avec le Centre de Réadaptation d'Amsterdam et récompensée par le grand prix du Salon des inventions de Genève. Vicair développe et produit sa gamme depuis Les Pays Bas pour des clients répartis sur tous les continents.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Les coussins à berlingots Vicair sont très faciles à utiliser. Grâce au remplissage des compartiments parfaitement équilibré, ils sont prêts à l'emploi et peuvent être utilisés tels quels dans de nombreuses situations. Mais si vous souhaitez ajuster votre coussin pour personnaliser votre positionnement il vous suffit de déplacer les berlingots d'un compartiment à l'autre, jusqu'à obtenir la posture désirée. Le coussin ne demande quasiment aucune maintenance : en effet, une fois le réglage effectué pas besoin de pompe ou de surveillance quotidienne. Les coussins Vicair sont non seulement extrêmement confortables mais également incroyablement légers : en moyenne moins de 0,8kg chacun, ce qui fait d'eux, à l'heure actuelle, de loin, les coussins haute performance les plus légers.



**Un coussin Vicair
est toujours prêt à l'emploi.
Fiable, il ne se dégonfle pas.
Durable et peu de maintenance.**



Les bénéfices de l'air, la stabilité en plus.

VICAIR est un produit fiable et performant, commercialisé avec succès depuis 25 ans, dans 30 pays à travers le monde et distribué en France par la société INSPIRAL.

- **ALLIANCE ENTRE POSITIONNEMENT DE QUALITÉ ET PRÉVENTION D'ESCARRES HAUTE PERFORMANCE.**
- **PRÉVENTION D'ESCARRES**
excellente redistribution des pressions.
- **POSITIONNEMENT : RÉGLAGE FACILE CONVIENT AUSSI AUX CAS COMPLEXES**
coussins et dossiers épousent spontanément les contours du corps qui trouve sa position naturelle par immersion. Possibilité d'ajuster la position, si besoin en modifiant le remplissage des différents compartiments.
- **DISPOSITIF ÉVOLUTIF**
Le positionnement peut s'envisager de façon progressive dans le temps.
- **S'ADAPTE EN PERMANENCE AU CORPS EN MOUVEMENT**
déplacement des berlingots entre eux.
- **CONVIENT AUX PERSONNES SYMÉTRIQUES COMME ASYMÉTRIQUES MÊME DANS LES CAS EXTRÊMES.**
- **EXCELLENTE STABILITÉ**
empêche les glissements vers l'avant et offre un bon maintien.
- **AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ FONCTIONNELLE** grâce à l'amélioration de la stabilité du bassin.
- **FIABLE** : ne crève pas, ne se dégonfle pas.
- **FAIBLE MAINTENANCE** : par précaution, une vérification des Smartcells conseillée tous les 3 mois.
- **LÉGER ET RÉSISTANT**
N'alourdit pas le fauteuil, facile à transporter.
- **CONFORTABLE**
Epouse la morphologie du corps et amortit les chocs.
- **RÉGULATION DU MICRO CLIMAT**
très peu sensible aux changements de température.
- **SIMPLE D'ENTRETIEN**
Lavage facile (Housse lavable en machine à 60°C). Les coussins O2 sont entièrement lavables en machine.

LES HOUSSES DISPONIBLES

La housse influence inévitablement la performance d'un coussin d'assise. C'est pourquoi les housses Vicair sont fabriquées en matériaux de qualité qui renforcent l'efficacité du coussin garantissant un maximum de confort et de protection. Elles ont chacune leurs spécificités.

HOUSSE COMFAIR

Cette housse respirante est conçue dans un matériau capable de s'étendre dans toutes les directions, permettant ainsi de réduire les pressions au niveau des protubérances osseuses. Le design du tissu respirant permet la circulation d'air et la dissipation de la chaleur.



- matériel utilisé sans latex

HOUSSE INCONTINENCE

Une housse incontinence de qualité est disponible pour tous les coussins d'assise Vicair. Cette housse en tissu élastique imperméable est très pratique dans toutes les situations (en établissement ou à domicile) ou l'incontinence et l'hygiène sont un problème.



HOUSSE AIR EXCHANGE

Conçue pour être utilisée avec les coussins d'assise Liberty Profile, elle est fabriquée dans un tissu en 3D extra respirant et confortable.

HOUSSE CHARLOTTE (O2 TOP COVER) STANDARD

Spécialement conçue pour la gamme de coussins O2, cette housse charlotte respirante ne coiffe que la partie supérieure du coussin laissant ainsi la partie inférieure à l'air libre dans le but de permettre une ventilation et un confort optimal. C'est la housse idéale pour gérer les problèmes d'escarres dus au climat humide.



L'évolution.



Les COUSSINS 02 pallient les problèmes d'hygiène dûs à l'incontinence.
La structure aérée du coussin, avec les berlingots, permet un lavage facile dans n'importe quelle machine sans retirer les berlingots.

Le coussin est idéal pour une utilisation en institution ou à la maison à chaque fois que l'incontinence, la température de la peau, ou l'humidité sont un problème pour l'utilisateur.

La série 02 répond à toutes les exigences de dimensionnement.

- Lavable à 60° en machine
- Respirant
- Léger, ne se dégonfle pas

Coussin 02 entier* lavable à 60C en machine : (Agidens 02/02/23 sur www.Inspiral.fr)

- Passé le protocole de désinfection avec l'utilisation de détergents domestiques ou professionnels.
- Les désinfectants ne sont pas indispensables.
- Les coussins ont été lavés complètement, avec les cellules en place et avec les housses extérieures enlevées.

* Tous les coussins 02 à l'exception de l'Active 02 et du Nomad 02 car ceux-ci n'ont pas été inclus dans le test.




LAVABLE MACHINE
 LAVABLE MACHINE À 60°
 DANS TOUT TYPE
 DE MACHINE.
 PLUS BESOIN DE FILET
 DE LAVAGE OU DE RETIRER
 LES BERLINGOTS.
⚠ SÈCHE-LINGE INTERDIT

ESSORABLE



ESSORABLE À 1200 T/MN.
 SÉCHAGE ESTIMÉ
 À 5 HEURES.

RESPIRANT

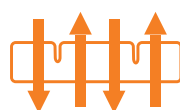

**COUSSIN ENTIÈREMENT
 AÉRÉ. LA STRUCTURE
 PERMÉABLE PROTÈGE
 CONTRE LES PROBLÈMES
 CUTANÉS DUS AU CLIMAT
 HUMIDE EN GARDANT
 LA PEAU AU SEC.**



**145 TAILLES
 STANDARD**

LA GAMME 02
 EST DISPONIBLE
 EN 145 TAILLES STANDARDS
 ET 2 ÉPAISSEURS.
 DE NOMBREUSES TAILLES
 DISPONIBLES SUR MESURE
 POUR RÉPONDRE AUX
 BESOINS SPÉCIFIQUES.

LES COUSSINS 02
 sont maintenant disponibles avec
3 TYPES DE HOUSSES :

L'Active 02, par sa configuration,
 ne nécessite pas de housse externe.
 Il est cependant possible
 de les commander en option

TOP COVER X2 - STANDARD

Housses respirantes type Charlotte

COMFAIR

Housse respirante

INCONTINENCE

Une housse imperméable de haute qualité

**Toute commande de housse supplémentaire non incluse
 dans la commande d'origine de son coussin
 entraînera un surcoût de 25€HT/housse**

ÉGALISATION DES PRESSIONS ADAPTATION OU CORRECTION POUR LES BASSINS ASYMÉTRIQUES

VICAIR 02

Barrière pré-ischiatique :
empêche de glisser vers l'avant.
Transforme les forces de cisaillement en forces normales.

Immersion totale
pour une excellente redistribution des pressions. Offre un bon soutien aux ischions et coccyx. Ajustable pour s'adapter aux asymétries de bassin ou les corriger.

Support de cuisse
Ajustable pour faciliter la propulsion podale

Fermeture zip autour du coussin permettant l'accès à tous les compartiments séparés pour un réglage du positionnement même le patient en place. Située à mi-Longueur elle accentue l'effet d'immersion par son effet contenant.



Dans les cas extrêmes il est possible de corriger la posture du patient en ajustant le nombre de Smartcells de chaque compartiment, mais dans 90% des cas le coussin s'adapte parfaitement sans avoir besoin de le modifier.

- convient aux asymétries même extrêmes.
- très peu de réglages : position améliorée naturellement par l'immersion asymétrique.
- prévention des escarres : bonne immersion pour une meilleure répartition des pressions.
- Léger, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE

Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ●
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ● ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE


Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	6 et 10 cm
Poids moyen	534 g - 769 g
Poids maxi utilisateur	250 kg
Lavable en machine	60°C

TAILLES DES COUSSINS

STANDARD	tailles > 53 cm en 10 cm uniquement
SUR DEVIS	

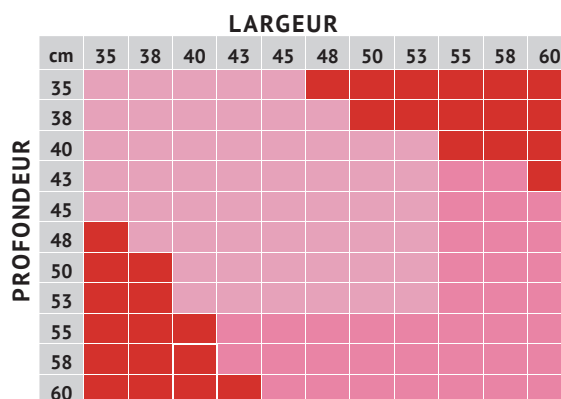

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Pour ADJUSTER 12
voir page 10



ACTIVE 02

POUR LES UTILISATEURS ACTIFS
DÉCHARGE DU COCCYX ET DES ISCHIONS



VICAIR 02

Cuvette ischiatique 2 compartiments

Possibilités de positionnement supplémentaires pour une meilleure décharge des ischions et du coccyx.

Soutien des trochanters :
Compartiments surélevés et plus fermes pour un transfert d'appuis au niveau des trochanters diminuant d'autant les pressions exercées sur les ischions. Stabilité latérale renforcée.

Mousse de forme ergonomique :
Ferme, elle facilite les transferts (Possibilité de commander une mousse plate)

Mousse taillée en biseau – barrière à berlingots
Freine le glissement vers avant



L'Active 02, grâce à ses poches remplies de berlingots à l'arrière et à sa mousse ergonomique à l'avant, offre à la fois, une excellente décharge ischiatique et suffisamment de fermeté pour permettre des transferts faciles.

Ce coussin convient aussi aux tétraplégiques et aux personnes atteintes de maladies neuro musculaires.

- Conçu pour les utilisateurs actifs.
- Transferts faciles.
- Prévention d'escarres : soulage les pressions.
- Convient aux asymétries.
- Léger, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE

Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ●
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ● ●
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ●

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ○ ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE

Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ○
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	6 et 9 cm
Poids moyen	700 g
Poids maxi utilisateur	200 kg
Lavable en machine*	60°C
Housse	en option

*sauf partie mousse

TAILLES DES COUSSINS

STANDARD	tailles > 53 cm en 9 cm uniquement
SUR DEVIS	

		LARGEUR										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
PROFONDEUR	35											
	38											
	40											
	43											
	45											
	48											
	50											
	53											
	55											
	58											
	60											

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

**Cuvette ischiatique
- 2 compartiments :**

Possibilités de positionnement supplémentaires pour une meilleure décharge des ischions et du coccyx.

Soutien des trochanters :

Compartiments surélevés et plus fermes pour un transfert d'appui au niveau des trochanters diminuant d'autant les pressions exercées sur les ischions. Stabilité latérale renforcée.

Compartiments avant :

Permettent l'alignement des jambes et la stabilité. Ajustables pour un positionnement personnalisé.

Fermeture zip :

Autour du coussin permet l'accès à tous les compartiments séparés pour un réglage du positionnement même le patient en place. Située à mi-Longueur elle accentue l'effet d'immersion par son effet contenant.

Le Vector 02 s'adapte parfaitement aux contours anatomiques du patient, lui offrant une grande stabilité et lui permettant ainsi une mobilité optimale du haut du corps. Il est confortable et totalement modulable pour soulager les zones à risques et soutenir les points d'appui en fonction des besoins du patient.

- **excellente stabilité** du bassin grâce au support latéral des cuisses.
- **immersion optimale** bonne redistribution des pressions.
- **convient aux asymétries.**
- **prévention des escarres :** possibilité de décharger les zones à risque.
- **Léger**, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT

**PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D'ESCARRE**

Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ○
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ● ●
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

**FONCTIONNEMENT
ET MISE EN PLACE**


Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	6 et 10 cm
Poids moyen	500 g - 850 g
Poids maxi utilisateur	250 kg
Lavable en machine	60°C

TAILLES DES COUSSINS

STANDARD	tailles > 53 cm en 10 cm uniquement
SUR DEVIS	

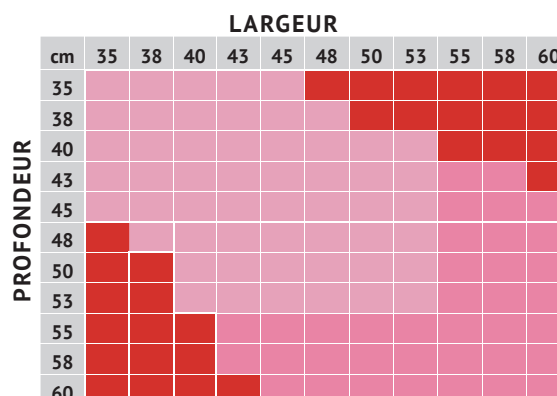

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE



XXTRA 02

POUR LES FORTES CORPULENCES



VICAIR

Barrière pré-ischiatique :
Empêche de glisser vers l'avant.
Transforme les forces
de cisaillement
en forces normales.

Immersion totale : Pour
une excellente redistribution
des pressions. Offre un bon
soutien aux ischions et coccyx.
Ajustable pour s'adapter
aux asymétries de bassin
ou les corriger.

Support de cuisse :
Ajustable pour faciliter
la propulsion podale

Fermeture zip :
Autour du coussin
permet l'accès
à tous les compartiments
séparés pour un réglage
du positionnement.



Le Vicair XXtra est un coussin spécialement développé pour convenir aux personnes fortes qui souhaitent garder une certaine mobilité. Il présente toutes les caractéristiques de l'Adjuster. Poids de l'utilisateur jusqu'à 500 kg. Tailles plus large que les autres produits Vicair. Possibilité de faire du sur mesure.

- Convient aux personnes fortes
- Soulage les pressions
- Immersion et stabilité permettant de limiter les forces de cisaillement
- Positionnement personnalisé et haut niveau de confort
- Ultra léger, ne se dégonfle pas
- Convient aux asymétries.
- Léger, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	● ● ● ● ●
Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ●
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●
POSITIONNEMENT	● ● ● ● ●
Stabilité latérale	● ● ● ● ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	● ● ● ● ●
Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Epaisseur	10 cm
Poids moyen	900 g
Poids maxi utilisateur	500 kg
lavable en machine à 60°C	

TAILLES DES COUSSINS

	STANDARD
	SPECIAL + 180 € HT

		LARGEUR				
PROFONDEUR	cm	55	60	65	70	75
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Barrière pré-ischiatique :
Empêche de glisser vers l'avant.
Transforme les forces de cisaillement en forces normales.

Immersion totale : Pour une excellente redistribution des pressions. Offre un bon soutien aux ischions et coccyx. Ajustable pour s'adapter aux asymétries de bassin ou les corriger.

Support de cuisse :
Ajustable pour faciliter la propulsion podale

Fermeture zip :
Autour du coussin permet l'accès à tous les compartiments séparés pour un réglage du positionnement même le patient en place.



Dans les cas extrêmes il est possible de corriger la posture du patient en ajustant le nombre de Smartcells de chaque compartiment, mais dans 90% des cas le coussin s'adapte parfaitement sans avoir besoin de le modifier.

- convient aux asymétries extrêmes.
- très peu de réglages : position améliorée naturellement par l'immersion asymétrique.
- prévention des escarres : bonne immersion pour une meilleure répartition des pressions.
- Léger, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT


PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	
Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ●
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●
POSITIONNEMENT	
Stabilité latérale	● ● ● ● ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	
Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	
Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	12 cm
Poids moyen	534 g - 769 g
Poids maxi utilisateur	250 kg

TAILLES DES COUSSINS

	STANDARD
	SPECIAL L + 180 € HT
	SUR DEVIS

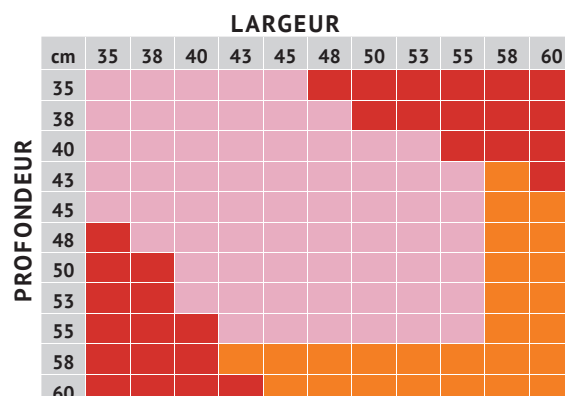

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE



Décharge
de la zone rectale :
Possibilité de décharge totale

Support de cuisse :
Ajustable pour faciliter
la propulsion podale

Barrière pré-ischiatique :
Freine en douceur les glissements
vers l'avant

Le Centre est le coussin idéal pour créer une décharge totale de la zone du périnée, du rectum. En enlevant simplement les berlingots de la zone circulaire vous pouvez créer une zone sans contact. L'immersion dans le coussin apporte une grande stabilité en plus de la redistribution des pressions et permet d'être assis confortablement même dans les situations les plus douloureuses.

- Décharge totale de la zone rectale
- Zone sans contact ajustable
- Positionnement stable

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D'ESCARRE

Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ○
Contrôle du microclimat	● ● ● ○ ○
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ○ ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ○ ○
Prévention des glissements	● ● ● ● ○
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ○ ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ○
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

FONCTIONNEMENT
ET MISE EN PLACE


Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ○ ○
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	10 cm
Poids moyen	750 g
Poids maxi utilisateur	250 kg

TAILLES DES COUSSINS

	STANDARD
	SPECIAL + 180 € HT
	SUR DEVIS

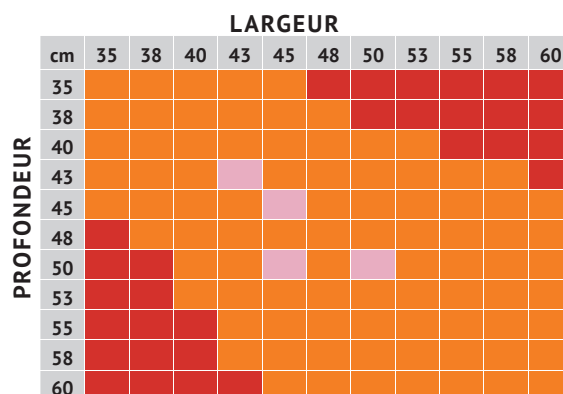

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE



JUNIOR 02

MAXIMUM DE STABILITÉ ET DE CONFORT
POUR LES ENFANTS



VICAIR

Cuvette ischiatique :
Réduit les pressions

Soutien des
trochanters et des
cuisses : Compartiments
surélevés et plus
fermes pour un meilleur
positionnement et
une stabilité latérale
renforcée.

Orientation des jambes



Le Junior,
grâce à ses berlingots
de petite taille,
est spécialement conçu
pour l'enfant.
Il épouse parfaitement
les contours anatomiques
offrant une grande
stabilité
et permet une meilleure
mobilité fonctionnelle du
haut du corps et donc une
autonomie de mouvement
optimale.

- Stabilité optimale
- Confortable
- Léger et robuste
- Design special enfant
- Petits berlingots pour une redistribution optimale des pressions

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE

Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ○
Contrôle du microclimat	● ● ● ○ ○
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ● ●
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ○
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE

Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	6 cm
Poids moyen	350 g
Poids maxi utilisateur	100 kg

DOSSIERS COMPATIBLES

ANATOMIC
MULTIFUNCTION
LIBERTY
XTEND LOW
OPTIMA
OPTIMA CARBONE
ARMADILLO

TAILLES DES COUSSINS

STANDARD
SPECIAL + 180 € HT

LARGEUR		cm	25	28	30	33	35
PROFONDEUR	25						
	28						
	30						
	33						
	35						

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE
NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE



LIBERTY

POSITIONNEMENT SIMPLE
POUR UN CONFORT EXTREME

VICAIR

Œillets :
Pour fixation sécurisée



Double zip arrière et avant :
Pour accueillir barre de dossier
et les cale-troncs montés sur
les tubes

Technologie Vicair :
Berlingots d'air entourés de fluide
silicone, assure confort, soutien
et redistribution des pressions



Le Liberty, est composé du dossier et de ses sangles de fixation. Les sangles de dossier sont faciles à installer et réglables en tension ; elles s'adaptent aisément à la forme du dos permettant ainsi soit une correction, soit un soutien tout en douceur. Des ouvertures, de chaque côté des sangles, offrent la possibilité de rajouter des cales latérales.

- S'adapte parfaitement à la forme du dos.
- Léger, facile à installer.
- Smartcells entourées de fluide silicone.
- Améliore la stabilité latérale.
- Sangles à tension réglable.

Livré avec housse AX
et sangles de fixation

compatible
avec le coussin Junior.



PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D'ESCARRE ●●●○○

Redistribution des pressions ●●●●●

Réduction des forces de cisaillement ●●○○○

Contrôle du microclimat ●●○○○

Réductions des impacts et vibrations ●●●○○

POSITIONNEMENT ●●○○○

Stabilité latérale ●●○○○

Stabilité avant-arrière ●●●○○

Prévention des glissements ●●●○○

Ajustements manuels ●○○○○

Facilité de transferts ●●●○○

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ ●●●●○

Durabilité ●●●○○

Fiabilité (ne se dégonfle pas) ●●●●○

Fonctionnement quand mal utilisé ●●●●●

Peu de maintenance ●●●●●

Niveau d'hygiène ●●●●●

FONCTIONNEMENT
ET MISE EN PLACE ●●●●○

Confort ●●●●○

Légèreté ●●●●●

Tailles disponibles ●●●●○

Poids d'utilisateur maximum ●●●●●

Auto ajustements ●●●●○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	5 cm
Poids moyen	350 g
Poids maxi utilisateur	150 kg
Berlingots/smartcells non garantis à vie	

TAILLES DES DOSSIERS

STANDARD

	LARGEUR*	LONGUEUR
LBS/1	36-40	45
LBS/2	40-43	45
LBS/3	44-48	45

Standard. *Distance mini-max
entre les montants arrière du fauteuil.

UN DOSSIER MODULABLE POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL

VICAIR

Compartiments modulables :

Pour la redistribution
des pressions
et le positionnement



Compartiment central :

Pour décharger le rachis

Œillets :

Pour fixation sécurisée



Double zip arrière et avant :

Pour accueillir barre de dossier
et les cale-troncs montés sur
les tubes

L'Anatomic est composé d'un dossier et de sangles de fixation. Les sangles de dossier sont faciles à installer et réglables en tension. Les nombreux compartiments permettent un positionnement précis et parfaitement adapté aux besoins du patient. Des ouvertures, de chaque côté des sangles, offrent la possibilité de rajouter des cales latérales.

- Compatible avec les fauteuils à dossiers souples.
- Possibilité de décharge des zones à risque.
- Léger, facile à installer.
- Sangles à tension réglable.

Livré avec housse Anatomic et sangles de fixation.

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE

Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ●
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ● ●
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ●

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ●
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE

Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ●

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	7 cm
Poids moyen	900 g
Poids maxi utilisateur	150 kg

TAILLES DES DOSSIERS

STANDARD
SPECIAL + 180 € HT

LARGEUR

cm	30	35	40	45	50
32					
40					
48					
56					

LONGUEUR

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE
NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

compatible
avec le coussin Junior.





MULTIFUNCTION 02

À METTRE SUR DOSSIER RIGIDE OU SOUPLE, POUR SOUTENIR LA LORDOSE LOMBAIRE, STABILISER LÉGÈREMENT LE TRONC DANS LE PLAN FRONTAL ET OUVRIR LA CEINTURE SCAPULAIRE



VICAIR

Compartiments inférieurs :
dégagement fessier respectant la courbure lombaire naturelle. Ajustement pour accentuer le soutien ou la décharge des lombaires ou du sacrum

Décharge du rachis :
l'appui se fait principalement sur les côtés



Contact entre les omoplates :
meilleur confort et un meilleur maintien permettant l'optimisation de la mobilité fonctionnelle

Compartiments latéraux :
immersion permettant une bonne stabilisation latérale

Le dossier Multifonction 02 offre un confort optimal ainsi qu'un excellent maintien. Il épouse parfaitement les courbures naturelles du rachis. Grâce à ses nombreuses possibilités d'ajustement, il peut être utilisé dans des situations très variées.

- Modulable grâce aux différents compartiments.
- Possibilité de décharge des zones à risque ou douloureuses.
- Léger, facile à installer.
- Compatible avec les dossiers rigides
- Compatible avec les dossiers souples à l'aide des options

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	● ● ● ● ●
Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ●
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●
POSITIONNEMENT	● ● ● ● ●
Stabilité latérale	● ● ● ● ●
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ●
MAINTIENANCE ET SÉCURITÉ	● ● ● ● ●
Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ●
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ●

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids moyen	975 g
Poids maxi utilisateur	150 kg

TAILLES DES DOSSIERS

STANDARD	
SPECIAL + 180 € HT	

LARGEUR

cm	36	37	40	41	43	45	46	48	50	54	58	60
36												
38												
40												
43												
45												
48												
50												
52												
54												
58												
60												

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

compatible
avec le coussin Junior.



OPTIONS MULTIFUNCTION 02

2 NOUVELLES OPTIONS SONT MAINTENANT DISPONIBLES
AVEC LE DOSSIER MULTIFUNCTION 02



VICAIR

Les sangles de dossier à tension réglable :

- Elles permettent de fixer le dossier Multifunction 02 sur un support souple.
- On peut fixer le dossier directement sur les sangles à l'aide des bandes de type Velcro ou utiliser l'intermédiaire du Connector.

SANGLES DE DOSSIER

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)
SB/0240	36-41	36-40
SB/0340	43-50	36-40
SB/0248	36-41	43-50
SB/0348	43-50	43-50
SB/0256	36-41	52-58
SB/0356	43-50	52-58

Les systèmes de sangles nécessaires pour les coussins de dossiers spéciaux de + de 50cm de large et 60cm de long nécessitent un devis.

OPTION SANGLES

Prix HT

SANGLES € 161,33



Le Connector :

- Il se présente sous forme d'une housse incluant une bavette. Il sert d'interface entre les sangles réglables en tension et le dossier Multifunction 02.



CONNECTOR

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)
BC/3645	36	45
BC/3754	37	54
BC/4054	40	54
BC/4145	41	45
BC/4554	45	54
BC/4645	46	45
BC/5054	50	54

OPTION CONNECTOR

Prix HT

CONNECTOR € 83,25



FLEX

IDÉAL POUR LES PLAQUES RIGIDES DES DOSSIERS FAUTEUILS CONFORTS OU ÉLECTRIQUES., IL ACCUEILLE ET SOUTIENT DES ATTITUDES CYPHOTIQUES. SES RETOURS LATÉRAUX FAVORISENT UNE STABILITÉ DU TRONC DANS LE PLAN FRONTAL.

VICAIR

Répartition de pressions, confort et positionnement optimal grâce aux 13 compartiments.

Maintien latéral ajustable

Possibilité de décharge au niveau du rachis

Supports latéraux renforcés par des plaques rigides pour un bon maintien pelvien

LES RETOURS LATÉRAUX FAVORISENT UNE STABILITÉ DU TRONC DANS LE PLAN FRONTAL.



Le nouveau dossier Flex offre un grand confort ainsi qu'un maintien renforcé grâce à ses retours latéraux incluant des plaques rigides amovibles et des berlingots d'air Vicair modulables. Il se fixe sur des fauteuils équipés d'une plaque rigide de dossier.

- Compatible avec les fauteuils à dossiers rigides.
- Modulable grâce aux différents compartiments
- Possibilité de décharge des zones à risque ou douloureuses
- Léger, facile à installer
- Housse Air Exchange : tissu en maille 3D pour plus de confort et de micro-ventilation

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	● ● ● ● ○
Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ○
Contrôle du microclimat	● ● ● ○ ○
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●
POSITIONNEMENT	● ● ● ● ○
Stabilité latérale	● ● ● ● ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ○
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	● ● ● ● ●
Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ○
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ○
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	● ● ● ● ○
Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids moyen	900 g
Poids maxi utilisateur	135 kg

TAILLES DES DOSSIERS

	STANDARD
	SPECIAL + 180 € HT

LARGEUR		41	43	45	47	49
LONGUEUR	55					
	56					
	57					
	58					
	59					
	60					

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Les Dossiers nxt™



Le design des dossiers nxt™ a été spécialement conçu pour fournir un excellent soutien, sans limiter les mouvements ni le confort. Le système d'accroches Quickfit, entièrement ajustable, permet un positionnement parfaitement personnalisé. La gamme des dossiers offre des options multiples pour proposer un dossier adapté à chaque utilisateur de fauteuil roulant.

Découpe supérieure :
Libère les omoplates
pour les gestes
fonctionnels

Lumières pré-percées :
Compatibles
avec les têtes,
ceintures et harnais
et cale-troncs

**Supports
latéraux
cintrables**

**Supports latéraux
cintrables**



Découpe arrondie : A la base pour dégager les fesses afin de ne pas pousser le bassin en rétroversion et garder un bon appui le long du dos tout en gardant un bon appui au niveau des EIPS



Accroches Quickfit®

- Accroches 2 points discrètes, légères et robustes
- Rapides et faciles à ajuster
- Permettent un démontage rapide du dossier avec une seule main
- Angle d'ajustement antérieur 25° et postérieur 25°
- Longueur d'ajustement 6,5cm avant ou arrière



- Système de mâchoires s'adaptant sur tubes de 19mm à 25mm sans besoin de les démonter
- Chaque dossier s'adapte sur plusieurs largeurs de fauteuil
- Montage asymétrique ou en rotation possible pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur




XTEND

DOSSIER RIGIDE AJUSTABLE EN LONGUEUR SUPPORT THORACIQUE



Longueur
ajustable

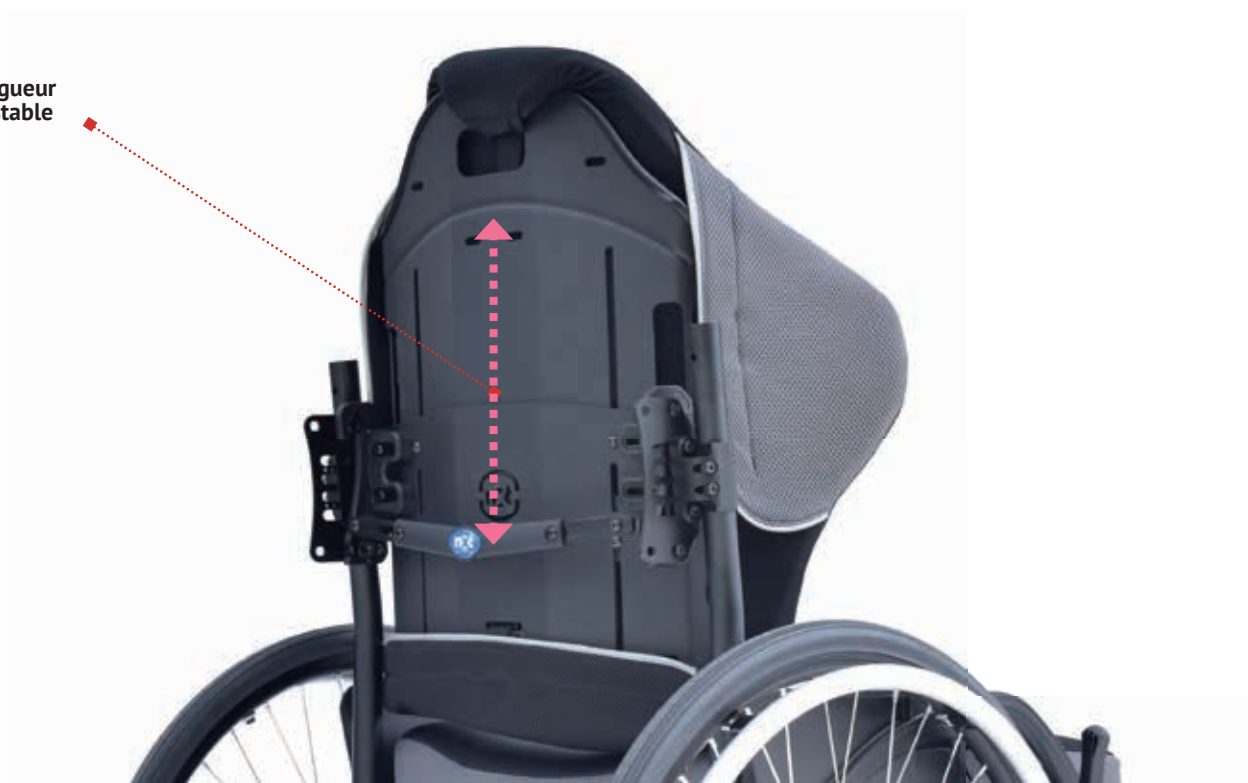

Les Plus :

- Support thoracique ajustable en profondeur
- Longueur ajustable de 40 à 50 cm



AC

CONTOUR ACTIVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	40 - 50 cm
Poids moyen	1860 g
Largeur de fauteuil	40 - 65 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 54 cm



TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NHAACB1616/20	40-45	40-50	9	35	32
NHAACB1816/20	45-50	40-50	9	40	37
NHAACB2016/20	50-55	40-50	9	45	42
NHAACB2216/20	55-60	40-50	9	50	48
NHAACB2416/20	60-65	40-50	9	54	49

PC

CONTOUR PROFOND

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	40 - 50 cm
Poids moyen	2130 g
Largeur de fauteuil	40 - 65 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 54 cm



Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NHAPCB1616/20	40-45	40-50	14-18	37	32
NHAPCB1816/20	45-50	40-50	14-18	42	37
NHAPCB2016/20	50-55	40-50	14-18	47	42
NHAPCB2216/20	55-60	40-50	14-18	53	48
NHAPCB2416/20	60-65	40-50	14-18	59	53

XTEND LOW



DE NOUVELLES TAILLES BASSES POUR LE DOSSIER AJUSTABLE EN LONGUEUR



Les Plus :

- Support thoracique ajustable en profondeur
- Longueur ajustable de 33 à 43 cm



compatible
avec le coussin Junior.



AC

CONTOUR ACTIVE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	33 - 43 cm
Poids moyen	1700 g
Largeur de fauteuil	30,5 - 61 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 54 cm



TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NHAACBL1213/17	30-35	33-43	9	30,5	28,5
NHAACBL1413/17	35-40	33-43	9	35	33
NHAACBL1613/17	40-45	33-43	9	40	38
NHAACBL1813/17	45-50	33-43	9	45	43
NHAACBL2013/17	50-55	33-43	9	51	48
NHAACBL2213/17	55-60	33-43	9	56	54

PC

CONTOUR PROFOND SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	33 - 43 cm
Poids moyen	1970 g
Largeur de fauteuil	30,5 - 61 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 54 cm



Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NHAPCBL1213/17	30-35	33-43	14-18	30,5	28,5
NHAPCBL1413/17	35-40	33-43	14-18	35	33
NHAPCBL1613/17	40-45	33-43	14-18	40	38
NHAPCBL1813/17	45-50	33-43	14-18	45	43
NHAPCBL2013/17	50-55	33-43	14-18	51	48
NHAPCBL2213/17	55-60	33-43	14-18	56	54



OPTIMA

DOSSIER RIGIDE SUPPORT THORACIQUE



AC

CONTOUR ACTIVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	18 - 48 cm
Poids moyen	1220 g
Largeur de fauteuil	33 - 78 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 55 cm

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Prof. contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NOACB1307	33-38	18	8	26,5	22
NOACB1309	33-38	23	8	26,5	22
NOACB1313	33-38	33	8	26,5	22
NOACB1316	33-38	40	8	26,5	22
NOACB1407	35-40	18	8	30	28
NOACB1409	35-40	23	8	30	28
NOACB1413	35-40	33	8	30	28
NOACB1416	35-40	40	8	30	28
NOACB1507	38-43	18	8	33	30
NOACB1509	38-43	23	8	33	30
NOACB1513	38-43	33	8	33	30
NOACB1516	38-43	40	8	33	30
NOACB1607	40-45	18	8	35	33
NOACB1609	40-45	23	8	35	33
NOACB1613	40-45	33	8	35	33
NOACB1616	40-45	40	8	35	33
NOACB1619	40-45	48	8	35	33
NOACB1707	43-48	18	8	38	35
NOACB1709	43-48	23	8	38	35
NOACB1713	43-48	33	8	38	35
NOACB1716	43-48	40	8	38	35
NOACB1719	43-48	48	8	38	35
NOACB1807	45-50	18	8	40	38
NOACB1809	45-50	23	8	40	38
NOACB1813	45-50	33	8	40	38
NOACB1816	45-50	40	8	40	38
NOACB1819	45-50	48	8	40	38
NOACB1916	48-53	40	8	43	41
NOACB1919	48-53	48	8	43	41

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Prof. contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NOACB2007	50-55	18	8	45	43
NOACB2009	50-55	23	8	45	43
NOACB2013	50-55	33	8	45	43
NOACB2016	50-55	40	8	45	43
NOACB2019	50-55	48	8	45	43
NOACB2116	53-58	40	8	48	46
NOACB2119	53-58	48	8	48	46
NOACB2213	55-60	33	8	50	58
NOACB2216	55-60	40	8	50	58
NOACB2219	55-60	48	8	50	58
NOACB2316	58-63	40	8	52	47
NOACB2319	58-63	48	8	52	47
NOACB2416	60-65	40	8	54,6	49,5
NOACB2419	60-65	48	8	54,6	49,5
NOACB2516	63-68	40	8	57	52
NOACB2519	63-68	48	8	57	52
NOACB2616	65-70	40	8	59,6	54,5
NOACB2619	65-70	48	8	59,6	54,5
NOACB2716	68-73	40	8	62	57
NOACB2719	68-73	48	8	62	57
NOACB2816	70-75	40	8	64,6	59,5
NOACB2819	70-75	48	8	64,6	59,5
NOACB2916	73-78	40	8	67	62
NOACB2919	73-78	48	8	67	62

Les Plus :

- Longueur fixe

compatible avec le coussin Junior.





PC

CONTOUR PROFOND

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	18 - 48 cm
Poids moyen	1500 g
Largeur de fauteuil	33 - 78 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 55 cm

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Prof. contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NOPCB1307	33-38	18	14-18	30,5	22
NOPCB1309	33-38	23	14-18	30,5	22
NOPCB1313	33-38	33	14-18	30,5	22
NOPCB1316	33-38	40	14-18	30,5	22
NOPCB1407	35-40	18	14-18	30	28
NOPCB1409	35-40	23	14-18	30	28
NOPCB1413	35-40	33	14-18	30	28
NOPCB1416	35-40	40	14-18	30	28
NOPCB1507	38-43	18	14-18	33	30
NOPCB1509	38-43	23	14-18	33	30
NOPCB1513	38-43	33	14-18	33	30
NOPCB1516	38-43	40	14-18	33	30
NOPCB1607	40-45	18	14-18	35	33
NOPCB1609	40-45	23	14-18	35	33
NOPCB1613	40-45	33	14-18	35	33
NOPCB1616	40-45	40	14-18	35	33
NOPCB1619	40-45	48	14-18	35	33
NOPCB1707	43-48	18	14-18	38	35
NOPCB1709	43-48	23	14-18	38	35
NOPCB1713	43-48	33	14-18	38	35
NOPCB1716	43-48	40	14-18	38	35
NOPCB1719	43-48	48	14-18	38	35
NOPCB1807	45-50	18	14-18	40	38
NOPCB1809	45-50	23	14-18	40	38
NOPCB1813	45-50	33	14-18	40	38
NOPCB1816	45-50	40	14-18	40	38
NOPCB1819	45-50	48	14-18	40	38
NOPCB1916	48-53	40	14-18	43	41
NOPCB1919	48-53	48	14-18	43	41

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Prof. contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NOPCB2007	50-55	18	14-18	45	43
NOPCB2009	50-55	23	14-18	45	43
NOPCB2013	50-55	33	14-18	45	43
NOPCB2016	50-55	40	14-18	45	43
NOPCB2019	50-55	48	14-18	45	43
NOPCB2116	53-58	40	14-18	48	46
NOPCB2119	53-58	48	14-18	48	46
NOPCB2213	55-61	33	14-18	50	58
NOPCB2216	55-61	40	14-18	50	58
NOPCB2219	55-61	48	14-18	50	58
NOPCB2316	58-63	40	14-18	56	47
NOPCB2319	58-63	48	14-18	56	47
NOPCB2416	60-65	40	14-18	58,5	49,5
NOPCB2419	60-65	48	14-18	58,5	49,5
NOPCB2516	63-68	40	14-18	61	52
NOPCB2519	63-68	48	14-18	61	52
NOPCB2616	60-65	40	14-18	63,5	54,5
NOPCB2619	60-65	48	14-18	63,5	54,5
NOPCB2716	68-73	40	14-18	66	57
NOPCB2719	68-73	48	14-18	66	57
NOPCB2816	70-75	40	14-18	68,5	59,5
NOPCB2819	70-75	48	14-18	68,5	59,5
NOPCB2916	73-78	40	14-18	71	62
NOPCB2919	73-78	48	14-18	71	62

Les Plus :

- Longueur fixe
- Support thoracique ajustable en profondeur

compatible avec le coussin Junior.





CLASSIC

DOSSIER RIGIDE SUPPORT PELVIEN

**Les Plus :**

- Longueur fixe

**AC****CONTOUR ACTIVE****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Longueur	40 - 50 cm
Poids moyen	1180 g
Largeur de fauteuil	40 - 60 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 55 cm

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NACB1616	40-45	40	8	35	33
NACB1618	40-45	45	8	35	33
NACB1620	40-45	50	8	35	33
NACB1816	45-50	40	8	40	38
NACB1818	45-50	45	8	40	38
NACB1820	45-50	50	8	40	38
NACB2016	50-55	40	8	45	43
NACB2018	50-55	45	13	45	43
NACB2020	50-55	50	13	45	43
NACB2216	55-60	40	13	55	48
NACB2218	55-60	45	13	55	48
NACB2220	55-60	50	13	55	48



Les Plus :

- Longueur fixe
- Support pelvien ajustable en profondeur



PC	CONTOUR PROFOND	
	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Longueur	40 - 50 cm	
Poids moyen	1500 g	
Largeur de fauteuil	40 - 60 cm	
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 55 cm	



TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NPCB1616	40-45	40	14-18	40	33
NPCB1618	40-45	45	14-18	40	33
NPCB1620	40-45	50	14-18	40	33
NPCB1816	45-50	40	14-18	45	38
NPCB1818	45-50	45	14-18	45	38
NPCB1820	45-50	50	14-18	45	38
NPCB2016	50-55	40	14-18	50	43
NPCB2018	50-55	45	14-18	50	43
NPCB2020	50-55	50	14-18	50	43
NPCB2216	55-60	40	14-18	55	48
NPCB2218	55-60	45	14-18	55	48
NPCB2220	55-60	50	14-18	55	48



OPTIMA CARBONE

DOSSIER ULTRA-LIGHT



Accroches standards



Accroches fixes
NIB-1207



Accroches micro fixes
NIB-1642

3 options :

- Dossier amovible avec barre de démontage rapide d'une main.

- Dossier non démontable : accroches fixes + légères pour dossiers jusqu'à 40 cm de haut.

- Dossier non démontable : accroches micro fixes, ultra légères pour dossier jusqu'à 33cm de haut.

A PRÉCISER LORS DE LA COMMANDE

Les Plus :

- Ultra léger
- 2 options : amovible ou fixe
- Poids plume dossier 40x40 : 0,8 kg



TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm)	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NOCFACB1409	35-40	23	8	30	28
NOCFACB1413	35-40	33	8	30	28
NOCFACB1416	35-40	40	8	30	28
NOCFACB1509	38-43	23	8	33	30
NOCFACB1513	38-43	33	8	33	30
NOCFACB1516	38-43	40	8	33	30
NOCFACB1609	40-45	23	8	35	33
NOCFACB1613	40-45	33	8	35	33
NOCFACB1616	40-45	40	8	35	33
NOCFACB1709	43-48	23	8	38	35
NOCFACB1713	43-48	33	8	38	35
NOCFACB1716	43-48	40	8	38	35
NOCFACB1809	45-50	23	8	40	38
NOCFACB1813	45-50	33	8	40	38
NOCFACB1816	45-50	40	8	40	38
NOCFACB2009	50-55	23	8	45	43
NOCFACB2013	50-55	33	8	45	43
NOCFACB2016	50-55	40	8	45	43

AC

CONTOUR ACTIVE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	23 - 40 cm
Poids moyen	780 g
Largeur de fauteuil	35-55 cm
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 55 cm





Les Plus :

- Ultra léger
- 2 options : amovible ou fixe
- Support thoracique ajustable en profondeur
- Poids plume dossier 40x40 : 1 kg



PC	CONTOUR PROFOND	
	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Longueur	23 - 40 cm	
Poids moyen	950 g	
Largeur de fauteuil	38-55 cm	
Poids maxi utilisateur	136 kg = LARG. 50 cm 182 kg = LARG. 55 cm	



TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur du dossier (cm)	Profondeur contour (cm))	Largeur du dossier nu (cm)	
				externe	interne
NOCFPCB1509	38-43	23	14-18	33	30
NOCFPCB1513	38-43	33	14-18	33	30
NOCFPCB1516	38-43	40	14-18	33	30
NOCFPCB1609	40-45	23	14-18	35	33
NOCFPCB1613	40-45	33	14-18	35	33
NOCFPCB1616	40-45	40	14-18	35	33
NOCFPCB1709	43-48	23	14-18	38	35
NOCFPCB1713	43-48	33	14-18	38	35
NOCFPCB1716	43-48	40	14-18	38	35
NOCFPCB1809	45-50	23	14-18	40	38
NOCFPCB1813	45-50	33	14-18	40	38
NOCFPCB1816	45-50	40	14-18	40	38
NOCFPCB2009	50-55	23	14-18	45	43
NOCFPCB2013	50-55	33	14-18	45	43
NOCFPCB2016	50-55	40	14-18	45	43

nxt™ ARMADILLO


nxt™ ARMADILLO Vicair



Grace à ses 3 sections modulables, l'Armado permet un soutien postural multi ajustable qui s'adapte parfaitement à la courbe dorsale de l'utilisateur. Il permet un ajustement progressif dans le cas où un changement trop radical risquerait de créer un inconfort ou pour suivre une pathologie évolutive.

L'Armado est disponible en deux versions :

- Coussin de dossier en double couche de mousse Visco élastique fluide pour le confort et polyuréthane pour la protection
- Coussin de dossier Vicair rempli de berlingots d'air pour une possibilité supplémentaire de positionnement.
- Système d'accroche réglable de façon symétrique ou asymétrique et rotation
- Supports thoraciques ou pelviens disponibles en option

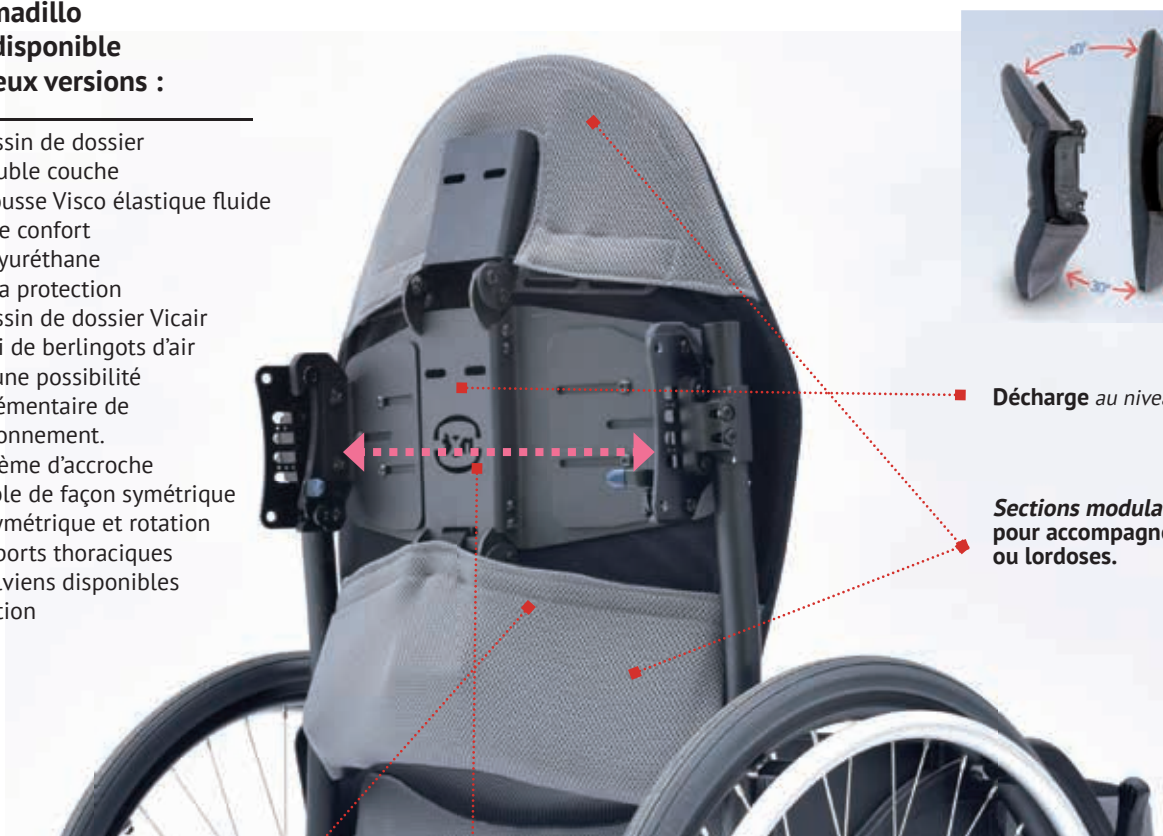

Décharge au niveau du canal médian.

Sections modulables pour accompagner cyphoses ou lordoses.

Bascule antérieure ou postérieure du bassin.
Offre un bon soutien des E.I.P.S.

Largeur ajustable

CONTOURS LATÉRAUX	
Réf.	Description
NIB-1937	Contours latéraux - 5 cm x 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Longueur	40-46 cm
Poids moyen	1770 g
Largeur de fauteuil	Standard 35-65 cm Vicair 35-55 cm
Poids maxi utilisateur	Standard 181 kg Vicair 136 kg




Les Plus :

- Accompagne la cyphose grâce à ces 3 sections modulables
- Permet une évolution progressive du positionnement
- Décharge au niveau du canal médian.
- Largeur ajustable
- La section inférieure s'ajuste pour accompagner les lordoses. Peut s'enlever pour les lordoses sévères
- Bascule antérieure ou postérieure du bassin Offre un bon soutien des E.I.P.S.
- Système d'accroche réglable de façon symétrique ou asymétrique et rotation
- Supports thoraciques ou pelviens disponibles en option

nxt™ **ARMADILLO**

COUSSIN DE DOSSIER DOUBLE COUCHE DE MOUSSE

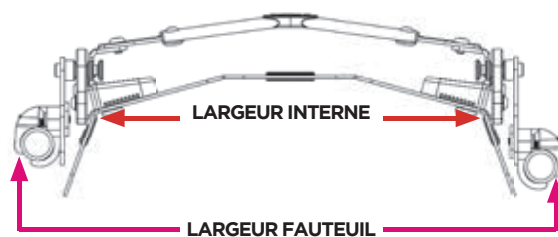


TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur dossier (cm)	Largeur dossier nu (cm)
NMAPSB14	35-40	40	27
NMAPSB16	40-45	40	32
NMAPSB18	45-50	46	37
NMAPSB18-tall	45-50	50	37
NMAPSB20	50-55	46	42
NMAPSB20-tall	50-55	50	42
NMAPSB22	55-60	46	47
NMAPSB22-tall	56-61	50	47
NMAPSB24	60-65	46	52
NMAPSB24-tall	60-65	50	52

EN STOCK

nxt™ **ARMADILLO Vicair**

COUSSIN DE DOSSIER VICAIR

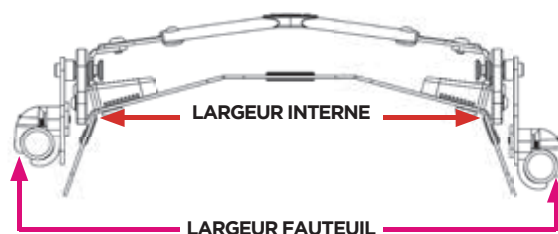

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.	Largeur fauteuil (cm)	Longueur dossier (cm)	Largeur dossier nu (cm)
NVMAPSB14	35-40	40	27
NVMAPSB16	40-45	40	32
NVMAPSB18	45-50	46	37
NVMAPSB20	50-55	46	42

EN STOCK



CALE-TRONCS


POUR DOSSIERS **nxt™**



CLASSIC OPTIMA XTEND


Fixe

A

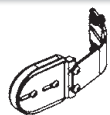

PETIT

B

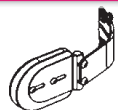

LARGE

STANDARD

A NLAFS-NLPHS

B NLAFS-NLPHL

HOUSSES NÉOPRÈNES

PETIT - LARGE - NIB 0572

A B C

D CONTOUR DOUBLE - NIB 0573


E F ARMADILLO LARGE - NIB-1413

ARMADILLO

Fixe


Escamotable

C

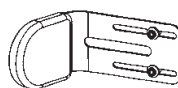


PETIT

D

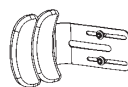

CONTOUR DOUBLE

E

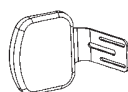

ARMADILLO LARGE

F



ARMADILLO LARGE

ARMADILLO

C NMAPS - LCS

D NMAPS - LPS

E NMAPS - DLTSE

F NMAPS - DLTSS

COUSSINETS

PETIT : 8,9 x 8,3 cm

LARGE : 10,2 x 8,9 cm

CONTOUR : 5,1 x 14 cm

ARMADILLO LARGE : 16,5 x 19,1 cm




CALES EN MOUSSE



CALES MOUSSE	
Réf.	Description
NIB-0190 *	Cales en mousse x2 – Support pelvien, lombaire
NIB-0191	Cales en mousse x2 – Support latéral étroit
NIB-0192	Cales en mousse x2 – Support latéral large

* livré avec tous les dossiers en standard sauf le FH Vicair, Armadillo et Xtend Kid

BAVETTE DE DOSSIER

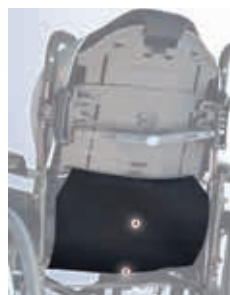

BAVETTE DE DOSSIER	
Réf.	Description
NIB-1938	pour fauteuil de largeur 28-33 cm - EXTRA SMALL
NIB-1078	pour fauteuils de largeur 35 à 40 cm - SMALL
NIB-1079	pour fauteuils de largeur 43 à 48 cm - MEDIUM
NIB-1080	pour fauteuils de largeur 50 à 55 cm - LARGE
NIB-1081	pour fauteuil de largeur 58-66 cm - EXTRA LARGE

TÊTIÈRE **nxt**™ MULTI AJUSTABLE

Les têtes **nxt**™ s'adaptent parfaitement à une position personnalisée grâce à :

- une rotule à l'arrière du coussin d'appui pour suivre la position de la tête
- un bras courbé qui se positionne de 25 à 35 cm en Longueur et se replie pour plus de discrétion
- un coussin d'appui cintrable pour ajuster parfaitement à la forme de la tête en mousse double densité
- livrée avec leviers ajustement rapide x2
- Livrée avec housse essuyable



TÊTIÈRES			
Réf.	Coussin de tête	Largeur	Longueur
NIB-0785+747+823	PETIT	23 cm	13 cm
NIB-0784+747+823	LARGE	25 cm	13 cm
NIB-0818+747+823	EXTRA LARGE	35 cm	13 cm

OPTIONS	
NIB-1210	Option d'escamotage Permet d'escamoter la tête en arrière
NIB-1200	Adaptateur universel - Permet de monter d'autres types de têtes sur le dossier
NIB-0747	Tige de fixation nxt compatible avec AXION et SAVANT



TÊTIÈRE SAVANT

REVÊTEMENT CARBONE



Le SAVANT est un support nouveau et unique pour la tête. Il est léger, ne tient pas chaud, et peut être facilement modelé à la main. Il fournit un support à trois niveaux, de la tête, afin de contrôler la flexion latérale et la rotation. Un bandeau peut être utilisé en complément pour un support antérieur



Caractéristiques :

- Les supports latéraux viennent agir comme des mains pour accompagner, orienter et soutenir le port de tête.
- Armature en acier modelable sans outil
- Le bandeau frontal (fourni) offre, si besoin, un support antérieur supplémentaire
- Des boucles facilement détachables tiennent le bandeau frontal en place
- Les coussinets latéraux sont remplis de gel silicone pour le confort
- La têtère est recouverte d'un revêtement carbone qui limite les effets de cisaillements
- Le disque de support s'adapte à une boule de 25mm.



La têtère SAVANT et l'interface AXION sont compatibles avec la tige de fixation nxt (voir p33)

Les Avantages :

- Facile à ajuster et à repositionner : Les support latéraux peuvent être modelés à la main à chaque fois que c'est nécessaire.
- Confortable
- Ne tient pas chaud, favorise une excellente circulation d'air
- Facile à garder propre (laver avec une éponge à l'eau savonneuse, puis laisser sécher)
- Contrôle efficace de la tête.
- Limite les cisaillements
- Revêtement carbone plus facile à nettoyer et plus durable.



TÊTIÈRE SAVANT	
Réf.	TAILLE
SAVANT CC- A	ADULTE
SAVANT CC-S	SMALL
SAVANT CC-P	PÉDIATRIQUE
SAVANT CC-SP	Coussinet latéral TAILLE UNIQUE



BIEN CHOISIR SA TÊTIÈRE

Circonférence au niveau du front	cm
Adulte	56-61
Small	46-56
Pédiatrique	36-46
1/2 Circonférence derrière les oreilles	
Adulte	20-30
Small	15-18
Pédiatrique	13-15



ACCESSOIRES FIXATION TÊTIÈRES



TOUS SONT ÉQUIPÉS D'UNE BOULE STANDARD DE 25MM

AXION INTERFACE ROTATIVE



**Interface rotative pour têtère de fauteuil roulant.
Découple les capacités de réglage de l'appui tête Savant.**

L'Axion s'adresse à ceux qui ont un contrôle de tête limité et une étendue du champ d'action ou de vision limitée. Elle s'adresse aussi à ceux qui tournent fréquemment la tête contre la têtère.

L'interface rotative Axion se fixe entre la têtère et la tige de montage. Elle permet aux têtères de se déplacer horizontalement sur 90° ou 60°, améliorant ainsi la liberté

de mouvements et la mobilité fonctionnelle de l'utilisateur, et en limitant les risques de cisaillement. On peut la verrouiller dans une position choisie ou bien la laisser libre pour préserver le mouvement de la tête si nécessaire. Combinée avec la têtère Savant et une tige de montage adéquate elle relève le défi d'offrir un appui adapté quel que soit la position de la tête de l'utilisateur.

Réf.	Description
Axion-9025	permet une rotation de 90 degrés, s'adapte sur une boule de 25 mm



SYSTÈME DE FIXATION TWIN HH



Le matériel de montage d'appui-tête TWIN HH est le montage d'appui-tête vraiment universel.

Une fonction télescopique unique permet un positionnement précis de l'appui-tête sans outils. Tige de 28 cm, permet de positionner à environ 25 cm en avant du dossier.

Réf.	Description
TWIN HH	Système de fixation universel

• Avec boule standard de 25mm

Sur demande, des poignées peuvent être fournies pour un positionnement sans outil du bras pivotant.

SYSTÈME DE FIXATION TWIN FORWARD FLEX



Le matériel Twin Forward Flex a toutes les mêmes caractéristiques que le système TWIN HH

Il ajoute une portée étendue pour permettre aux appui-tête d'être montés à 43 cm en avant du dossier.

Idéal pour accommoder une posture cyphotique.

Réf.	Description
TWIN FF	Système de fixation Cyphotique

• Avec boule standard de 25mm

Sur demande, des poignées peuvent être fournies pour un positionnement sans outil du bras pivotant.



SYSTÈME DE FIXATION TWIN DYNAMIC FLIP



C'est un système escamotable et dynamique qui permet d'absorber les mouvements de l'utilisateur.

La fonction dynamique peut être activée ou désactivée par un bouton de verrouillage, offrant ainsi, au choix, un support de tête rigide ou dynamique. Il est facilement escamotable au moment des transferts.

- Livré avec 2 ressorts de souplesse différente. de diamètre.

Réf.	Description
TWIN DYN FLIP	Système de fixation dynamique escamotable

- Avec boule standard de 25mm

SYSTÈME DE FIXATION INFINITY



Léger discret, facile à ajuster le système INFINITY est surtout ultra modulable, il permet une adaptation sur mesure, dans la position souhaitée.

La conception robuste et rigide permet une infinité d'ajustements :

- Grâce à son système de verrouillage il ne bouge plus une fois en place.
- Possibilité d'ajouter des modules supplémentaires pour davantage de réglages (Infinity Link)
- Usiné avec précision à partir d'un alliage de qualité aéronautique

Réf.	Description
INF HH	système de fixation Infinity
INF LINK	module supplémentaire pour fixation Infinity

BARRE DE MONTAGE POUR TÊTIÈRE



C'est un adaptateur qui permet de monter des appui-têtes sur des fauteuils roulants à dossier souple.

Les leviers à dégagement rapide permettent de retirer l'adaptateur afin que le fauteuil roulant puisse être plié.

3 tailles disponibles.

Réf.	TAILLE	Largeur fauteuil
CHAS	SMALL	36 > 41CM
CHAM	MÉDIUM	41 > 46 CM
CHAL	LARGE	46 > 51 CM

SUPPORTS ARTICULÉS

Supports thoraciques articulés, escamotables, réglables en hauteur, profondeur et largeur avec options de rotation pour avoir 360 ° de rotation

Ils agissent comme des mains venant soutenir la zone du tronc à l'endroit souhaité. Ce qui fait l'excellence de ces supports latéraux, c'est la possibilité d'ajuster tous les éléments de manière à ce qu'ils puissent se placer exactement à l'endroit pertinent et y rester afin d'optimiser le positionnement. C'est grâce à cette qualité qu'on obtient un positionnement le plus efficace et le moins invasif possible.



SUPPORT TYPE A: ESCAMOTABLE, ROBUSTE, DEUX POINTS D'ARTICULATIONS OU PLUS

Réf.	Description
TWBL-R	Support double articulation droite - *Longueur approx. 16cm
TWBL-L	Support double articulation gauche *Longueur approx. 16cm
LTHW511	Interface pour rotation 360°
LHW129	Interface de liaison supplémentaire Longueur 6cm

SUPPORTS FINS ARTICULÉS SIMPLE OU DOUBLE

Supports thoraciques fins, escamotables, avec articulation simple ou double

Ce matériel léger et discret est conçu pour être installé dans des espaces restreints. Parfait pour un bon maintien sous axillaire.



SUPPORT TYPE B: ESCAMOTABLE, DISCRETS, ARTICULATION SIMPLE OU DOUBLE

Réf.	Description
TWBTL-X	Support simple articulation - *Longueur approx. 10cm
TWBSTL-X	Support double articulation - *Longueur approx. 14cm

* Longueur estimée entre le milieu du coussinet et le tube de dossier. Les coussinets ont également environs 4,5cm d'ajustement de profondeur grâce aux lumières de fixation.

COUSSINETS

TYPE D'ACCROCHE

La fixation des coussinets sur le support permet environ 20° d'inclinaison avant/arrière.

Vendus à l'unité et fournis avec une housse néoprène.



COUSSINETS	
Réf.	Description
TWBL-3x5	7,5x12,5cm coussin de maintien thoracique
TWBL-4x6	10x15cm coussin de maintien thoracique
TWBADD-3x6	8x15cm coussin de maintien pelvien/fémoral
TWBADD-4x10	10x25cm coussin de maintien pelvien/fémoral

COUSSINETS	
Réf.	Description
LPHW400	1 x fixation pour tube de dossier 25 mm
LPHW402	1 x fixation pour tube de dossier 22 mm
LPHW401	1 x fixation pour tube de dossier 19 mm
LTHW524	1 x entretoise pour montage collier (obligatoire pour les supports fins)

option HOUSSE NÉOPRÈNE



HOUSSE NÉOPRÈNE	
LHW-126	Housse néoprène



Bodypoint®, leader mondial de produits de positionnement, propose une gamme pour répondre à tous vos besoins de positionnement secondaire.

POSITIONNEMENT BASSIN

- Ceintures de hanches deux et quatre points
- Coussinets Sub EIPS
- Harnais de jambes

ÉQUIPEMENT

Bodypoint® propose une gamme complète de fixations pour votre équipement de positionnement



POSITIONNEMENT BAS DU CORPS

- Ankle Huggers maintiens de chevilles
- Appui mollets et sangles mollets



POSITIONNEMENT HAUT DU CORPS

- Stayflex support de tronc
- Monoflex support de tronc
- Harnais d'épaules
- Ceintures pectorales
- Aeromesh ceinture de bain
- Ceinture universelle

COMPOSANTS FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

- Poignées de joystick
- Montage central joystick



LE CATALOGUE EST DISPONIBLE
SUR DEMANDE
OU TÉLÉCHARGEABLE
SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.INSPIRAL.FR

Le Vicair 4 est un coussin à berlingots d'air, haute performance, pour la prévention des escarres. Il est composé de quatre compartiments identiques, conçus pour épouser parfaitement les contours du corps. Sa configuration permet d'obtenir le parfait équilibre entre confort, protection cutanée et stabilité du bassin. Il est très léger et ne nécessite aucun ajustement.

PROTECTION DE LA PEAU

Excellente redistribution des pressions grâce à l'effet d'enveloppement des berlingots qui s'adaptent à la morphologie de chaque utilisateur, et réduit les pressions. Sa structure entièrement aérée permet de réguler efficacement le microclimat.



CONFORT ET FIABILITÉ

Le Vicair 4 offre tout de confort et l'efficacité d'un coussin à air sans en avoir les inconvénients : en répartissant les appuis il permet de lutter contre les douleurs ; il ne présente pas de risque de se dégonfler ou de se percer, ce qui offre une grande tranquillité d'esprit autant à l'utilisateur qu'aux équipes soignantes.

Comme pour tous les autres coussins Vicair O2 les berlingots sont garantis à vie.



STABILITÉ DU BASSIN

Grâce à l'immersion, le Vicair4 absorbe naturellement les asymétries de bassin, même minimales, et s'adapte donc à la morphologie individuelle de chaque patient. Il vient soutenir et stabiliser le bassin permettant ainsi au haut du corps de retrouver l'équilibre nécessaire à une meilleure mobilité fonctionnelle. L'immersion dans le coussin permet de limiter les glissements et donc les forces de cisaillement, ce qui le rend doublement efficace pour lutter contre les escarres.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Il est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Parfaitement symétrique, il peut s'utiliser dans n'importe quel sens, aucune possibilité de le positionner de manière incorrecte. Il ne nécessite aucun réglage et demande très peu de maintenance. Il est lavable en machine à 60°C, berlingots inclus.



DÉSINFECTION

Le Vicair 4 passe le test de désinfection lorsqu'il est lavé sans sa housse à 60°C avec un détergent.



Livré avec 2 housses charlotte respirantes (housse incontinence en option)



Les Plus :

- Prêt à l'emploi
- Prévention d'escarres
- Limite les glissements
- réduit les forces de cisaillement
- Réduit les pressions
- Régule efficacement le microclimat
- Ne nécessite aucun ajustement.
- Absorbe naturellement les asymétries de bassin
- Confortable et fiable
- Très léger
- Lavable en machine à 60°C berlingots inclus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	8 cm
Poids moyen	800 g
Poids maxi utilisateur	250 kg

Remarque : pour travailler sur une correction de posture, consulter la gamme de nos coussins de positionnement Vicair O2, car le Vicair 4 n'est pas un coussin ajustable.

TAILLES DES COUSSINS

Largeur fauteuil (cm)	Dim. du coussin VICAIR 4
36 > 42	40x40 cm
39 > 45	43x43 cm
41 > 47	45x45 cm
44 > 50	48x48 cm
46 > 53	50x50 cm



COUSSIN LIBERTY & LIBERTY PROFILE

ULTRA LEGER, FACILE A UTILISER ET CONFORTABLE

VICAIR



Le coussin Liberty est un coussin simple et confortable, prêt à l'emploi rempli de berlingots d'air entourés d'un fluide silicone. Il soulage les pressions et prévient les escarres pour des utilisateurs présentant des risques faibles ou moyens. Grâce à sa valve auto réglable, il est facile à utiliser. Il épouse parfaitement les contours du corps, offrant ainsi un maximum de confort et une grande stabilité à son utilisateur.

- Prévention d'escarres
- Egalise la distribution des pressions
- Stabilité
- Confortable
- Très léger
- Facile à laver
- Housses

PERFORMANCES PRODUIT

PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE

Redistribution des pressions	● ● ● ● ○
Réduction des forces de cisaillement	● ● ○ ○ ○
Contrôle du microclimat	● ● ○ ○ ○
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ○

POSITIONNEMENT

Stabilité latérale	● ● ● ● ○
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ○
Prévention des glissements	● ● ● ● ○
Ajustements manuels	○ ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○

MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Durabilité	● ● ● ● ○
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ○
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ●
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●

FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE

Confort	● ● ● ● ○
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ○
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	6 cm
Poids moyen	600 g
Poids maxi utilisateur	150 kg
Berlingots/Smartcells non garantis à vie	



TAILLES DES COUSSINS

STANDARD	
NON DISPONIBLE	

LARGEUR

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

HAUTEUR

SOUTIEN LOMBAIRE BUTTERFLY



PERMET DE CRÉER UN POSITIONNEMENT ACTIF, DÉTENDU ET STABLE
SUR UN FAUTEUIL ROULANT STANDARD.

Soutien Latéral et dorsal

Excellente redistribution des pressions grâce à l'effet d'enveloppement des berlingots qui s'adaptent à la morphologie du patient

Fermeture éclair

pour permettre l'adaptation de garnissage des berlingots en fonction de la morphologie



Sangles de fixation ajustables

conçues pour s'attacher au dossier d'un fauteuil roulant, elles permettent d'ajuster facilement la hauteur.

Le Butterfly offre un bon appui lombaire aux patients qui ne souhaitent pas de dossier

- Adaptation précise aux contours du corps du patient.
- Gestion de la densité grâce aux compartiments rechargeables à fermeture zippée.
- Offre un positionnement actif, détendu et stable.
- Conçu pour être utilisé sur fauteuils roulants standards, mais s'adapte aussi aux chaises



Les Plus :

- Prêt à l'emploi
- Prévention d'escarres
- Limite les glissements
- Réduit les forces de cisaillement
- Réduit les pressions
- Ne nécessite aucun ajustement.
- Confortable et fiable
- Très léger

3 MODES DE POSITIONNEMENT EN 1

Position active :

Soutient le bassin et la colonne vertébrale inférieure. Dans cette position, on évite une rotation postérieure du bassin; on obtient et maintient ainsi plus facilement un positionnement actif

Position détendue :

Soutient la partie inférieure de la cage thoracique: Le Butterfly peut aussi être utilisé à l'envers (pour soutenir la cage thoracique inférieure). Cela améliore le soutien latéral et favorise un positionnement plus détendu.

Position stable :

Supporte le bassin, la colonne vertébrale inférieure et la cage thoracique: combinez deux Butterfly – un en bas et un en haut. Cette configuration crée un soutien dorsal individualisé et procure un contact corporel confortable du bassin jusqu'au milieu de la colonne thoracique.

SOUTIEN BUTTERFLY

Réf.	Taille en cm	Prix TTC 20%
ABU/CK/4020	40x20 cm	€ 306,52
ABU/CK/4520	45x20 cm	€ 306,52
ABU/CK/5020	50x20 cm	€ 306,52



COUSSINETS INSERTS CONFORT

NEW

ULTRA LEGER, MODULABLE, FACILE A UTILISER ET CONFORTABLE

VICAIR


COUSSINETS 18X16X6CM
idéaux pour ischiens ou lombaires.

Garnissage
par système
de poche :
Avec berlingots

Entretien facile
entièrement lavables
en machine.



COUSSINETS 10X10X4CM : idéaux pour les inserts
ischiatiques coques pédiatriques, pour la protection
des genoux, chevilles et coudes etc.

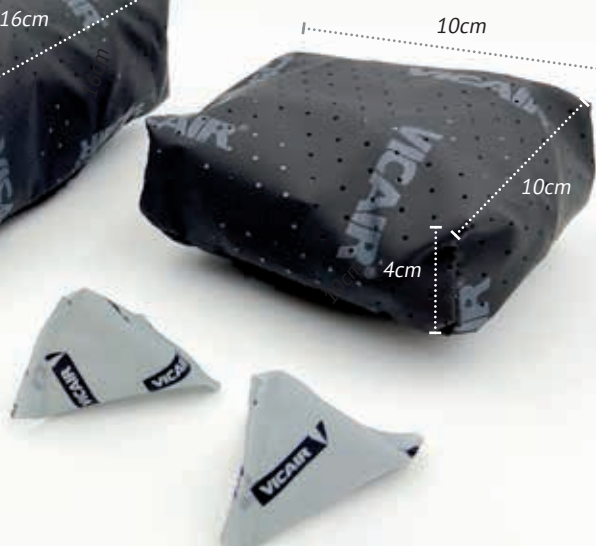

Les coussinets sont disponibles en 2 tailles.

• VERSION 10X10X4CM

idéale pour les inserts ischiatiques shell pédiatriques,
la protection des genoux, des chevilles, coudes, etc.

• VERSION 18X16X6CM

parfaite pour les ischiens ou lombaires.

Très simples à installer, ils sont faciles à moduler selon
les besoins. grâce à leur système de garnissage par
poches.

Intégralement lavables à 60°C, ils garantissent une
hygiène parfaite.



Technologie Vicair
Berlingots d'air, assurent
confort, soutien, redistribution
des pressions



Fixation simple et facile
à l'aide des bandes
de type Velcro



Les Plus :

- Egalise la distribution des pressions
- Stabilité
- Respirant
- Confortable
- Facile à positionner
- Lavables machine à 60°C

COUSSINETS INSERTS

Réf.	À l'unité	Prix TTC 20%
VCP/10104	10x10x4cm Inserts	€ 65,00
VCP/18166	18x16x6cm inserts	€ 99,00

UN MATELAS À AIR - LA STABILITÉ EN PLUS LIMITE LES FORCES DE CISAILLEMENT EN POSITION SEMI ASSISE

VICAIR


36 compartiments
remplis de berlingots d'air
disposition ergonomique.
Possibilité de décharge
des zones à risques



Le matelas VICAIR, grâce à l'excellente répartition des pressions, permet d'atténuer les douleurs du patient lui offrant ainsi de meilleures conditions de repos. Il convient parfaitement pour la prévention, mais aussi le soin des escarres. Les différents compartiments sont remplis de berlingots d'air que l'on peut bouger pour décharger les zones à risques. Il apporte une grande stabilité et une protection même en position assise. Son entretien facile fait de ce matelas un produit très adapté à l'utilisation en collectivité.

Les Plus :

- Tissu de revêtement anti-cisaillement.
- Housse imperméable
- Base de mousse
- Fonctionne sans compresseur.

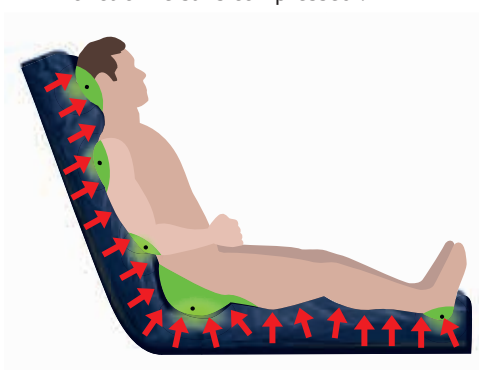

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	15 cm
Poids moyen	10 kg
Poids maxi utilisateur	250 kg
Garantie matelas	5 ans
Garantie housse	1 an

TAILLES DES DOSSIERS

	STANDARD
	SPECIAL
	NON DISPONIBLE

TARIF DÉGRESSIF EN FONCTION
DE LA QUANTITÉ À PARTIR
DE 3 UNITÉS, VEUILLEZ NOUS
DEMANDER UN DEVIS.

		LARGEUR											
LONGUEUR	cm	68	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	140												
	180												
	185												
	190												
	195												
	200												
	205												
	210												
	215												
	220												
	60												



TALONNIÈRE DE DÉCHARGE

LA TALONNIÈRE PRÉVENTION D'ESCARRES **Maxxcare®**

Protection contre les forces de friction et de cisaillement

Recouverte, à l'extérieur, d'un tissu anti-friction, la talonnière permet de limiter au maximum les problèmes de frottement et de distorsion des tissus lorsque le patient bouge dans son lit.

Décharge du talon et de la cheville

Grâce à ses 4 tubes d'air situés à l'arrière et sur les côtés, la talonnière Maxxcare offre une excellente protection du talon et de la cheville.



Légère et parfaitement adaptée à l'anatomie du pied

Elle pèse moins de 0,1kg et reste parfaitement maintenue en place grâce à ses 2 points d'accroche.

La talonnière prévention d'escarres Maxxcare Permet de décharger les pressions au niveau du talon et de la cheville.

Ses 4 tubes d'air amovibles offrent une bonne protection contre les forces de pressions et de cisaillement.

Equippée d'un dessous anti-dérapant, on peut l'utiliser couché, assis ou en marchant.

La talonnière Maxxcare a été conçue pour garantir un maximum de confort au patient souhaitant une bonne prévention ou suivant un traitement contre les escarres.

Utilisation simple et pratique
La talonnière est prête à l'emploi et ne demande aucune préparation, elle est installée en quelques secondes par le personnel soignant.

TAILLES DISPONIBLES

SMALL	< 38 cm
STANDARD	38 - 43 cm
XL	> 43 cm



La partie anti-dérapante située sous le pied permet à l'utilisateur de se lever sans risque de glisser.



TALONNIERE

Réf.	Prix TTC 20%
Maxxcare Heel Pro SMALL	€ 54,99
Maxxcare Heel Pro STANDARD	€ 54,99
Maxxcare Heel Pro XL	€ 54,99
Maxxcare LOT de TUBES/(TAILLE)	€ 27,99

La minerve Headmaster est la solution idéale pour compenser une faiblesse musculaire au niveau du cou. Son design léger et aéré fournit un excellent support pour un meilleur contrôle de la tête, sans encombrer la silhouette ni gêner la respiration. Elle peut être facilement modelée à la main pour s'adapter aux besoins et à la morphologie de l'utilisateur pour un maximum d'efficacité et de confort.



Les Plus : UTILISATEUR

- Confortable, ne tient pas chaud
- Facile à installer et à retirer
- Légère et discrète
- Ne gêne pas la respiration
- Facile à garder propre
- Choix de coussinets pour le confort
- Accès facile pour les trachéotomies

Les Plus : INSTALLATEUR

- Facile à adapter à la bonne taille (plier la minerve à la main pour l'ajuster)
- Facile à mettre en place grâce à son velcro
- Accessoires disponibles pour modifier la fonction de la minerve
- Toutes les parties sont disponibles en SAV
- Une seule mesure à prendre pour le choix de la taille



Donner forme à la minerve

- Plier la minerve à la main jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur et la largeur désirée. Elle gardera la forme que vous lui avez donnée
- Plier la minerve pour dégager les clavicules si nécessaire
- Un coussinet pour le menton peut être ajouté à la partie de la minerve qui va sur la poitrine pour un rembourrage supplémentaire





MINERVES & ACCESSOIRES



Bien choisir sa minerve :

Mesurer à l'aide d'une règle rigide sous la mâchoire, la distance la plus courte entre le milieu du menton et l'angle de la mandibule (a). Si vous hésitez entre 2 tailles optez pour la plus petite.

a = la distance la plus courte entre le milieu du menton et l'angle de la mandibule



MESURES :	
TAILLE	a (cm)
Large	13
Medium	11,5
Small	10
Junior	9
Enfant	7,5
Bébé (dès 6 mois)	6,5



MINERVE HEADMASTER		
Réf.	Couleur	Convient à
HMC01-G	GRISE	LARGE
HMC02-G	GRISE	MEDIUM
HMC03-G	GRISE	SMALL
HMC04-G	GRISE	JUNIOR
HMC05-U	BLEUE	ENFANT
HMC06-U	BLEUE	BÉBÉ

COUSSINET MENTONNIERE DE REMPLACEMENT		
Réf.	Couleur	Convient à
HMCCS2-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCCS3-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCCS4-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

BANDEAU DE NUQUE DE REMPLACEMENT		
Réf.	Couleur	Convient à
HMCNS01-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCNS03-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCNS06-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU



Un support antérieur supplémentaire (et une mentonnière) pour une solide résistance à la flexion. Ce support antérieur doit être retiré si le collier cervical est utilisé pour le transport.

SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU		
Réf.	Couleur	Convient à
AST 01-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
AST 02-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
AST 03-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

COUSSINET DE COU



Un coussin moulable placé au centre pour le soutien postérieur.

COUSSINET DE COU		
Réf.	Couleur	Convient à
HMNPL	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMNPS	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMNPC	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

COUSSINETS D'EXTENSION



Deux coussinets positionnés pour un soutien latéral

COUSSINETS D'EXTENSION		
Réf.	Couleur	Convient à
HMCPL-G	GRIS	LARGE & MEDIUM
HMCPS-G	GRIS	SMALL & JUNIOR
HMCPC-U	BLEU	ENFANT & BÉBÉ

Partie dorsale ergonomique
Souple elle épouse le bas du dos

Sangles faciles à ajuster
S'adaptent à chaque morphologie pour garantir un grand confort

Compartiments à berlingots
Protection de la peau

Le Nomad 02
s'adresse aux personnes qui peuvent être amenées à sortir de leur fauteuil, mais qui souhaitent conserver une bonne protection contre les escarres en toute circonstance...
Le Nomad 02 leur permet de s'asseoir et de se mouvoir sur d'autres supports en toute sécurité (piscine, kayak, pelouse, tapis, etc).
Il est destiné à une utilisation ponctuelle et peut être un très bon accessoire pour les sportifs.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Poids moyen	800 g
Poids maxi utilisateur	100 kg
Lavable machine	60°C

TAILLES DISPONIBLES

SMALL	< 38 cm
MEDIUM	38 - 43 cm
LARGE	43 - 48 cm

PRENDRE LES BONNES MESURES !

Ne pas suivre les contours de jambe, veillez à conserver le mètre-ruban bien droit. Mesurez de A à B (ou B à A). Choisissez la plus grande taille si la taille mesurée est en entre deux tailles.

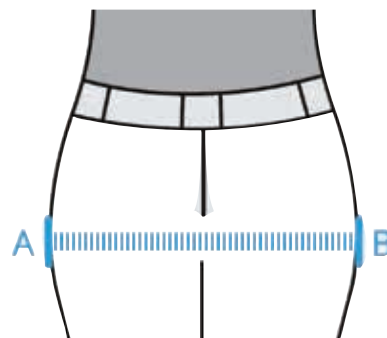

NOMAD

Prix TTC 20%

NOMAD

€ 349,95



MESURE LA FORCE TOTALE DE CISAILEMENT L'OPTIMISATION DU POSITIONNEMENT

Le glissement est un important problème clinique, mais jusqu'à présent difficile à quantifier. L'iShear® est une nappe de mesure qui dorénavant permet d'apprécier précisément la Force Totale de Cisaillement*; elle est conçue pour vous aider à évaluer le positionnement d'une personne dans son système d'assise.

ISHEAR® est le 1^{er} outil clinique au monde capable de mesurer la Force Totale de Cisaillement sur l'assise.

iShear permet de diminuer les forces de glissement lors de l'installation au fauteuil roulant. iShear est un excellent moyen d'éduquer les utilisateurs ainsi que les tierces personnes à l'utilisation idéale du fauteuil.



L'iShear se place sous le coussin d'assise



Le réglage est simple


Tout ce dont vous avez besoin est de l'iShear et d'une tablette ou d'un Smartphone. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite iShear et de vous laisser guider



Connection bluetooth entre iShear et votre tablette ou smartphone

SYSTÈME ISHEAR :

- Pour fauteuil de 31 à 55 cm de large et de 40 à 60 cm de Longueur
- Jusqu'à 8h d'enregistrement continu
- Mesures en temps réel
- Sauvegardez, exportez et partagez des mesures
- Comparez de multiples mesures
- Ajoutez des notes sur les prises de mesures
- Application gratuite

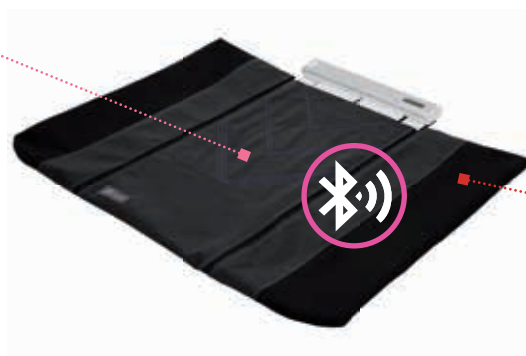

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids :	1,7 kg
Dimensions :	320 x 720 x 620 mm
Compatibilité :	iPhone iOS 10.2 minimum iPad iOS 10.2 minimum iPod iOS 10.2 minimum Mac iOS 11 minimum
Stockage minimum requis	11.4 MB
Poids utilisateur :	45 à 120 kg
Batteries :	4xAAA 1,5V LR03



ISHEAR

Réf.	Prix TTC 20%
ISHEAR	€ 2 999,00

MESURE LES FORCES DE PRESSIONS ET IDENTIFIE LES ZONES CUTANÉES À RISQUES

Développée et testée depuis 2014 en France par Taxisense, iPressure est aujourd'hui un outil abouti et fiable reconnue par de nombreux cliniciens. Dédiaée aux professionnels de santé et revendeurs de matériel médical, iPressure est particulièrement adaptée aux analyses de positionnement et à l'identification des zones cutanées à risque.

iPressure®2 permet de fournir des éléments diagnostics visuels, qui, combinés avec l'analyse et l'expérience du professionnel, peuvent éclairer et permettre d'optimiser le positionnement, afin de réduire les risques de formation d'escarres.

- Permet d'identifier asymétries et obliquités
- Aide à choisir le coussin et le dossier le mieux adapté à la morphologie du patient
- Fonction pédagogique d'amélioration à l'éducation au repositionnement et réduction des pressions du patient.

iPressure2 est livrée avec un logiciel, TexiMonitor, très simple d'utilisation, qui combine un affichage simple de la distribution des pressions avec des outils d'analyses avancés de positionnement. Il est possible de capturer des images ou des séquences vidéo et de les stocker dans une base de données de patients afin d'être comparées d'une session à l'autre. Il est possible de connecter plusieurs iPressure2 afin de faire, en temps réel, des mesures simultanément sur l'assise et le dossier, ou de la **combiner avec l'ISHEAR** afin de visualiser l'interaction entre forces de pressions et forces de cisaillement.



Les Plus :

- Extrêmement flexible, iPressure favorise une excellente immersion dans l'assise et permet ainsi d'évaluer les qualités d'immersion du coussin au plus proche de la réalité.
- Paramétrage ultra stable.
- Excellente reproductibilité des mesures
- SAV, rapide et efficace, traité en France, par un technicien francophone.
- 2 ans de Garantie
- Recouverte par une housse imperméable, amovible et lavable

LES AMÉLIORATIONS iPressure 2

- Renforcement Kevlar des connexions aux capteurs pour améliorer encore la durabilité.
- Powerbank interchangeable séparé qui permet le chargement sans mobiliser la nappe
- Bluetooth 4 low energy permettant d'augmenter l'autonomie jusqu'à 5 jours.
- TexiMonitor V2.0 (à partir des versions Windows 8 et supérieures, livrée sur clé USB).
- TexiSense simplifié pour tablette Android et smartphones, permettant l'autonomie (simplement télécharger l'application)
- Possibilité d'acheter des housses supplémentaires pour le lavage et l'hygiène.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids :	440 g
Dimensions :	600x600 mm
Zone de mesure :	470x470 mm
Autonomie de la batterie :	2 à 5 jours utilisation.
Nb de capteurs :	1024
Compatibilité :	PC : Windows 8 ou+ Core i5 à 2 ghz ou+ 4 Go de RAM min

iPressure 2

Prix TTC 20%

IPRESSURE € 7 799,00

OFFRE SPÉCIALE

ISHEAR + iPressure 2

Prix TTC 20%

PACK DUO € 8 998,00

VICAIR DOSSIERS SOUPLES					
COUSSINS	TARIFS DOSSIERS + COUSSINS	LIBERTY	MULTIFUNCTION	ANATOMIC	FLEX
	Adjuster 02 6	€838,47	€1 099	€1 197	€1 206
	Adjuster 02 10	€838,47	€1 149	€1 247	€1 256
	Vector 02 6	€1 099	€1 199	€1 297	€1 306
	Vector 02 10	€1 149	€1 249	€1 347	€1 356
	Active 02 6	€1 049	€1 149	€1 247	€1 256
	Active 02 9	€1 099	€1 199	€1 297	€1 306
	Adjuster 02 12	€1 149	€1 249	€1 347	€1 356
	Centre 02	€1 099	€1 199	€1 297	€1 306
	Junior 02	€1 099	€1 199	€1 297	€1 306
	Xxtra 02	€1 149	€1 249	€1 347	€1 356

NXT DOSSIERS RIGIDES						
COUSSINS	TARIFS DOSSIERS + COUSSINS	OPTIMA ET CLASSIC (Longueur fixe)	XTEND (Longueur ajustable)	OPTIMA Carbone	ARMADILLO	ARMADILLO Vicair
	Adjuster 02 6	€1 199	€1 299	€1 399	€1 449	€1 699
	Adjuster 02 10	€1 249	€1 349	€1 449	€1 499	€1 749
	Vector 02 6	€1 299	€1 399	€1 499	€1 549	€1 799
	Vector 02 10	€1 349	€1 449	€1 549	€1 599	€1 849
	Active 02 6	€1 249	€1 349	€1 449	€1 499	€1 749
	Active 02 9	€1 299	€1 399	€1 499	€1 549	€1 799
	Adjuster 12	€1 349	€1 449	€1 549	€1 599	€1 849
	Centre	€1 299	€1 399	€1 499	€1 549	€1 799
	Junior	€1 299	€1 399	€1 499	€1 549	€1 799
	Xxtra 02	€1 349	€1 449	€1 549	€1 599	€1 849

GUIDE POUR COMPRENDRE LES TABLEAUX DES TAILLES

TAILLES COUSSINS		
		STANDARD
		SPECIAL + 180€ HT
		SUR DEVIS
		NON DISPONIBLE

Tarifs et photos non contractuels

LE PETIT ACCESSOIRE ESSENTIEL

LE GANT D'ÉVALUATION

L'OUTIL INDISPENSABLE DE VÉRIFICATION POUR LA PRÉVENTION D'ESCARRES

Conçus dans un tissu très glissant, Les gants d'évaluation permettent d'aller facilement vérifier le risque de talonnement de l'utilisateur aux niveaux des zones à risques d'escarres.



VICAIR®

Réf.	Description	Prix TTC 20%
Slide glove	Taille unique	€ 23,31

COUSSINS VICAIR		TTC TVA 5,5%	TTC TVA 20%
OAD6/	Adjuster 02	/	643,09
OAD10/	Adjuster 02	/	689,86
OVR6/	Vector 02 6	/	781,28
OVR10/	Vector 02 10	/	862,67
OCT6/	Active 02 6	/	721,38
OCT9/	Active 02 9	/	793,51
OAD12/	Adjuster 12 02	/	843,95
OCR/	Centre 02	/	762,78
OJVR/	Junior 02	/	642,76
OBA/	XXtra 02	/	847,60
LBA/	Liberty	/	221,59
LPR/	Liberty Profile	/	256,57
FOR/CC	Vicaïr 4	/	487,42
FOR/CC X4	Vicaïr 4 - Lot de 4 coussins	/	1657,25
 dont Éco participation coussin € 0,05 HT			
DOSSIERS SOUPLES VICAIR			
LBS/	Liberty Système	/	604,85
OMFB/CC	Multifunction 02	/	768,58
AABS/AX/	Anatomic	/	909,85
AFB/AX/	Flex	/	931,63
ACCESSOIRES VICAIR			
VCP/18166	Coussinets inserts sur mesure 18X16X6	/	65,00
VCP/10104	Coussinets inserts sur mesure 10X10X4	/	99,00
OCV6 ou 10 ou 12/TP	Housse de coussin O2 CHARLOTTE	34,98	39,78
VCC6 ou 10	Housse de coussin COMFAIR	64,11	72,92
VCI6 ou 10	Housse coussin INCONTINENCE	64,11	72,92
OBACV/TP	Housse de coussin XXTRA O2 CHARLOTTE	34,98	39,78
OBACV/CC ou CI	Housse de coussin XXTRA O2 COMFAIR ou INCONTINENCE	77,14	87,74
VCC12/ou VCI12/	Housse coussin ADJUSTER 12 O2 COMFAIR ou INCONTINENCE	77,14	87,74
OJVRVC/TP	Housse coussin JUNIOR CHARLOTTE	34,98	39,78
OJVRVC/CC ou CI	Housse coussin JUNIOR COMFAIR ou INCONTINENCE	64,11	72,92
OCTCV6/ ou 9	Housse coussin ACTIVE	174,54	198,53
LBCCV/CK	Housse dossier LIBERTY	164,02	186,56
OMFBCV/	Housse dossier MULTIFUNCTION	60,69	69,02
BC/	Connector pour dossier MULTIFUNCTION	87,83	99,90
AABCV/AX	Housse dossier ANATOMIC	101,81	115,81
SB/	Sangles de fixation LIBERTY/ANATOMIC / MULTIFONCTION 02	170,21	193,60
LBACV/	Housse coussin LIBERTY		69,02
LPRCV/	Housse coussin LIBERTY PROFILE		69,02
FCV/CC	Housse coussin VICAIR 4 CHARLOTTE COMFAIR		45,47
FCV/CI	Housse coussin VICAIR 4 CHARLOTTE INCONTINENCE		52,46

chaque housse supplémentaire commandée séparément de son coussin entraîne un surcoût de € 25,00

DOSSIERS RIGIDES DYNAMIC - NXT

divers selon modèle	nxt Optima et Classic	/	827,02
NHA ACB ou PCB/	nxt Xtend (ajustable en Longueur)	/	909,12
NOCFACB	nxt Optima Carbone AC	/	1073,34
NOCFPCB	nxt Optima Carbone PC	/	1109,24
NMAPSB/	nxt Armadillo	/	1155,46
NVMAPSB/	nxt Armadillo Vicair	/	1424,53

PETITS ACCESSOIRES DE DOSSIER NXT

NIB-1004	Système de fixation nxt droite	109,36	124,39
NIB-1178	Système de fixation nxt gauche	109,36	124,39
NIB-1642	Fixation Fixe standard 2 points	100,53	114,35
NIB-1307	Fixation Fixe 4 points	119,82	136,30
divers selon modèle	Cales en mousse x2 – Support pelvien, lombaire ou latéral	33,71	38,35
divers selon modèle	Bavette de dossier	71,08	80,86
Divers selon modèle	Housse néoprène pour cale-tronc	42,17	47,96
Divers selon modèle	Housse et mousse de dossier nxt	156,70	178,25

CALE-TRONCS POUR DOSSIERS CLASSIC, OPTIMA ET XTEND

Ⓐ	NLAFS-NLPHS	Cale-tronc fixe, court, étroit	135,32	153,68
Ⓑ	NLAFS-NLPHL	Cale-tronc fixe, court, large	135,32	153,68

CALE-TRONCS POUR ARMADILLO

Ⓒ	NMAPS-LCS	Cale-tronc fixe, support thoracique, double	152,01	172,91
Ⓓ	NMAPS-LPS	Cale-tronc fixe, support thoracique ou pelvien, simple	152,01	172,91
Ⓔ	NMAPS-DLTSE	Cale-tronc fixe, support thoracique long, simple, large	211,16	240,18
Ⓕ	NMAPS-DLTSS	Cale-tronc escamotable, support thoracique long, simple, large	337,90	384,34
	NIB-1937	Contours latéraux pour ARMADILLO	121,85	138,60

CALE-TRONCS STEALTH - VENDUS EXCLUSIVEMENT AVEC KITS

TWBL-R	Support double articulation droite - *Longueur approx. 16cm	276,00	/
TWBL-L	Support double articulation gauche *Longueur approx. 16cm	276,00	/
LTHW511	Interface pour rotation 360°	113,85	/
LTHW129	Interface de liaison supplémentaire Longueur 6cm	80,50	/
TWBTL-X	Support simple articulation - *Longueur approx. 10cm	264,50	/
TWBSTL-X	Support double articulation - *Longueur approx. 14cm	264,50	/
TWBL-3x5	7,5x12,5cm coussin de maintien thoracique	69,00	/
TWBL-4x6	10x15cm coussin de maintien thoracique	69,00	/
TWBADD-3x6	8x15cm coussin de maintien thoracique	69,00	/
TWBADD-4x10	10x25cm coussin de maintien thoracique	69,00	/
LPHW400	1 x fixation pour tube de dossier 25 mm	80,50	/
LPHW402	1 x fixation pour tube de dossier 22 mm	80,50	/
LPHW401	1 x fixation pour tube de dossier 19 mm	80,50	/
LHW524	1 x entretoise pour montage collier (obligatoire pour type B)	80,50	/
LHW-126	Housse néoprène pour cale-tronc STEALTH	57,50	/

TÊTIÈRES

NIB-0785 + 747 + 823	Têteière nxt multi ajustable – Petite	404,19	459,74
NIB-0784 + 747 + 823	Têteière nxt multi ajustable – Large	404,19	459,74
NIB-0818 + 747 + 823	Têteière nxt multi ajustable – Extra large	404,19	459,74
NIB-1210	Option escamotable	115,18	131,02
NIB-1200	Adaptateur universel	71,98	81,88
SAVANT CC-A	Têteière SAVANT carbone Adulte	699,00	/
SAVANT CC-S	Têteière SAVANT carbone Small	699,00	/
SAVANT CC-P	Têteière SAVANT carbone Pédiatrique	699,00	/
SAVANT CC-SP	Coussinet latéral CARBONE pour SAVANT	99,00	/
Axion-9025	Interface rotative 90 degrés	749,99	/

TIGES DE MONTAGE POUR TÊTIÈRES

NIB-0747	Tige de fixation nxt compatible avec AXION et SAVANT	199,00	/
TWIN DYNC FLIP	Système de fixation TWIN DYNAMIC FLIP Symmetric Designs	799,00	/
TWIN HH	Montage appui tête SAVANT	329,00	/
TWIN FF FLEX	Montage appui tête SAVANT CYPHOSES	540,00	/
INF HH	Système de fixation INFINITY Symmetric Designs	399,00	/
INF LINK	Module supplémentaire pour fixation INFINITY	125,00	/
CHAS/M/L	Barre montage têtère	449,00	/

ÉQUIPEMENT

OAL	Nomad 02- Small - Medium - Large	/	349,95
ABU/CK/	Butterfly	/	306,52

TALONNIÈRES MAXXCARE

MAXXCARE Heel Pro SMALL	Talonnière Protège-talon - Small	/	54,99
MAXXCARE Heel Pro STANDARD	Talonnière Protège-talon - Standard	/	54,99
MAXXCARE Heel Pro XL	Talonnière Protège-talon - XL	/	54,99
MAXXCARE lot de tubes	Tubes de remplacement	/	27,99

MATELAS

ARM415/	Matelas	/	2331,16
ARMCV415/	Housse de matelas (tissu anti frottement)	/	277,26



dont Éco participation matelas € 0,33 HT

MINERVES HEADMASTERS & ACCESSOIRES

HMC01-G	Minerve Headmasters grise - large	169,35	/
HMC02-G	Minerve Headmaster grise - médium	169,35	/
HMC03-G	Minerve Headmaster grise - small	169,35	/
HMC04-G	Minerve Headmaster grise - junior	169,35	/
HMC05-U	Minerve Headmaster bleue - enfant	169,35	/
HMC06-U	Minerve Headmaster bleue - bébé	169,35	/
HMCPL-G	Coussinets d'extension gris – Large et Medium	54,99	/
HMCPS-G	Coussinets d'extension gris – Small et Junior	54,99	/
HMCPC-U	Coussinets d'extension bleu- Enfant et Bébé	54,99	/
HMNPL-G	Coussinet de cou gris- Large et Medium	54,99	/
HMNPS-G	Coussinet de cou gris- Small et Junior	54,99	/
HMNPC-U	Coussinet de cou bleu- Enfant et Bébé	54,99	/
AST 01-G	Support antérieur gris- Large et Medium	49,99	/
AST 02-G	Support antérieur cou gris- Small et Junior	49,99	/
AST 03-U	Support antérieur bleu- Enfant et Bébé	49,99	/
HMCCS2-G	Coussinet de menton gris – Large et Medium	49,99	/
HMCCS3-G	Coussinet de menton gris – Small et Junior	49,99	/
HMCCS4-U	Coussinet de menton bleu – Enfant et Bébé	49,99	/
HMCNS01-G	Bandeau de nuque gris – Large et Medium	49,99	/
HMCNS03-G	Bandeau de nuque gris – Small et Junior	49,99	/
HMCNS06-U	Bandeau de nuque bleu – enfant et Bébé	49,99	/

OUTILS D'ÉVALUATION

ISHEAR®	Instrument de mesure de cisaillement	/	2999,00
iPressure®2	Nappe de mesure de pression	/	7799,00
PACK DUO	ISHEAR® + iPressure®2	/	8998,00
Slide gloves	Gant d'évaluation	/	23,31

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises par la Société INSPIRAL (ci-après « le vendeur ») à tout acheteur (ci-après « le client ») pour lui permettre de passer commande des produits commercialisés par INSPIRAL. Elles s'appliqueront à toutes les ventes de produits effectuées par la société INSPIRAL. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente. Tout autre document tel que prospectus, catalogues, notices, émis par un client n'a qu'une valeur informative et indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions.

ARTICLE 2 : COMMANDES

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat. Le contrat de vente n'est formé qu'après acceptation de la commande par émission d'un bon de confirmation de commande. En cas de désaccord quelconque avec toute mention figurant sur celui-ci, il appartient au client de nous le notifier par écrit dans les 48 heures de la date de réception du bon de confirmation de commande, sous peine de forclusion. Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans notre accord préalable.

ARTICLE 3 : PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos prix sont fixés en euros. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment nos tarifs. Dans ce cas, le tarif applicable à la vente sera celui en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent hors taxe (HT) et emballage standard compris. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus, et tarifs, ainsi que les informations relatives aux conditions de remises commerciales, de la Société sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. La Société est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Les frais de port sont facturés à l'acheteur et inclus dans le prix. Les prix sont établis Franco de port à partir de 120€ HT de commande pour Vicair, Dynamic, Symmetric Designs, Maxxcare et Bodypoint. En dessous de ce franco des frais de transport de 40€ HT sont facturés. Toute commande de housse supplémentaire, non incluse dans la commande d'origine de son coussin, entraînera un surcoût de 25€ HT par housse. Nos factures sont payables par virement ou chèque bancaire à TRENTE (30) jours net ou à réception de la facture avec dans ce cas un escompte de 2%. En cas de retard de paiement, les commandes et les livraisons en cours pourront être suspendues sans préjudice de toute action judiciaire. Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. En outre, le client devra rembourser les frais supportés par INSPIRAL, occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, avec un minimum forfaitaire de 40 euros, conformément à l'article L.441-10 du code du commerce. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire sera demandée, sur justification. A défaut de paiement d'une facture dans un délai de quinze jours après l'envoi d'une première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la vente pourra être résiliée de plein droit et nous pourrions exiger la restitution de nos produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

ARTICLE 4 : LIVRAISON – TRANSFERT DE RISQUES

Les marchandises voyagent aux risques du client. Le transfert des risques sur les produits par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur. En conséquence, Il appartient au client, en cas d'avaries, de pertes des marchandises, ou de manquants, de faire toute réserve sur les bordereaux de réception des colis ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs dans les contions de l'article L133-3 du code de commerce. En l'absence de respect de ce formalisme, le produit sera considéré comme accepté par le client. La responsabilité de notre société ne peut ainsi en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. Les dates de livraison sont indicatives celles-ci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes et leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande ni indemnité, ni annulation des commandes en cours, ni donner lieu à des dommages et intérêts. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations à notre égard, et ce quelle que soit la cause.

ARTICLE 5 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, l'ensemble des délais est rallongé de la durée du cas de force majeure. Sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient prévoir au jour de la conclusion du contrat, qui rendent impossible l'exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou des transports habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les barrières de dégel, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, etc.

ARTICLE 6 : GARANTIE

INSPIRAL applique la garantie de deux ans (Art.1641 du code civil) après la date d'achat sur les vices de fabrication et de matériel, sous condition d'un usage normal du produit. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices constatés. Tous dommages à la suite d'un usage anormal ou d'une mauvaise manipulation, d'un nettoyage inadéquat ou d'une négligence, sont exclus de cette garantie. Au cas ou un vice de matériel ou de fabrication apparaîtrait dans les deux ans à compter de la date d'achat, INSPIRAL, choisira de réparer ou remplacer le produit sans frais. La housse extérieure est exclue de cette garantie. Les recours pour rupture de garanties explicites ci-inclues se limitent à la réparation ou au remplacement du produit. Les dommages et intérêts pour rupture de toute garantie n'incluront en aucun cas les dommages indirects ni n'excéderont le prix de vente des produits non-conformes. Les frais de port au titre de la présente garantie, aller et retour, seront à la charge d'INSPIRAL sous réserve de son autorisation préalable. En aucun cas une action ou intervention au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de cette garantie.

ARTICLE 7 : UTILISATION CONFORME

Le client s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions techniques relatives à nos produits contenues dans nos manuels d'utilisation et d'entretien ainsi que dans toute autre documentation technique, en particulier les spécificités de nos produits imposées par la norme E.N. 60601-1 et par les critères d'homologation et le respect de la nomenclature LPR (Liste des Produits Remboursables). L'acheteur s'engage par ailleurs à informer ses propres clients des caractéristiques essentielles des produits, ainsi que de leurs conditions d'utilisation et d'entretien et, notamment, de se conformer aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation. A défaut, le client sera seul responsable des conséquences de la non-observation de ces prescriptions.

ARTICLE 8 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété de nos produits est expressément subordonné au paiement intégral du prix. Cette clause ne fait pas obstacle au transfert au client des risques de perte ou de détérioration ainsi que des dommages qu'ils pourraient causer dès la remise des produits au transporteur.

ARTICLE 9 : TRAITEMENT, PARTAGE ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'élection de domicile est faite par notre société INSPIRAL, à son siège L'achat par le Client peut entraîner le traitement de ses données à caractère personnel. Si le Client refuse le traitement de ses données, il lui est demandé de s'abstenir de recourir aux services de la Société. Le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, de modification et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à l'adresse suivante : Inspiral, 46 rue Victor Hugo, 37400 Amboise. Ces données personnelles sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement de ses factures le cas échéant, ainsi qu'à l'amélioration des services proposés sur la Société.

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE

L'élection de domicile est faite par notre société INSPIRAL, à son siège social : 1A route de Vaurimbert à POCÉ-SUR-CISSE (37530). Sont seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relatives à la formation ou à l'exécution des commandes, les tribunaux du lieu où se situe le siège social de la société INSPIRAL à moins que la société INSPIRAL préfère saisir une autre juridiction compétente. Cette clause s'applique pour toutes les procédures, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi applicable est la loi française.



Inspirale est enregistrée au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR025949_1007B9. Ce numéro garantit que Inspiral en adhérant à Éco- mobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541- 10-6 du Code de l'Environnement.

REPRISE AGEC DES PRODUITS USAGÉS :

- Reprise sur rendez-vous (hors livraison)
- Le produit usagé à reprendre doit être mis à disposition du prestataire mandaté par INSPIRAL le jour de rendez-vous et sur le lieu convenu avec le client.
- Le produit usagé à reprendre doit être mis à disposition du prestataire mandaté par INSPIRAL démonté au préalable par le client. Les éléments composant le produit usagé à reprendre seront rassemblés au même endroit, de manière accessible, au lieu de livraison du produit neuf, sans danger pour la sécurité ou la santé du livreur.
- Si les conditions de reprise indiquées au client ne sont pas respectées. Le livreur pourra refuser de prendre en charge le produit usagé.
- Le livreur pourra refuser la prise en charge de tout produit usagé présentant un risque pour sa sécurité et/ou sa santé au sens de l'article R 541-164 du Code de l'environnement.
- Reprise pour les produits usagés transportables par le client sans équipement
- Les produits usagés transportables sans équipements ne seront pas repris par le prestataire de livraison. Si le client souhaite se débarrasser d'un produit usagé, il est invité à consulter le site internet d'Eco-mobilier pour donner ce produit usagé, s'il est en état d'usage, ou le jeter : <https://www.eco-mobilier.fr/vos-points-de-collecte-dedies/>

Les présentes conditions sont expressément acceptées et agréées par le client qui déclare et reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la SARL Inspiral. Les CGV d'Inspiral sont mises à jour régulièrement et consultables et téléchargeables à tout moment en ligne sur notre site internet www.inspiral.fr

NOTES PERSONNELLES


Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.

NOTES PERSONNELLES

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

FORMATIONS, RENDEZ-VOUS, QUESTIONS TECHNIQUES ET CLINIQUES...
veuillez contacter votre représentant régional ci-dessous :

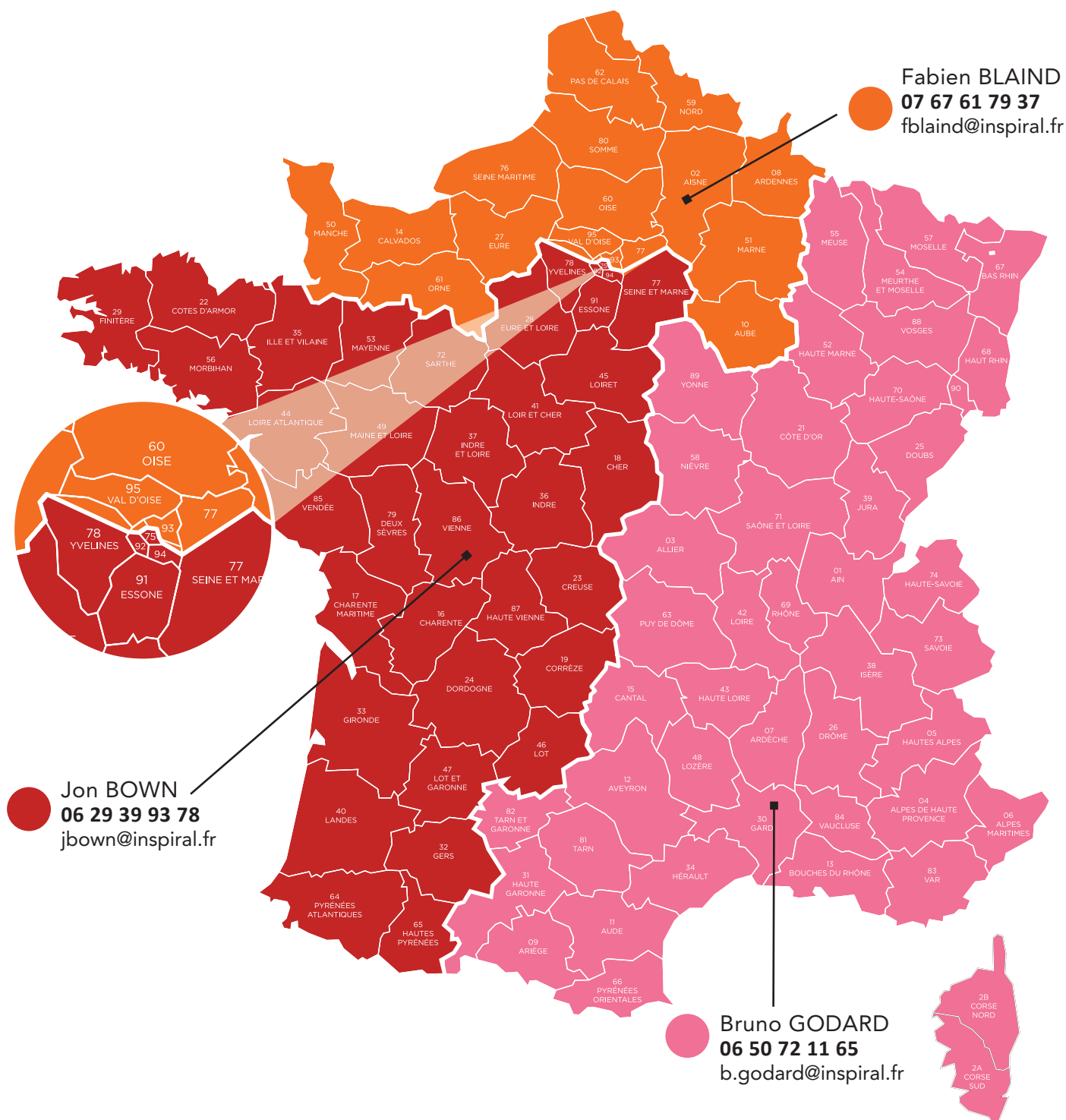

SIÈGE À AMBOISE:

POUR TOUTES DEMANDES DE :

Devis, Commande, Demande de Prêt, Logistique,
Qualité, Ouverture de Compte...

CONTACTEZ VOS COLLABORATEURS :

Jon Bown, Christelle Logie, Svitlana Pavlovskaya, Audrey Hallynck

✉ info@inspiral.fr

☎ 02 47 79 75 52

🌐 www.inspiral.fr



CONTACTEZ-NOUS

www.inspiral.fr

Tél.: 02 47 79 75 52 - Fax: 02 46 65 09 07

info@inspiral.fr



46 rue Victor Hugo - 37400 AMBOISE
www.inspiral.fr

Inspiral SARL – Siège social : 1A route de Vaurimbert – 37530 POCÉ SUR CISSE – APE 4618Z
Siret n°794 203 844 00012, RCS Tours – Capital social 10 000 euros – TVA intracommunautaire n° FR59794203844