



Bodypoint®

STRENGTHEN YOUR POSITION

Solutions
confort
de support
postural

MARS
2023



SANGLES & CEINTURES



HARNAIS & SUPPORTS

JOYSTICK TELECOMMANDE

inspiral

SÉCURITÉ - FONCTIONNALITÉ - CONFORT



QUI SOMMES-NOUS ?

FONDÉE EN 2013, INSPIRAL SE SPÉCIALISE DANS L'ASSISE ET LE POSITIONNEMENT DES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS EN LEUR FOURNISSANT DES PRODUITS ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE FONCTIONNALITÉ, DE CONFORT ET DE PROTECTION DE LA PEAU.



NOTRE MISSION EST DE :

Élargir le choix des clients en fournissant et en formant des cliniciens et des prestataires de services français avec des produits de coussins/sièges modulaires innovants et uniques pour améliorer la vie de nos utilisateurs de fauteuils roulants.

NOTRE DEVISE :

- **SÉCURITÉ** Protéger le patient des problèmes cutanés liés à l'immobilisme en position assise ou couchée
- **FONCTIONNALITÉ** Améliorer ou maintenir l'indépendance de nos consommateurs
- **CONFORT** Maximiser le confort de nos clients

NOS SERVICES :

- **Devis, commandes et support technique** par mail ou par téléphone :
@ : info@inspiral.fr ☎ : 02.47.79.75.52
- **Prêt gratuit** des gammes de positionnement **VICAIR** et **NXT** pour les évaluations cliniques et validations médicales sur info@inspiral.fr.
- **Formation Produits et / ou Positionnement INSPIRAL**, en Visio ou sur site.
Prendre contact auprès de votre responsable régional ou réserver sur www.inspiral.fr.
- **Proposition d'une gamme de positionnement complète** avec des aides-techniques pouvant « habiller » le patient des pieds à la tête.
- Nos partenaires de **marques mondiales** :



NOTRE MISSION :

CRÉER DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CAPABLES D'AMÉLIORER LA VIE DES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS.

NOS ACTIONS, NOS VALEURS

Bodypoint conçoit et fabrique des dispositifs de support postural de la plus haute qualité, conformes aux normes internationales en vigueur. Notre site de production est à Seattle, Washington, aux États-Unis. Nous savons qu'un bon positionnement est un facteur qui contribue grandement à la qualité de vie. Tous nos dispositifs, aussi simples soient-ils, ont une incidence sur la mobilité et l'autonomie des utilisateurs. Depuis plus de 30 ans, nous nous efforçons d'offrir aux utilisateurs de fauteuils roulants une meilleure expérience.



*Prescrits dans plus
de 50 pays à travers
le monde.*

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Assurant un confort tout au long de la journée, les formes anatomiques de nos produits favorisent l'activité de l'utilisateur et encouragent l'utilisation régulière du matériel. Nos produits intègrent des matières et matériaux qui ne se détendent pas. Nous utilisons des sangles qui empêchent le glissement de l'utilisateur et dont les coutures sont ultra résistantes. Nos supports posturaux souples se lavent en machine aussi souvent que nécessaire, sans s'effilocheur ni s'étioler. Nos éléments de fixation robustes et compacts permettent une grande variété de configurations de montage adaptées aux utilisateurs et aux fauteuils.


QUALITÉ INÉGALÉE

En matière de sécurité et de performance, nous sommes les seuls fabricants de supports posturaux à tester tous les modèles que nous commercialisons afin de vérifier la conformité aux normes en vigueur (comme ISO, CEN et ANSI/RESNA) en matière de résistance, d'inflammabilité et de cytotoxicité.

UN GAGE DE QUALITÉ

Le système de qualité qui régit nos processus de fabrication et de commercialisation est certifié ISO 9001:2015. Nous collaborons avec d'autres acteurs industriels du monde entier pour réviser les normes actuelles et en établir de nouvelles afin de garantir aux utilisateurs de fauteuils roulants la qualité des produits qu'ils utilisent et portent.

Plus d'informations sur bodypoint.com/standards.

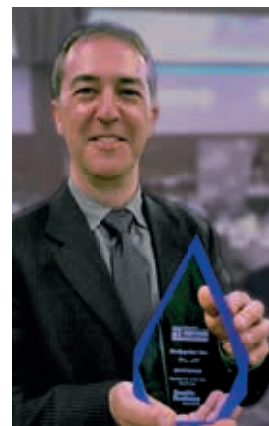



POSITIONNEMENT PELVIER

Sangles à 2 et 4 points	07
Evoflex	08
Choisir une ceinture pelvienne	10
Comment commander	11
Boucles et options	12
Accessoires	13
Codes et prix publics	14-15



SUPPORT POUR HAUT DU CORPS

À quatre points	16
Harnais MD Series	16
Différents modèles	17
Guides-lanières	18
À deux points	19



SUPPORT POUR MEMBRES INFÉRIEURS

Ankle Huggers	21
Appui-mollets	22
.....	
Sacoche Mobility Bag	24
Bande élastique universelle	25



SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT POUR SALLE D'EAU

Sangles de toilette Aeromesh
Appui-mollet pour chaise de douche

27
27



COMMANDES POUR FAUTEUILS ÉLECTRIQUES

Manettes de joystick Flex Shaft
La tige de rotation Tri-Lock
Type de bras Midline
Kits de montage de joystick

29
31
31
32



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Prise de mesure pour la ceinture
Extrémités
Éléments de montage.
Options - Harnais
Matériel complémentaire

34
36
37
39
40



CEINTURES PELVIENNES DE BODYPOINT

Pour les ceintures pelviennes, la largeur totale se mesure au niveau des hanches de l'utilisateur. Cette mesure correspond à la longueur du matelassage anti-pression de la ceinture. Nous l'appelons longueur de coussinet ou de matelassage. Le numéro de référence des ceintures pelviennes de Bodypoint correspond à la longueur de matelassage en centimètres. Si l'utilisateur est à la limite entre deux tailles ou à la limite supérieure, il est conseillé d'opter pour une longueur de matelassage supérieure. Dans l'exemple de référence fourni ci-dessous, la longueur totale de matelassage de la ceinture est de 46 centimètres.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DES CEINTURES PELVIENNES BODYPOINT

La longueur du matelassage exprimée en centimètres est indiquée dans le numéro de référence.

Les tailles Small, Medium et Large se rapportent à la largeur de la lanière.

S - 25 mm **M** - 38 mm **L** - 50 mm



DÉCOMPOSITION DU NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

H B 2 0 5 - M 4 6 - B 1

Type de ceinture

HB Pelvienne

EB Evoflex

LB Compatible
Sub-ASIS

Points de fixation

2 2-points

4 4-points

Type de boucle

0 Push button

1 Side release

2 Rehab Latch™

3 Mini push button

7 Swivel Buckle

Système de tension

5 Center Pull

6 Dual Pull

9 Rear Pull

Largeur de lanière

S 25 mm

M 38 mm

L 50 mm

Longueur de matelassage

32 cm 46 cm

36 cm 62 cm

38 cm 82 cm

40 cm 92 cm

Raccords d'extrémité

- **B1** Flat Mount®

- **B2** Cinch Mount®

Voilà comment les tailles sont référencées

Ex. **HB205-M46-B1**

Small : largeur de 25 mm



Medium : largeur de 38 mm



Large : largeur de 50 mm



POSITIONNEMENT À 2 ET 4 POINTS, EVOFLEX ET ADVANCED



Ceinture pelvienne matelassée à deux points

Cette ceinture à deux points de fixation simple et facile à utiliser a été pensée pour combiner confort de l'utilisateur et efficacité du support pelvien tout au long de la journée, dans différentes configurations de montage.



Ceinture pelvienne matelassée à quatre points

Notre ceinture pelvienne matelassée à quatre points possède les mêmes caractéristiques que notre modèle à deux points, à la différence qu'elle se fixe en quatre endroits sur le fauteuil pour garantir un maintien optimal du bassin en position stable et alignée, fermement maintenu contre le siège et les supports dorsaux.



Ceintures compatibles Sub-ASIS

Ceintures dont les propriétés sont similaires à celles de nos ceintures pelviennes matelassées, dotées cependant d'une doublure spéciale prévue pour y loger des coussinets Sub-ASIS ajustables (vendus séparément). Les coussinets amovibles assurent une pression localisée pour un contrôle accru de l'obliquité et de la rotation. Disponible avec les modèles à deux et à quatre points.



Coussinets Sub-ASIS

Ces coussinets sculptés 3D remplis de gel se placent à l'intérieur de la doublure de la ceinture compatible Sub-ASIS ou Evoflex® et se fixent au moyen de bandes autoagrippantes. Faciles à repositionner pour assurer un maintien optimal. En vente par lot de deux.

LA SINGULARITÉ DE NOS CEINTURES

Nous avons progressivement délaissé nos sangles de maintien au profit de coussinets profilés composés d'une mousse de qualité supérieure qui présente l'avantage de ne pas s'aplatir avec le temps. Les bordures arrondies en CORDURA® assurent une distribution uniforme de la pression. Les techniques et matériaux de coutures ont été sélectionnés pour leurs formidable résistance à la salissure et ces ceintures peuvent être lavées et séchées en machine, comme tous nos articles souples.





Josh Dueck est un skieur professionnel multiple médaillé aux Paralympiques. Il utilise les ceintures Bodypoint. Tous les deux font un travail exceptionnel. Son fauteuil-ski est équipé d'une ceinture pelvienne Evoflex adaptée et renforcée, tandis qu'il utilise au quotidien une ceinture à deux points Evoflex.

CEINTURE PELVIENNE EVOFLEX®

Evoflex est la première ceinture pelvienne à deux points dotée de lanières rigides qui lui évitent de tomber au sol. La ceinture ne risque ainsi pas de se prendre dans les roues, les protège-vêtements ou les accoudoirs, une particularité très appréciée des utilisateurs du monde entier.

Doublee d'une excellente stabilité, la ceinture Evoflex facilite grandement l'accès à la ceinture de positionnement. Elle s'ouvre et se ferme en toute simplicité, et se rabat latéralement quand elle n'est pas utilisée.

La ceinture Evoflex est compatible avec plusieurs boucles et utilise un système de tension par traction centrale. La méthode de fixation varie selon le fauteuil roulant.

Le matelassage en mousse à alvéoles fermées est ergonomique et s'adapte aux contours du corps. Les rebords des sangles semi-rigides sont lisses pour un confort accru et un meilleur maintien.

Pour déterminer la bonne taille : mesurez la longueur totale au-dessus des hanches, à l'endroit que viendra recouvrir la surface matelassée. Sélectionnez le plus de longueur de matelassage possible. Cela garantit une bonne répartition de la pression sur une surface de contact plus large, ce qui, outre les bienfaits médicaux, assure également un plus grand confort à l'utilisateur.

Belt Extender Evoflex

À base de matériau composite épais et durable, l'extension de ceinture Evoflex permet d'allonger la ceinture Evoflex jusqu'à 12,5 cm de chaque côté. Cette solution est idéale pour les fauteuils dont le coussin est plus épais, l'assise plus profonde ou les points de fixation éloignés.

Les goupilles de sécurité ajoute un autre point de connexion avec la ceinture, évitant ainsi à la ceinture de pivoter de manière accidentelle. Vous pouvez également utiliser l'envers de l'extension de ceinture Evoflex sans goupille de sécurité pour permettre à la ceinture de contourner les obstacles.



L'extension de ceinture est compatible avec toutes les tailles. Elle peut être coupée à la longueur désirée à l'aide d'une scie ou être pliée après avoir été chauffée. Fixations fournies.



La ceinture à deux points Evoflex peut se régler à l'angle d'inclinaison désiré. Les côtés renforcés évitent à la ceinture de s'entortiller et facilitent l'ouverture.

Grâce à ses côtés semi-rigides brevetés, la ceinture ne se coince pas dans les roues, les protège-vêtements ou les accoudoirs du fauteuil.

Étroite et profilée, la lanière renforce la stabilité tout en permettant un ajustement plus apprêté.

CHOISIR UNE CEINTURE PELVIENNE EN 6 ÉTAPES

1 SÉLECTIONNER LE STYLE

Non matelassée



Matelassée



Avec doublure pour coussinets Sub-ASIS



2 À DEUX OU QUATRE POINTS DE FIXATION



Ceinture pelvienne à deux points

Les fauteuils roulants sont généralement équipés d'une ceinture pelvienne à deux points.



Ceintures pelviennes à quatre points

Les ceintures pelviennes à quatre points sont particulièrement préconisées pour les utilisateurs relativement agités ou qui présentent une forte tonicité.

3 SÉLECTIONNER LE TYPE DE BOUCLE



Push Button

Angles lisses et arrondis pour éviter les accrocs. Cache amovible pour un nettoyage approfondi ou pour l'installation d'un cache de sécurité. (page 12)



Petit Push-Button

Option sécurisée à usage pédiatrique ou lorsqu'une boucle moins encombrante est souhaitée. Cache de sécurité en option (page 12).



Side-Release

Boucle légère et résistante à l'écrasement qui évite toute ouverture accidentelle mais exige une bonne dextérité manuelle.



Rehab Latch

Assure une ouverture facile pour les personnes ayant une dextérité manuelle limitée.



Swivel Buckle

Conception lisse et aplatie qui favorise le mouvement dynamique et équilibre la tension. Son ouverture nécessite une force modérée.

4 SÉLECTIONNER LE SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA TENSION



Ceinture pelvienne Center-Pull

Convient à de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui présentent une inclinaison pelvienne postérieure. Se décline dans le plus grand choix de tailles et de systèmes de boucles.



Ceinture pelvienne Dual-Pull

Excellente amplitude de réglage pour s'adapter aux différents vêtements et variations pondérales. Compatible uniquement avec la boucle Side-Release.



Ceinture pelvienne Rear-Pull

Particulièrement adaptée pour les personnes ayant un fort tonus musculaire et présentant une rotation du bassin. Positionner un côté du bassin avant l'autre.

5 EXTRÉMITÉS



-B1

Flat-Mount™

Polyvalente et ultra fine



-B2

Cinch-Mount™

Permet un ajustement rapide, simple et précis de la longueur de la sangle en fonction des vêtements portés et des variations pondérales

6 FIXATIONS POUR FAUTEUILS ROULANTS page 37



FrameSaver™



Kit T-Slot™

ATTENTION

Les ceintures Bodypoint sont testées au ISO 9001:2005 Y COMPRIS la grande gamme fixations illustrée sur page 37. Assurez-vous d'inclure ces fixations dans votre ordonnance

COMMANDER UNE CEINTURE PELVIENNE

	+		+		+		+		+		=	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE COMPLET
1. TYPE DE CEINTURE		2. SÉLECTIONNER LA FIXATION		3. TYPE DE BOUCLE		4. SYSTÈME DE TENSION		5. EXTRÉMITÉS		6. FIXATIONS		+ FIXATIONS
Non matelassée, matelassée, système autoagrippant, Evoflex		À deux ou quatre points		Voir page 10		Voir ci-dessus		Voir ci-dessus		Voir page 37		

OPTIONS POUR CEINTURE PELVIENNE **NON MATELASSÉE**



Ceinture pelvienne non matelassée

Une ceinture basique composée d'une sangle suffisamment robuste et flexible pour permettre un ajustement aisé. Disponible avec le système de tension Center-pull uniquement. Pour un confort accru tout au long de la journée ou un meilleur support postural, optez plutôt pour une ceinture pelvienne matelassée.



Ceinture Quad

Une ceinture non matelassée conçue spécialement pour les utilisateurs ayant une dextérité manuelle très limitée. Un contrefort et un anneau de préhension facilitent la saisie et la manipulation de la ceinture.

La ceinture possède également une boucle Bodypoint Rehab Latch™ qui nécessite peu de force pour être ouverte. Système de tension Center-pull.

Disponible en taille Large uniquement.

CACHES BOUCLES

CACHES DE RECHANGE POUR BOUCLES PUSH-BUTTON DES CEINTURES PELVIENNES BODYPOINT®

Cache de rechange pour boucle Push-Button standard

Remplace le cache standard de la boucle Bodypoint® Push-Button. Orifice du bouton d'ouverture : Ø22 mm.



FS018E-1 Pour sangles de 4 cm

FS019E-1 Pour sangles de 5 cm

Cache à accès limité

L'ouverture de la boucle se fait par insertion de l'extrémité du doigt. Orifice du bouton d'ouverture : Ø14 mm.



FS018D-1 Pour sangles de 4 cm

FS019D-1 Pour sangles de 5 cm

Cache de sécurité

Empêche l'ouverture indésirable de la boucle. De par le petit diamètre (6 mm) de l'orifice du bouton d'ouverture, la boucle ne permet pas l'insertion d'un doigt mais s'ouvre facilement à l'aide de la pointe d'un stylo.



FS018C-1 Pour sangles de 4 cm

FS019C-1 Pour sangles de 5 cm

Cache de sécurité Extra Small

Se clipse en toute sécurité sur notre boucle Push-Button, format Small, empêchant l'accès même des doigts les plus fins. Ouverture instantanée de la boucle à l'aide de la pointe d'un stylo. Taille unique. Orifice du bouton d'ouverture : Ø6 mm.



FS029C-1 Pour sangles de 2,5 cm

ANSES D'OUVERTURE EN OPTION

Peut s'ajouter aux boucles Rehab Latch pour en faciliter l'ouverture.

FS200



LOT DE 10

Vendues par 10	HT	TTC
FS200 x 10	15,00 €	15,83 €



AUTRES OPTIONS DE SUPPORT PELVIEN ET ACCESSOIRES

HARNAIS POUR JAMBES

Une solution simple pour les utilisateurs qui risquent de glisser ou qui souffrent de spasticité. La sangle matelassée maintient la jambe en toute sécurité au niveau de l'intérieur de la cuisse sans en limiter le mouvement antérieur ni exercer de pression contre la vessie. De conception innovante et conviviale, le harnais s'utilise avec ou sans ceinture pelvienne. Une bonne alternative aux sangles qui se placent sur l'aine. Vendu par deux.



NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

Pour commander, sélectionnez l'extrémité et ajoutez le suffixe **-B1** or **-B2** à la fin du numéro de référence.

LH600S	Small 23 cm x 4 cm
LH600M	Medium 33 cm x 4,5 cm
LH600L	Large 38 cm x 5 cm



	HT	TTC
avec boucle -B1	95,00 €	100,23 €
avec boucle -B2	111,00 €	117,11 €

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES CEINTURES PELVIENNES EVOFLEX® ET CEINTURES 2 POINTS MATELASSÉES

Pour composer le numéro de référence, ajoutez le suffixe de l'extrémité sélectionnée à la fin du numéro de référence obtenu dans le tableau ci-dessous. **Par exemple : HB205-M46-B1.** -B1 étant le suffixe de l'extrémité plate. (Se reporter à la page 37 pour connaître toutes les options d'extrémité) - Valable pour toutes les ceintures, à l'exception du modèle Evoflex®.

		SIDE RELEASE		SWIVEL BUCKLE		REHAB LATCH		PUSH BUTTON	
TYPE DE CEINTURES	TAILLES	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
CEINTURE PELVIENNE EVOFLEX®				€ 125,00	€ 131,88	€ 140,00	€ 147,70	€ 140,00	€ 147,70
	S38			EB275-S38				EB235-S38	
Center Pull	M46			EB275-M46		EB225-M46		EB205-M46	
	L62					EB225-L62		EB205-L62	
CEINTURE PELVIENNE EVOFLEX® + EXTENSION				€ 155,00	€ 163,53	€ 170,00	€ 179,35	€ 170,00	€ 179,35
	S38			EB275-S38-EBE				EB235-S38-EBE	
Center Pull	M46			EB275-M46-EBE		EB225-M46-EBE		EB205-M46-EBE	
	L62					EB225-L62-EBE		EB205-L62-EBE	
CEINTURES À 2 POINTS		€ 77,00	€ 81,24	€ 87,00	€ 91,79	€ 102,00	€ 107,61	€ 102,00	€ 107,61
	S32	HB215-S32		HB275-S32				HB325-S32	
	S38	HB215-S38		HB275-S38				HB325-S38	
	M36	HB215-M36		HB275-M36		HB225-M36		HB205-M36	
Center Pull	M46	HB215-M46		HB275-M46		HB225-M46		HB205-M46	
	L62	HB215-L62				HB225-L62		HB205-L62	
	L82							HB205-L82	
	L92							HB205-L92	
	S32	HB216-S32							
	S38	HB216-S38							
Dual Pull	M36	HB216-M36							
	M46	HB216-M46							
	L62	HB216-L62							
CEINTURES À 2 POINTS		€ 99,00	€ 104,45			€ 124,00	€ 130,82	€ 124,00	€ 130,82
	S38	HB219-S38						HB329-S38	
Rear Pull	M40	HB219-M40				HB229-M40		HB209-M40	
	M46	HB219-M46				HB229-M46		HB209-M46	
CEINTURES À 2 POINTS COMPATIBLES - SUB-ASIS - *						€ 112,00	€ 118,16	€ 112,00	€ 118,16
* (Coussinets Sub-Asis vendus séparément; voir pages 7 et 15)									
	S38							LB325-S38	
Center Pull	M46					LB225-M46		LB205-M46	
	L62					LB225-L62		LB205-L62	
CEINTURES À 2 POINTS COMPATIBLES - SUB-ASIS - *						€ 134,00	€ 141,37	€ 134,00	€ 141,37
Rear Pull	M46					LB229-M46		LB209-M46	

SUPPLÉMENT POUR B2 CINCH MOUNT®	PRIX HT	PRIX TTC
-B2 CEINTURE X 2 POINTS	€ 8,00	€ 8,44

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES CEINTURES 4 POINTS MATELASSÉES

		SIDE RELEASE		SWIVEL BUCKLE		REHAB LATCH		PUSH BUTTON	
TYPE DE CEINTURES	TAILLES	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
CEINTURES À 4 POINTS		€ 100,00	€ 105,50	€ 110,00	€ 116,05	€ 125,00	€ 131,88	€ 125,00	€ 131,88
	S32	HB415-S32						HB435-S32	
	S38	HB415-S38		HB475-S38				HB435-S38	
Center Pull	M36	HB415-M36				HB425-M36		HB405-M36	
	M46	HB415-M46		HB475-M46		HB425-M46		HB405-M46	
	L62	HB415-L62				HB425-L62		HB405-L62	
	S32	HB416-S32							
	S38	HB416-S38							
Dual-Pull	M36	HB416-M36							
	M46	HB416-M46							
	L62	HB416-L62							
CEINTURES À 4 POINTS		€ 122,00	€ 128,71			€ 147,00	€ 155,09	€ 147,00	€ 155,09
	S38	HB419-S38						HB439-S38	
Rear Pull	M40	HB419-M36				HB429-M40		HB409-M40	
	M46	HB419-M46				HB429-M46		HB409-M46	
CEINTURES À 4 POINTS COMPATIBLES - SUB-ASIS- *		€ 110,00	€ 116,05			€ 135,00	€ 142,43	€ 135,00	€ 142,43
* (Coussinets Sub-Asis vendus séparément; voir page 11)									
	S38							LB435-S38	
Center Pull	M46					LB425-M46		LB405-M46	
	L62					LB425-L62		LB405-L62	
Dual Pull	S38	LB416-S38							
CEINTURES À 4 POINTS COMPATIBLES - SUB-ASIS - *						€157,00	€165,64	€157,00	€165,64
Rear Pull	M46					LB429-M46		LB409-M46	

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES CEINTURES 2 POINTS NON MATELASSÉES

CEINTURES À 2 POINTS		€ 50,00	€ 52,75			€ 75,00	€ 79,13	€ 75,00	€ 79,13
	S	NB215S							
Center Pull	M	NB215M				NB225M		NB205M	
	L	NB215L				NB225L		NB205L	
CEINTURES À 2 POINTS AVEC EXTENSIONS								€ 91,38	€ 96,40
Center Pull	L-Extended							NB205L-EXT	
QUAD BELT						€ 120,00	€ 126.60		
Center Pull	Toutes tailles					NB225L-T			

Ajouter le suffixe - **B1** pour les attaches «Flat Mount» standards
 Ajouter le suffixe - **B2** pour les boucles d'extrémité «Cinch Mount»

SUPPLÉMENT POUR B2 CINCH MOUNT®	PRIX HT	PRIX TTC
-B2 CEINTURE X 2 POINTS	€ 8,00	€ 8,44
-B2 CEINTURE X 4 POINTS	€ 16,00	€ 16,88

Les coussinets Sub-Asis sont vendus séparément et sont compatibles avec les ceintures Sub-Asis seulement.
 Voir page 7

SUB ASIS PADS x Paire			
CODE	LONGUEUR	PRIX HT	PRIX TTC
PD401-2	115 mm	€ 90,00	€ 94,95
PD402-2	100 mm	€ 90,00	€ 94,95

SUPPORT POUR HAUT DU CORPS

HARNAIS À 4 POINTS

HARNAIS SÉRIE MD

Nos modèles PivotFit™, Stayflex™ et Trimline sont dotés de sangles de tension MD (multi-directionnel). Les bandes MD adaptables peuvent être réglées en configuration de traction avant ou arrière, en fonction des besoins de l'utilisateur. Plus besoin de faire des concessions.



Version Dynamique

L'élasticité brevetée à deux zones améliore le confort en permettant un mouvement modéré des épaules sans réduire le soutien au niveau de la poitrine. Idéal pour gérer pour les utilisateurs présentant une forte tonicité. Idéal pour gérer pour les utilisateurs présentant une forte tonicité.



Version Standard

Matière non étirable (fixe) qui réduit le mouvement, recouverte de nylon CORDURA pour un entretien et un nettoyage simplifiés. Solution adaptée en cas de cyphose très marquée, de courbure de la colonne vertébrale ou de rotation du tronc.



ATTENTION

En cas d'utilisation d'une ceinture pectorale ou de tout autre support antérieur pour le tronc, il convient d'utiliser également un support pelvien correctement ajusté pour éviter tout risque de glissement de l'utilisateur.

HARNAIS DE POITRINE STAYFLEX™

Octroie un solide contrôle du tronc doublé d'une plus grande liberté de mouvement au niveau des épaules que les modèles PivotFit™ ou Trimline. Grâce à la matière extensible brevetée Dual-stretch, le harnais de remonte pas vers le cou lorsque l'utilisateur se penche en avant, réduisant ainsi le risque de strangulation. Les matières soigneusement sélectionnées assurent un savant équilibre entre étirement et résistance, tandis que la boucle Swivel à libération rapide permet une ouverture facile. Configurez le harnais en mode traction avant ou arrière avec nos bandes de tension MD (multi-directionnel).



Largeur standard

Harnais de poitrine avec un certain degré d'élasticité



Largeur étroite

Idéal pour les femmes et les utilisateurs de petit gabarit



Zip en option

Zip en option disponible à la fois avec le modèle à largeur standard (gauche) et à largeur étroite (droite).



HARNAIS D'ÉPAULES PIVOTFIT™

Le maintien assuré par le harnais PivotFit™ au niveau des épaules favorise la position droite pour une respiration, un contrôle de tête et une stabilité accrues. De conception élégante et galbée qui favorise la répartition de la pression sur 25 % de surface en plus qu'un harnais classique H-Style. Les coussinets galbés assurent un maximum de support et de confort. Facile à ajuster, la lanière de fermeture sur sternum est positionnée bas pour éviter le risque de strangulation.



Deux modèles disponibles : Standard (tissu non extensible) et Dynamique (modérément extensible).

HARNAIS D'ÉPAULES TRIMLINE

Se compose de deux lanières matelassées et réglables pour une rétraction scapulaire plus ciblée. S'adapte confortablement

aux asymétries et libère la zone thoracique pour une liberté de mouvement optimale.



EXTRÉMITÉS STANDARD HARNAIS 4 POINTS

Flat-Mount™ plastique Cinch-Mount™ plastique



- B5



- B6

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES HARNAIS MD SERIES

Ajoutez le suffixe de l'extrémité sélectionnée **-B5** Flat Mount® plastique ou **-B6** Cinch Mount® plastique à la fin du numéro de référence.

Taille	PivotFit™ Dynamique		PivotFit™ Standard		Stayflex™ étroit				Stayflex™ standard				Trimline	
					Avec zip		Sans zip		Avec zip		Sans zip			
XXS	SH295XXS		SH290XXS		-		-		-		-		-	
XS	SH295XS		SH290XS		-		-		-		-		-	
S	SH295S		SH290S		-		-		SH350S		SH351S		SH235S	
M	SH295M		SH290M		SH360M		SH361M		SH350M		SH351M		SH235M	
L	SH295L		SH290L		SH360L		SH361L		SH350L		SH351L		SH235L	
XL	SH295XL		SH290XL		SH360XL		SH361XL		SH350XL		SH351XL		-	
	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
B5	€188,00	€ 198,34	€ 180,00	€ 189,90	€ 208,00	€ 219,44	€ 200,00	€ 211,00	€ 208,00	€ 219,44	€ 200,00	€ 211,00	€ 140,00	€ 147,70
B6	€196,00	€206,78	€ 188,00	€ 198,34	€ 216,00	€ 227,88	€ 208,00	€ 219,44	€ 216,00	€ 227,88	€ 208,00	€ 219,44	€ 148,00	€ 156,14

GUIDE-LANIÈRES POUR HARNAIS D'ÉPAULES

Améliorez le positionnement et le confort des harnais de poitrine et d'épaules et utilisez désormais des harnais avec des dossiers bas et galbés jusque-là incompatibles.

Notre solution simple et facile à installer assure un niveau d'ajustement maximum et une adaptabilité optimale pour chaque utilisateur. De par sa finesse, le guide-lanières se place aux endroits les plus étroits, tandis que son acier à ressort ultra robuste absorbe les impacts, octroyant aux utilisateurs un confort accru.

Produit	Référence	Longueur	PRIX HT	PRIX TTC
Guide-lanière	HW100-200-2	Long 200 mm	€ 49,00	€ 51,70
Guide-lanière	HW100-150-2	Short 150 mm	€ 49,00	€ 51,70
Plaque de montage latérale	HW105L-1	Wide 200 mm	€ 39,00	€ 41,15
Plaque de montage latérale	HW105S-1	Narrow 150 mm	€ 39,00	€ 41,15
Permobil Corpus	HW101P-1	Kit de Fixation	€ 15,00	€ 15,83

Les orifices intégrés facilitent l'installation du harnais et évitent d'avoir à percer des trous supplémentaires dans le dossier.

Les longues fentes de montage s'adaptent à toute une variété de dossiers et augmentent les possibilités d'ajustement.

Réglez la position des lanières supérieures à la hauteur optimale pour bénéficier d'une meilleure répartition de la pression au niveau des épaules.

La plaque de montage est utilisée en l'absence de possibilité de fixation.



CALE-TRONC À 2 POINTS

SUPPORT DE POITRINE MONOFLEX™

Pour les utilisateurs nécessitant un support abdominal ou thoracique ferme et confortable à la fois. Le matelassage élastique haute résistance fournit le bon degré d'élasticité pour le confort, tout en stabilisant les personnes souffrant d'hypertonie spastique marquée. La forme incurvée répartit la pression le long de la partie centrale sans entraver la liberté de mouvement des bras. Placé sur la partie supérieure de l'abdomen, le support améliore le contrôle de la respiration et facilite l'élocution. Peut aussi s'utiliser sur les jambes. Disponible en version à une et deux pièces.

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE MONOFLEX™

Taille	Une pièce Ouverture latérale		Deux pièces Ouverture centrale	
XS	SH120XS		SH122XS	
S	SH120S		SH122S	
M	SH120M		SH122M	
L	SH120L		SH122L	
XL	SH120XL		SH122XL	
	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
Flat Mount métal - B1	€108,00	€113,94	€150,00	€158,25
Cinch Mount métal - B2	€116,00	€122,38	€158,00	€166,69

Ajoutez le suffixe de l'extrémité sélectionnée à la fin du numéro de référence.

LES MODÈLES



Une pièce à ouverture latérale

Coussinet unique pour une plus grande zone de contact, avec lanières de réglage frontales et ouvertures latérales avec boucles Swivel.



Deux pièces à ouverture centrale

Réduit la gêne sous les bras et se cale sous les supports latéraux pour une stabilité accrue. La boucle centrale Swivel répartit uniformément la pression.



CEINTURE PECTORALE - TAILLE UNIQUE

Doté d'une fermeture autoagrippante avec anneau de réglage semi-rigide permettant aux utilisateurs d'ajuster facilement leur ceinture même avec une dextérité manuelle limitée.

	SH102		SH102P	
	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
Flat Mount métal - B1	€95,00	€100,23	€110,00	€106,05
Cinch Mount métal - B2	€103,00	€108,67	€118,00	€124,49

SH102 - Ceinture non matelassée

TAILLE UNIQUE :

Longueur utile : 117 cm

Largeur de la sangle : 5 cm




SH102P - Ceinture non matelassée avec bande matelassée PD306, Voir page 15 pour plus d'informations.

SUPPORT POUR MEMBRES INFÉRIEURS




ANKLE HUGGERS™

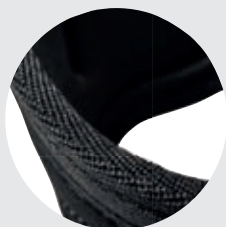

La bordure anti-fronçage en CORDURA protège la peau sur les zones vulnérables



Zone souple au niveau du talon d'Achille pour un confort accru

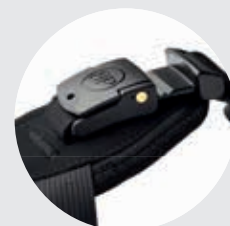

Boucle ErgoLatch™
Boucle arrondie ErgoLatch™ à ouverture et fermeture ultra faciles

Nouveau système autoagrippant collé à la sangle pour une sensation plus souple et une meilleure résistance au fronçage

Patte en caoutchouc facilitant les ajustements

Lanière de fixation de 25 mm sur tous les modèles

LE BON RÉGLAGE, À CHAQUE FOIS

Les sangles de maintien des chevilles Ankle Huggers™ de Bodypoint favorisent le bon positionnement des chevilles et des pieds pour une sécurité optimale.


Elles confèrent une certaine mobilité pour une assise confortable à bord du fauteuil roulant. La cheville est solidement calée tandis que le pied peut bouger naturellement. La pression sur l'articulation est réduite, favorisant une position assise confortable sur la durée.

Les sangles Ankle Huggers sont une solution à fermeture autogrippante facile à régler qui s'adapte aux différents types de chaussures, tandis que la boucle ErgoLatch™ permet d'obtenir à chaque fois le même serrage pré-établi. La section de la cheville intègre des coussinets rembourrés qui épousent la forme du pied et le maintiennent centré.

La zone souple du talon et les bordures en tissu CORDURA anti-fronçage améliorent le confort et réduisent la pression.

PRISE DE MESURE ANKLE HUGGERS®

Ankle Huggers®

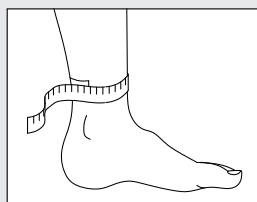

FT240 -	XS	14 – 17 cm
FT240 -	S	16,5 – 20 cm
FT240 -	M	19 – 25,5 cm
FT240 -	L	23 – 28 cm
FT240 -	XL	26,5 – 33 cm

Mesurez la circonférence au-dessus de la cheville.

	PRIX HT	PRIX TTC
Vendu par Paire assymétrique FT240	160,00 €	168,80 €

Fixations de palettes de pieds incluses



APPUI-MOLLETS PADDED AEROMESH®

Notre sangle et notre bandeau pour mollets permettent de maintenir confortablement et en toute sécurité les pieds sur les palettes sans exercer de pression sur les mollets. Ils répartissent la pression uniformément sur les extrémités inférieures et contrôlent les mouvements sans occasionner d'hématomes.

Le tissu perméable Aeromesh® est collé à un contrefort durable anti-fronçage, ce qui promeut la circulation de l'air sans jamais se déformer.



Sangle de mollets 2 points



Bandeau de mollets 4 points


Répartit la pression sur une plus grande zone des mollets par rapport à la sangle. Particulièrement utile pour les utilisateurs en position de bascule d'assise ou d'inclinaison de dossier.

-



DÉTERMINER LA TAILLE DE LA SANGLE ET DU BANDEAU POUR MOLLETS

Mesurez la courbe derrière les jambes depuis l'extérieur du fauteuil roulant. Veillez à ce que la longueur sélectionnée permette à la sangle ou au bandeau de fléchir et d'envelopper les mollets.

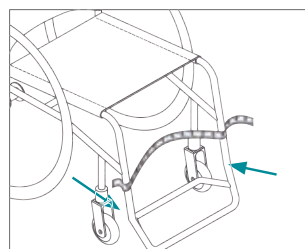

- S** 35 - 40 cm
- M** 40 - 50 cm
- L** 50 - 61 cm

Galbé LARGEUR cm	SANGLE 2 POINTS		BANDEAU 4 POINTS	
35-40	SP102S		SP103S	
40-50	SP102M		SP103M	
50-61	SP102L		SP103L	
	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
	€ 90,00	94,95	€ 115,00	121,33

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE MODE DE VIE





SACOCHE MOBILITY BAG

Le Mobility Bag de Bodypoint vous permet de toujours avoir vos effets personnels à portée de main, discrètement et en toute sécurité. Conçue avec et pour les utilisateurs de fauteuil roulant, cette sacoche est suffisamment grande pour contenir tout le nécessaire mais assez compacte pour se loger derrière les jambes de l'utilisateur ou sur le côté du fauteuil.

De fabrication solide et dotée de caractéristiques très pratiques, notamment deux spacieux compartiments, un intérieur contrasté, des poches filet frontales, un anneau pour les clés, un mousqueton et des anses faciles à attraper, font de cette sacoche un accessoire unique en son genre.

20 cm de largeur, 19 cm de hauteur, 11 cm de profondeur

SP001	Prix unitaire	PRIX HT	PRIX TTC
	SP001	89,00 €	93,90 €



S'attache et se détache sans effort à l'avant ou sur le côté du fauteuil grâce à un clip en plastique amovible qui se fixe au siège. Vous pouvez également déposer le clip et utiliser les lanières autoagrippantes pour attacher la sacoche à l'accoudoir.



« J'adore le fait qu'elle soit discrète et moderne à la fois. Elle ne se voit pas du tout. »

- Amin Lakhani, utilisateur de fauteuil roulant et coach en rencontres amoureuses

Pour en savoir plus sur Amin, rendez-vous sur bodypoint.com/success-stories



BANDE ÉLASTIQUE UNIVERSELLE

Une bande polyvalente qui améliore le support en cas de besoin.

Préhension facile grâce à ces larges orifices pour le pouce ou les doigts pour les utilisateurs présentant une dextérité manuelle limitée. La matière douce offre une élasticité contrôlée qui assure support et confort pendant les activités ponctuelles comme le travail, le jeu, la pratique sportive, les séances de rééducation ou d'essayage. Le système autoagrippant extra fin ne risque pas d'endommager les vêtements, ni d'amasser les saletés.



La boucle du pouce de la bande élastique universelle s'attache à l'extension pour une connexion solide et sécurisée.



BANDE D'EXTENSION ÉLASTIQUE

S'utilise conjointement avec la bande élastique universelle pour profiter d'une longueur et d'une polyvalence accrues. Peut aussi s'utiliser seule. Toutes les extensions mesurent 72,5 cm de long.

DIMENSIONS DU PRODUIT



	SANGLES ÉLASTIQUES UNIVERSELLES		EXTENSION DE SANGLES	
LARGEUR cm	LONGUEUR UTILE 148 cm		LONGUEUR UTILE 72,5 cm	
8cm	SP110S		SP111S	
11cm	SP110L		SP111L	
15cm	SP110XL		SP111XL	
	PRIX HT	PRIX TTC	PRIX HT	PRIX TTC
	€ 104,00	€ 109,72	€ 75,00	€ 79,13

SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT POUR SALLE D'EAU



TISSU AEROMESH® BREVETÉ

Tous les utilisateurs de chaises de douche méritent le confort apaisant du tissu Aeromesh. Sa matière douce et perméable favorise l'écoulement du savon, de l'eau et de la saleté tout en laissant circuler l'air, protégeant la peau et évitant l'accumulation de bactéries. Pour une solution de positionnement complète, utilisez conjointement les sangles de toilette et les appui-mollets pour chaises de douche en Aeromesh.



SANGLES DE TOILETTE AEROMESH®

Les sangles Aeromesh peuvent se porter sur la poitrine ou les hanches afin de stabiliser l'utilisateur dans la baignoire ou en piscine. Les sangles se règlent en longueur, se lavent en machine à une température maximale de 60 °C et peuvent être séchées en sèche-linge.



TAILLES

A Coussinet EN DEUX parties avec œillets

BB101M-1 Medium
10 cm de large
61-94 cm de long*

BB101L-1 Large
10 cm de large
79-109 cm de long*

B Coussinet EN UNE partie avec œillets

BB111L-1 Large
10 cm de large
73,5-129,5 cm de long*

BB111XL-1 Extra Large
12,5 cm de large,
81-137 cm de long*

C Coussinet EN UNE partie, coulisseaux en plastique

BB112L-1 Large
10 cm de large
68,5-160 cm de long*

BB112XL-1 Extra Large
12,5 cm de large
76-173 cm de long*

*Les mesures correspondent à la longueur utile de la ceinture.

Prix unitaire	
PRIX HT	PRIX TTC
126,00 €	132,93 €

APPUI-MOLLET POUR CHAISE DE DOUCHE


Conçu spécialement pour la toilette, l'appui-mollet à clipser permet de stabiliser les jambes afin de réduire le risque et d'améliorer le confort, surtout pour les utilisateurs de chaises de douche inclinables.

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE ET TAILLES



Num. de réf.	Hauteur	Longueur	largeur du siège
BB216-22MM	10 cm	42 cm	40 cm
BB218-22MM	10 cm	47 cm	45 cm
BB220-22MM	10 cm	53 cm	51 cm

TAILLE ET DIMENSIONS

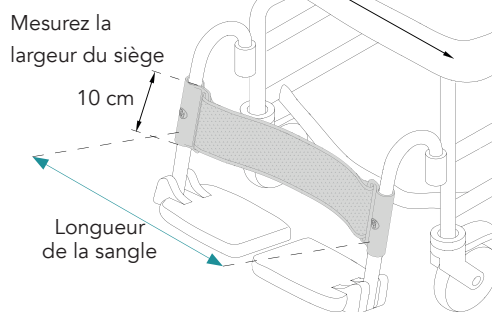

Se fixe aux montants grâce aux clips cousus qui facilitent l'installation et le retrait. Clips compatibles avec les montants de repose-pieds de 22 et de 25 mm de diamètre et avec la plupart des marques de chaises de douche.

Prix unitaire	
PRIX HT	PRIX TTC
90,00 €	94,95 €

COMMANDES POUR FAUTEUILS ÉLECTRIQUES





MANETTES DE JOYSTICK FLEX-SHAFT

Les manettes de joystick de Bodypoint se déclinent en différentes formes, tailles et matières pour répondre aux besoins fonctionnels et modes de vie de chacun.

La tige flexible réduit le risque d'endommagement des commandes électroniques du joystick en cas de mouvement involontaire, atténue les vibrations pendant la conduite pour un meilleur confort de l'utilisateur et protège les composants fragiles contre les impacts.

Chaque manette est disponible en deux tailles de tige pour assurer une compatibilité avec le plus de fauteuils roulants possible. Pour l'installer, il suffit de l'enfoncer fermement sur une tige de joystick propre.

Prix unitaire	
PRIX HT	PRIX TTC
89,00 €	93,90 €



POMMEAU STRIÉ

Le nouveau pommeau strié est le résultat d'années de concertation et de collaboration avec les utilisateurs et les thérapeutes.




« Mon physiothérapeute m'a recommandé d'utiliser une manette de joystick de Bodypoint...Elles comptent parmi les meilleures. Elle me permet de bien positionner ma main. »
- Wing Woo, ancien sergent du bureau du shérif du comté de King

TAILLE

Tige de 4,8 mm : Compatible avec la plupart des commandes Invacare

Tige de 6,4 mm : Compatible avec les commandes de joystick Permobil, Pride, Quantum et Quickie

LA COMMANDE AU BOUT DES DOIGTS

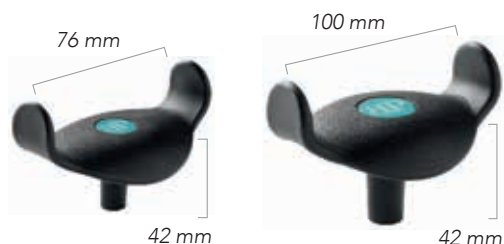

Manette en U ergonomique de 76 mm

PC101A Compatible avec les tiges de : Ø4,8 mm

PC101B Compatible avec les tiges de : Ø6,4 mm

Manette en U ergonomique de 100 mm

PC102A Compatible avec les tiges de : Ø4,8 mm

PC102B Compatible avec les tiges de : Ø6,4 mm

De par sa forme arrondie et bombée, notre manette de joystick en U est hautement ergonomique. Ce design allie un excellent contrôle de conduite et un confort optimal. Se décline en deux largeurs pour les différentes tailles de main des utilisateurs. Les bords peuvent être moulés à la forme désirée dans l'eau chaude pour adapter la manette aux besoins individuels.



Pommeau strié

PC110A Compatible avec les tiges de : Ø4,8 mm

PC110B Compatible avec les tiges de : Ø6,4 mm

Sa surfaces texturée, sa forme bombée et sa hauteur réglable en font un modèle polyvalent, adapté aux besoins très variés des utilisateurs. Se laisse facilement raccourcir au couteau pour ajuster la hauteur.




Dôme en caoutchouc

PC107A Compatible avec les tiges de : Ø4,8 mm

PC107B Compatible avec les tiges de : Ø6,4 mm

La manette de joystick à dôme en caoutchouc a été conçue spécialement pour les utilisateurs ayant très peu de force dans la main. Sa forme basse et élargie épouse parfaitement la paume de la main, maintenant ainsi le poignet en position neutre et facilitant le mouvement des doigts. Sa texture nervurée réduit l'accumulation de sueur et favorise la friction pour éviter tout glissement de la main suite à un mouvement involontaire.

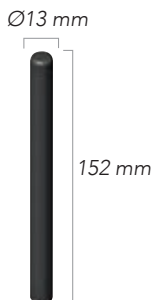

Droite de 152 mm

PC104A Compatible avec les tiges de : Ø4,8 mm

PC104B Compatible avec les tiges de : Ø6,4 mm

Notre manette droite permet une préhension et une activation faciles du joystick avec un minimum de pression. Cette conception est particulièrement utile pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est très limitée. Peut être raccourcie à la hauteur désirée.

CONDUITE SIMPLIFIÉE

SYSTÈME DE MONTAGE TRI-LOCK™ MIDLINE

Pour de nombreux utilisateurs, le positionnement central du joystick devant le corps (à hauteur médiane) est une position plus naturelle et plus fonctionnelle, susceptible d'améliorer la posture, le gainage et l'endurance. Le système Tri-Lock vous permet de positionner les commandes de conduite ou dispositifs de communication à l'emplacement optimal.

Le bras peut se placer par-dessus la tablette, au-dessus ou en dessous de l'accoudoir ou au-dessus de l'épaule pour les systèmes de commande au menton.

Sélectionnez un adaptateur de montage compatible avec la commande de joystick, une patte de montage compatible avec le fauteuil et le bras Midline le mieux adapté à vos besoins. Les composants sont vendus séparément ou en kit complet.

1. TIGE DE ROTATION TRI-LOCK™

La tige compacte et haute résistance Tri-Lock™ permet de manœuvrer le fauteuil avec une précision fluide, évite la rotation accidentelle du bras et réduit le ballottage du joystick à l'extrémité du bras. Elle pivote aisément entre trois positions pour la conduite, les transferts et le rapprochement des tables. La butée dissimulée permet de passer de la position Déverrouillage indépendant à Déverrouillage assisté.



TRILOCK PC024

Prix unitaire	
PRIX HT	PRIX TTC
€ 450,00	€ 474,75

2. TYPES DE BRAS MIDLINE

En acier inoxydable satiné, le bras Midline de Bodypoint est anti-corrosion et résistant aux rayures. Il peut être coupé à la longueur souhaitée à l'aide d'un coupe-tube, même une fois installé. Le bras supporte une charge pouvant aller jusqu'à 13,6 kg pour le poids cumulé du dispositif de communication, téléphone, tablette et joystick. Sélectionnez un bras en L pour plus d'options en termes de hauteur et d'inclinaison, un bras droit pour les configurations moins complexes ou un bras en J qui permet l'utilisation d'une tablette. Tube creux et léger de 12,5 mm de diamètre.



PC031 Bras en J




PC032 Bras en L




PC033 Bras droit

Positions de la tige de rotation Tri-Lock™


Illustrée ici avec un bras Midline droit

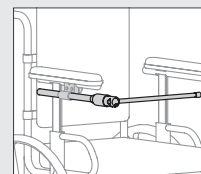


0° Horizontal : Position de conduite

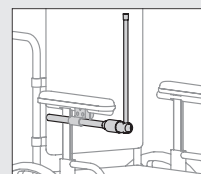

90° : Pour transferts

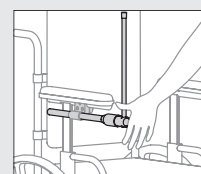

90° : Bouton de déverrouillage à l'extrémité

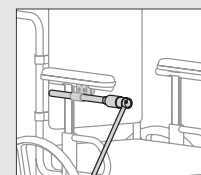

240° : pour se rapprocher des tables

MIDLINE PC031/32/33

Prix unitaire	
PRIX HT	PRIX TTC
100,00 €	105,50 €

« Avec une quadriplégie à C4, le moindre millimètre est crucial. Avec mon Joystick Bodypoint Midline, je peux actionner ma commande au menton, ce qui m'octroie l'indépendance dont j'ai besoin pour travailler. J'utilise Midline depuis plus de dix ans et j'en suis plus que satisfait. Point final. »

Todd Stabelfeldt, Entrepreneur informaticien

Pour en savoir plus sur Todd Stabelfeldt,
rendez-vous sur bodypoint.com/success-stories



3. ADAPTATEUR DE MONTAGE DU JOYSTICK

L'adaptateur permet de fixer presque tous les modèles de joystick sur un bras Bodypoint Midline. Nos adaptateurs sont robustes, faciles à installer et compatibles avec de nombreux modèles de commande.

Pour plus d'information sur la compatibilité avec les commandes, rendez-vous sur bodypoint.com/midline.



PC042
Pour MK6i, MPJ+



PC045
Pour PGDT Pilot+



PC046
Pour MK5, MPJ, Q-Logic



PC047
Pour joystick Compact Permobil

Prix unitaire	PRIX HT	PRIX TTC
ADAPTATEUR	€ 110,00	€ 116,05

4. ÉLÉMENT DE FIXATION À L'ACCOUDOIR

L'élément de fixation modulaire Tri-Lock™ est un composant essentiel pour le montage de la tige de rotation Tri-Lock™ sur le fauteuil roulant. Les deux modèles se règlent en hauteur et peuvent se monter, au choix, sur l'accoudoir droit ou gauche.

Le levier de libération rapide en option permet de régler et de démonter en toute simplicité la tige de rotation Tri-Lock™.



PC010
Fixation sur rail

Compatible avec les accoudoirs Permobil Unitrack et Pride T



PC011
Fixation sur montant

Compatible avec les accoudoirs Invacare à montants ronds de 22 mm de diamètre



FA171
Lever de libération rapide

Pour ajuster et déposer rapidement la tige de rotation Tri-Lock™

Prix unitaire	PRIX HT	PRIX TTC
ÉLÉMENT DE FIXATION	€ 110,00	€ 116,05

KITS DE MONTAGE DE JOYSTICK MIDLINE

Type de bras Midline	Élément de fixation à l'accoudoir	Adaptateur de montage du joystick			
		PC042	PC045	PC046	PC047
En J	Fixation sur rail	PC202-10J	PC205-10J	PC206-10J	PC207-10J
	Fixation sur montant	PC202-11J	PC205-11J	PC206-11J	PC207-11J
En L	Fixation sur rail	PC202-10L	PC205-10L	PC206-10L	PC207-10L
	Fixation sur montant	PC202-11L	PC205-11L	PC206-11L	PC207-11L
droit	Fixation sur rail	PC202-10S	PC205-10S	PC206-10S	PC207-10S
	Fixation sur montant	PC202-11S	PC205-11S	PC206-11S	PC207-11S

Prix unitaire	PRIX HT	PRIX TTC
KIT DE MONTAGE	€ 700,00	€ 738,50

Contenu du kit : 1 tige de rotation Tri-Lock™, bras Midline au choix, élément de fixation et adaptateur de montage.

Voir la description des différents composants ci-dessus.



CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES



PRISE DE MESURE POUR LA CEINTURE

Comment mesurer pour une ceinture pelvienne matelassée


Pour garantir un bon maintien et une performance optimale, veillez à sélectionner une longueur de ceinture matelassée adaptée à l'utilisateur. En présence d'une ceinture Evoflex, envisagez l'ajout d'extensions si les points de fixation sont éloignés (voir ci-contre).

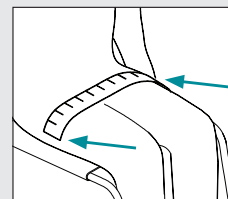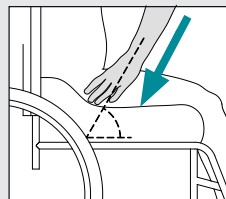

Déterminer la bonne taille de ceinture pour l'utilisateur :

1. En fonction des objectifs cliniques, installez l'utilisateur à la position désirée et identifiez la meilleure position et l'angle optimal de la ceinture.
2. À l'angle sélectionné de la ceinture, mesurez la distance à l'aide d'un mètre souple posé par-dessus le corps de l'utilisateur et déterminez la longueur optimale de la section matelassée de la ceinture.
3. Dans le tableau des tailles correspondant au type de ceinture sélectionné, reportez-vous à la colonne B pour trouver la taille de ceinture appropriée à partir de la longueur matelassée. Si l'utilisateur est entre deux tailles, tenez compte de facteurs tels que la croissance, les variations pondérales et les vêtements selon les saisons. Pour un bon maintien et une performance optimale, la section matelassée ne doit pas dépasser le corps de l'utilisateur.

Ceintures pelviennes matelassées à deux points et à quatre points

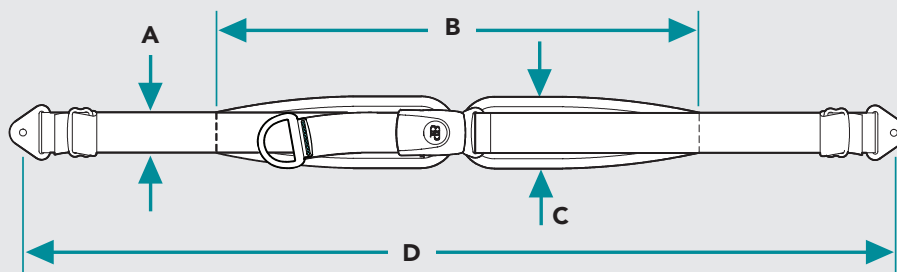

Taille*	A	B	C	D
S32	2,5 cm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	4 cm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M40	4 cm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	142 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	5 cm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	5 cm	92 cm	10 cm	206 cm


Plus d'informations sur l'extension Evoflex Belt Extender à la page 36.

Harnais pour jambes

Mesurez la distance qui sépare l'épine iliaque antéro-supérieure et le point de contact de l'intérieur de la cuisse avec le fauteuil.

Taille


S	20-28 cm
M	28-36 cm
L	36-41 cm

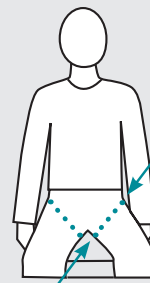


Instructions supplémentaires pour Evoflex®

Déterminer la longueur totale nécessaire pour le montage :

1. À l'angle sélectionné pour la ceinture, mesurez la distance entre les deux points de montage de part et d'autre du corps de l'utilisateur.
2. Dans le tableau des tailles, reportez-vous à la colonne D pour déterminer la longueur maximale en fonction de la ceinture sélectionnée.
3. Si la ceinture n'est pas suffisamment longue pour atteindre les deux points de fixation, utilisez une extension Evoflex pour ajouter 12,5 cm en plus de chaque côté. Le tableau Evoflex + Extension Belt Extender ci-dessous présente la longueur combinée maximale. La ceinture et l'extension Evoflex peuvent être toutes deux coupées à la longueur adéquate, si besoin est. Vous trouverez toutes les informations utiles sur l'extension Belt Extender en page 10.

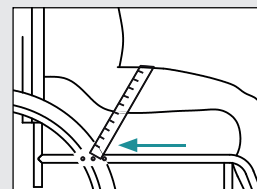

Evoflex®

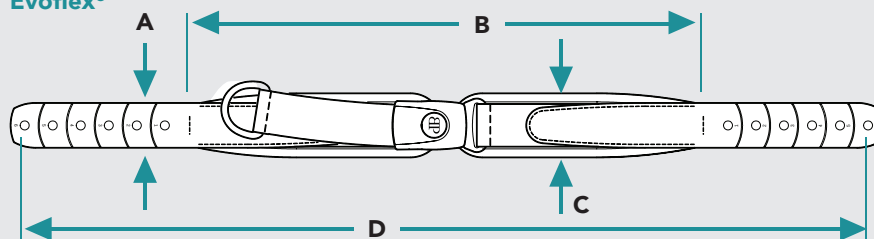

Taille*	A	B	C	D
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	63 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	76 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	96 cm

Plus d'informations sur l'extension Evoflex Belt Extender à la page 36.

IMPORTANT


Le collier de montage Framesaver n'est pas compatible pour monter l'Evoflex®.

Evoflex® + Extension Belt Extender*



Ceinture Taille	D Longueur de montage max. avec extension de ceinture
S38	88 cm
M46	101 cm
L62	121 cm

Ceintures pelviennes non matelassées

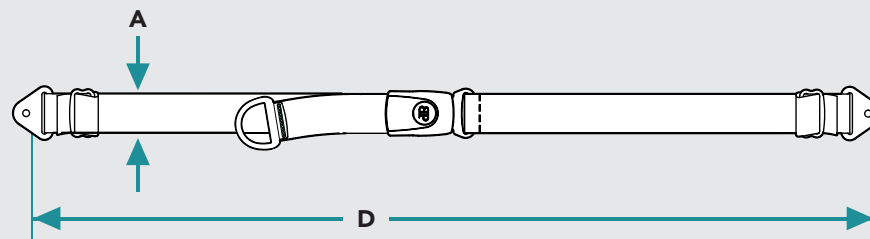

Taille	A	D
S	2,5 cm	117 cm
M	4 cm	142 cm
L	5 cm	155 cm
L-EXT	5 cm	206 cm

EXTRÉMITÉS POUR CEINTURES PELVIENNES ET HARNAIS

EXTRÉMITÉS MÉTALLIQUES POUR CEINTURES PELVIENNES ET MONOFLEX



-B1

Flat-Mount™
Polyvalente et ultra fine



-B2

Cinch-Mount™
Permet un ajustement rapide, simple et précis de la longueur de la sangle en fonction des vêtements portés et des variations pondérales



-B3

Grommet Strap™
(Monoflex™ en une partie uniquement)

LOT DE 2

Paire	B1 Flat Mount	B2 Cinch Mount
25 mm	HKA1-R-1	HKA2-R-1
38 mm	HKA1-G-1	HKA2-G-1
50 mm	HKA1-B-1	HKA2-B-1
PRIX HT	€ 15,00	€ 28,00
PRIX TTC	€ 15,83	€ 29,54

EXTRÉMITÉS EN PLASTIQUE POUR HARNAIS



Boucles à came

Extrémité pratique, utilisée pour les réglages d'évaluation ou en tant que fixations provisoires. Elles conviennent également à une utilisation à long terme pour les harnais de poitrine et d'épaules avec des utilisateurs dont le poids ne dépasse pas 75 kg. Se monte sur les dossiers rigides ou les guide-lanières. Orifice de Ø6 mm.



Extrémités standard

Flat-Mount™ plastique



Cinch-Mount™ plastique

LOT DE 2

- B5 **- B6**

FS032-2 Compatible avec les sangles de 2,5 cm de large

FS033-2 Compatible avec les sangles de 4 cm de large

FS034-2 Compatible avec les sangles de 5 cm de large

OPTIONS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES

Ces méthodes de fixation en option conviennent particulièrement aux installations complexes, notamment en présence de dossiers galbés et lorsque l'espace est très limité.

Vendus par 2	Référence	PRIX HT	PRIX TTC
Boucles à came plastique	FSO32/3/4	€ 28,00	€ 29,54
Flat-mount plastique - B5 - 25 mm	HKA31-25MM	€ 11,00	€ 11,61
Flat-mount plastique - B5 - 38 mm	HKA31-38MM	€ 11,00	€ 11,61
Flat-mount plastique - B5 - 50 mm	HKA31-50MM	€ 11,00	€ 11,61
Cinch-mount plastique - B6 - 25 mm	HKA32-25MM	€ 15,00	€ 15,83
Lanières à oeillet	SH025-2	€ 35,00	€ 36,93
Harnais lanières haut	SH030-2	€ 45,00	€ 47,80
Harnais lanières bas	SH0303XL-2	€ 35,00	€ 36,93



Lanières à œillet

Se clipsent à l'extrémité des bandes de tension MD pour obtenir des installations plus compactes en mode de traction avant.

SH025-2

LOT DE 2

ÉLÉMENTS DE FIXATION À APPOSER SUR LE FAUTEUIL ROULANT



LOT
DE 2



Collier et cale d'ajustage FrameSaver™

Non compatible avec l'EvoFlex®

Type de châssis : **A, D**

Colliers robustes et durables en nylon qui enveloppent le montant sans risquer de rayer la surface. FrameSaver™ est notre collier le plus économique. Il est idéal lorsque l'espace n'est pas un problème.

HW303-B-2	Collier de 25 mm + cale de 22 mm
HW303-19SHIM-2	Cale de 19 mm

Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
HW303 - B-2	€ 19,00	€ 20,05
HW303-19SHIM-2	€ 19,00	€ 20,05



LOT
DE 2

Band Clamp

Type de châssis : **A, B, C, D**

Collier de serrage en inox compatible avec une grande variété de châssis. Convient pour les espaces étroits sous le siège. Pratique pour la fixation d'éléments en l'absence de trous pré-percés.

HW320-22-2	Ø22 mm
HW320-25-2	Ø25 mm
HW320-27X33-2	27 x 33 mm, ovale
HW320-29-2	Ø29 mm
HW320-30-2	Ø30 mm
HW320-32-2	Ø32 mm

Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
HW320	€ 27,00	€ 28,49



LOT
DE 2

Frame Clamp

Type de châssis : **A, C**

Collier à mâchoire ouverte qui se loge sous la toile du siège et les manchettes d'accoudoirs. De construction solide composée de deux parties en aluminium.

HW310-22-A-2	Ø22 mm
HW310-25-A-2	Ø25 mm

Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
HW310	€ 55,00	€ 58,03



Kit de fixation T-Slot 6 mm

Type de châssis : **E**

Extrémités métalliques : HKA6-12MM

Extrémités en plastique : HKA6-14MM

Montage direct de ceintures ou de harnais dans les rails rainurés des fauteuils roulants électriques.



LOT
DE 2

Kit de fixation T-Slot 10 mm

Type de châssis : **F**

Extrémités métalliques : HKA10-14MM

Extrémités en plastique : HKA10-19MM

Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
HKA	€ 16,00	€ 16,88



Supports de fixation au siège 90°

Type de châssis : **C**

HW200-90-2



Supports fixés au siège 20°

Type de châssis : **D**

HW200-20-2




Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
HW200	€ 35,00	€ 36,93

LOT
DE 2


Solution de montage pour les fauteuils roulants dotés d'une garniture d'assise en toile ou d'une base d'assise rigide. Angle à 90° pour montage sur les montants du siège (photo ci-contre) ou à 20° pour montage latéral. En vente par lot de deux.

TYPE DE CHÂSSIS


Identifiez le type de châssis du fauteuil roulant, puis sélectionnez les éléments de fixation compatibles pour les ceintures et les harnais.

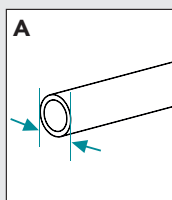


Rond
Ø19, 22, 25, 29,
30, 32 mm

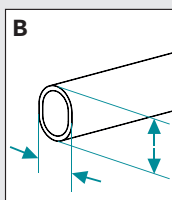


Ovale
Fauteuils roulants
Quickie
27 mm x 33 mm

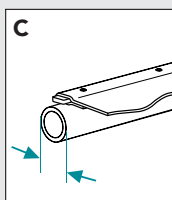


Montant
Trous de la toile sur
le dessus

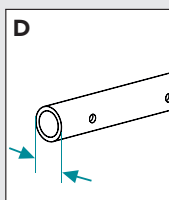

Montant
Trous filetés sur le
côté

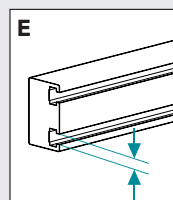

**Rainure en T -
6 mm**
Permobil et
Netti

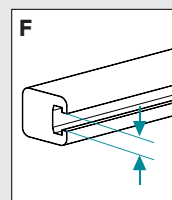

**Rainure en T -
10 mm**
Invacare, Motion
Concepts et
Quantum

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Extension Evoflex®

À base de plastique robuste, l'extension de ceinture Evoflex® permet d'allonger la ceinture Evoflex jusqu'à 12,5 cm de chaque côté. Solution idéale pour les fauteuils dont le coussin est plus épais, l'assise plus profonde ou les points de fixation éloignés. Vendue séparément ou en lot avec la ceinture Evoflex.

EBE100

Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
EBE100	€ 40,00	€ 42,20



LOT
DE 2

Numéros de référence des guide-lanières

Vendus par lot de deux avec kit de fixation M6 et entretoises.

HW100-200-2 Long 200 mm

HW100-150-2 Court 150 mm



LOT
DE 2

Vendus par 2	PRIX HT	PRIX TTC
HW100	€ 49,00	€ 51,70

Kit de fixation pour Permobil Corpus

Kit de fixation permettant d'attacher les guide-lanières aux rails en T sur fauteuils Permobil Corpus. Vendu en kit.

HW101P-1



Vendu en KIT	PRIX HT	PRIX TTC
HW101 P-1	€ 15,00	€ 15,83



Vendu à l'unité	PRIX HT	PRIX TTC
BMR-42	€ 10,00	€ 10,55

Outil de mesure du diamètre

Cet indispensable outil de mesure du diamètre des tubes et montants vous garantit de toujours choisir les bons éléments de montage. Il vous permet également de sélectionner la taille de boulons et d'écrous adaptée à un fauteuil particulier.


BMR-42



HARNAIS

Stayflex™, PivotFit™ et Trimline

Mesurez la largeur maximale au niveau des épaules, à hauteur du muscle deltoïde.

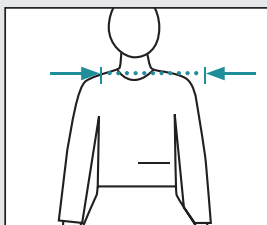


Taille Largeur au niveau des épaules

XXS*	21–24 cm
XS	24–28 cm
S	28–33 cm
M	33–41 cm
L	41–48 cm
XL	48–56 cm

*Harnais PivotFit uniquement

Harnais de poitrine Monoflex™

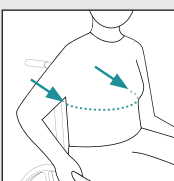


Mesurez le tronc de part et d'autre à la hauteur à laquelle le harnais Monoflex™ sera porté.

Largeur du matelassage

Taille	Longueur du matelassage	Ouverture latérale (en 1 partie)	Ouverture centrale (en 2 parties)
XS	31 cm	7 cm	5,5 cm
S	39,5 cm	7,5 cm	6,5 cm
M	46,5 cm	10 cm	8 cm
L	54,5 cm	11,5 cm	9 cm
XL	62 cm	12,5 cm	9,5 cm

APPUI-MOLLETS ET ANKLE HUGGERS


Appui-mollets (Sangle et bandeau de mollets)

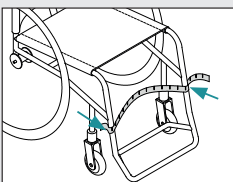

Mesurez la courbe derrière les jambes depuis l'extérieur du fauteuil roulant. Veillez à ce que la longueur sélectionnée permette à la sangle ou au bandeau de fléchir et d'envelopper les mollets.

S	35 - 40 cm
M	40 - 50 cm
L	50 - 61 cm

Ankle Huggers®

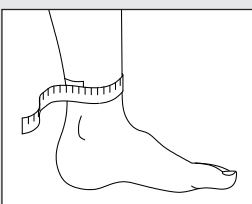

Mesurez la circonférence au-dessus de la cheville.

XS	14 – 17 cm
S	16,5 – 20 cm
M	19 – 25,5 cm
L	23 – 28 cm
XL	26,5 – 33 cm

Des informations supplémentaires sur les tailles sont fournies dans les différentes sections du présent guide et sur www.bodypoint.com.

SECTION TECHNIQUE : ÉLÉMENT DE FIXATION SPÉCIAL HARNAIS

ADAPTATEURS DE FIXATION DES GUIDE-LANIÈRES (VENDUS SÉPARÉMENT)

Les adaptateurs de fixation en option vous permettent d'utiliser les trous pour appuie-tête existants, évitant ainsi d'avoir à percer des trous supplémentaires pour la fixation du guide-lanières. Vendus séparément, avec vis M6 et plaques filetées.



HW105L-1

Large 270 mm x 75 mm

HW105S-1

Small 185 mm x 75 mm

Vendus séparément

	HT	TTC
ÉLÉMENT DE FIXATION HW105	€ 39,00	€ 41,15

(À gauche) Petit adaptateur pour la fixation d'un guide-lanières court. Éléments de fixation de l'appuie-tête non fournis. Grand adaptateur de fixation illustré ci-dessus.


MEILLEURES PRATIQUES POUR LE MONTAGE DES HARNAIS

LANIÈRE SUPÉRIEURE (PLACEMENT LATÉRAL)





Lorsque les lanières supérieures sont tirées vers le haut, au-dessus de la ligne des épaules, l'effet d'enveloppement des épaules est réduit.

LANIÈRE SUPÉRIEURE (ANGLE DE MONTAGE)

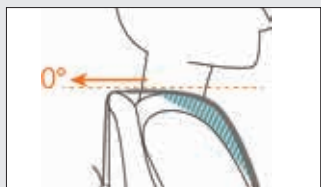

Lorsque les lanières supérieures sont tirées vers l'arrière à l'horizontal, au niveau de la ligne des épaules, l'effet d'enveloppement des épaules est accru. La distance avec le point de contact du fauteuil est également quelque-peu raccourci, risquant de réduire le mouvement latéral des lanières supérieures.

GUIDES-LANIÈRES

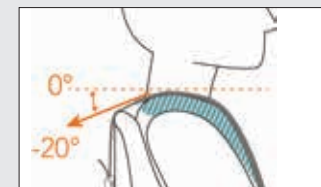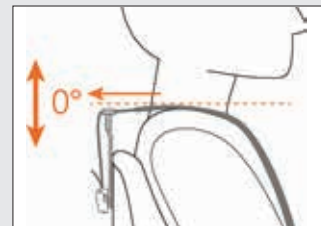

Lorsque les lanières supérieures sont tirées légèrement vers la bas, à un angle maximum de 20° sous la ligne des épaules, l'effet d'enveloppement des épaules est optimal. Il est déconseillé d'aller en-deçà de 20° sous la ligne des épaules en raison de l'augmentation potentielle de la traction descendante.

COFFRET DE MONTAGE AVEC OUTILS

Ayez toujours à portée de main la plus large gamme de solutions de montage et de réglage pour n'importe quel fauteuil roulant. Cette boîte à outils portable est parfaite pour équipements, évaluations et cessions de formation. À tout moment, en tout lieu !

Cette boîte à outils contient la gamme complète et toutes les tailles des accroches de montage Bodypoint® suivantes :

- Kit d'accroche avec boutons en T
- Rails de montage
- Accroches FrameSaver
- Accroches Band Clamps
- Accroches Frame Clamps
- Extensions de ceinture

Plus ces autres outils pratiques :

- Mètre enrouleur Bodypoint®
- Jauge pour diamètre tubes
- Clé Allen
- Clé à pipe 10 mm
- Clé à pipe 13 mm
- Poster de montage



Gardez votre stock toujours complet en recommandant les éléments individuellement.



Sécurité et simplicité d'installation sur tout fauteuil roulant, en respectant les points d'accroche pertinents pour l'utilisateur.



Solide et durable Stanley® box

Vendu à l'unité	HT	TTC
	€ 430,00	€ 453,55
COFFRET DE MONTAGE AVEC OUTILS BMR-41		

CONDITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises par la Société INSPIRAL (ci-après « le vendeur ») à tout acheteur (ci-après « le client ») pour lui permettre de passer commande des produits commercialisés par INSPIRAL. Elles s'appliqueront à toutes les ventes de produits effectuées par la société INSPIRAL. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente. Tout autre document tel que prospectus, catalogues, notices, émis par un client n'a qu'une valeur informative et indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions.

ARTICLE 2 : COMMANDES

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat. Le contrat de vente n'est formé qu'après acceptation de la commande par émission d'un bon de confirmation de commande. En cas de désaccord quelconque avec toute mention figurant sur celui-ci, il appartient au client de nous le notifier par écrit dans les 48 heures de la date de réception du bon de confirmation de commande, sous peine de forclusion. Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans notre accord préalable.

ARTICLE 3 : PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos prix sont fixés en euros. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment nos tarifs. Dans ce cas, le tarif applicable à la vente sera celui en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent hors taxe (HT) et emballage standard compris. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus, et tarifs, ainsi que les informations relatives aux conditions de remises commerciales, de la Société sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. La Société est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Les frais de port sont facturés à l'acheteur et inclus dans le prix. Les prix sont établis Franco de port à partir de 120€HT de commande pour Vicair, Dynamic, Symmetric Designs, Maxxcare et Bodypoint. En dessous de ce franco des frais de transport de 40€HT sont facturés. Toute commande de housse supplémentaire, non incluse dans la commande d'origine de son coussin, entrainera un surcoût de 25€HT par housse. Nos factures sont payables par virement ou chèque bancaire à TRENTE (30) jours net ou à réception de la facture avec dans ce cas un escompte de 2%. En cas de retard de paiement, les commandes et les livraisons en cours pourront être suspendues sans préjudice de toute action judiciaire. Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. En outre, le client devra rembourser les frais supportés par INSPIRAL, occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, avec un minimum forfaitaire de 40 euros, conformément à l'article L.441-10 du code du commerce. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire sera demandée, sur justification. A défaut de paiement d'une facture dans un délai de quinze jours après l'envoi d'une première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la vente pourra être résiliée de plein droit et nous pourrions exiger la restitution de nos produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

ARTICLE 4 : LIVRAISON – TRANSFERT DE RISQUES

Les marchandises voyagent aux risques du client. Le transfert des risques sur les produits par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur. En conséquence, il appartient au client, en cas d'avaries, de pertes des marchandises, ou de manquants, de faire toute réserve sur les bordereaux de réception des colis ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs dans les contions de l'article L133-3 du code de commerce. En l'absence de respect de ce formalisme, le produit sera considéré comme accepté par le client. La responsabilité de notre société ne peut ainsi en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. Les dates de livraison sont indicatives celles-ci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes et leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande ni indemnité, ni annulation des commandes en cours, ni donner lieu à des dommages et intérêts. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations à notre égard, et ce quelle que soit la cause.

ARTICLE 5 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, l'ensemble des délais est rallongé de la durée du cas de force majeure. Sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient prévoir au jour de la conclusion du contrat, qui rendent impossible l'exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou des transports habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les barrières de dégel, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, etc.

ARTICLE 6: GARANTIE

INSPIRAL applique la garantie de deux ans (Art.1641 du code civil) après la date d'achat sur les vices de fabrication et de matériel, sous condition d'un usage normal du produit. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices constatés. Tous dommages à la suite d'un usage anormal ou d'une mauvaise manipulation, d'un nettoyage inadéquat ou d'une négligence, sont exclus de cette garantie. Au cas où un vice de matériel ou de fabrication apparaîtrait dans les deux ans à compter de la date d'achat, INSPIRAL, choisira de réparer ou remplacer le produit sans frais. La housse extérieure est exclue de cette garantie. Les recours pour rupture de garanties explicites ci-incluses se limitent à la réparation ou au remplacement du produit. Les dommages et intérêts pour rupture de toute garantie n'incluront en aucun cas les dommages indirects ni n'excéderont le prix de vente des produits non-conformes. Les frais de port au titre de la présente garantie, aller et retour, seront à la charge d'INSPIRAL sous réserve de son autorisation préalable. En aucun cas une action ou intervention au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de cette garantie.

ARTICLE 7: UTILISATION CONFORME

Le client s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions techniques relatives à nos produits contenues dans nos manuels d'utilisation et d'entretien ainsi que dans toute autre documentation technique, en particulier les spécificités de nos produits imposées par la norme E.N. 60601-1 et par les critères d'homologation et le respect de la nomenclature LPR (Liste des Produits Remboursables). L'acheteur s'engage par ailleurs à informer ses propres clients des caractéristiques essentielles des produits, ainsi que de leurs conditions d'utilisation et d'entretien et, notamment, de se conformer aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation. A défaut, le client sera seul responsable des conséquences de la non-observation de ces prescriptions.

ARTICLE 8 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété de nos produits est expressément subordonné au paiement intégral du prix. Cette clause ne fait pas obstacle au transfert au client des risques de perte ou de détérioration ainsi que des dommages qu'ils pourraient causer dès la remise des produits au transporteur.

ARTICLE 9 : TRAITEMENT, PARTAGE ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'élection de domicile est faite par notre société INSPIRAL, à son siège L'achat par le Client peut entraîner le traitement de ses données à caractère personnel. Si le Client refuse le traitement de ses données, il lui est demandé de s'abstenir de recourir aux services de la Société. Le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, de modification et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à l'adresse suivante : Inspiral, 46 rue Victor Hugo, 37400 Amboise. Ces données personnelles sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement de ses factures le cas échéant, ainsi qu'à l'amélioration des services proposés sur la Société.


ARTICLE 10 : MARQUES DÉPOSÉES BODYPOINT

- Inc. au Canada, en Chine, en Inde, aux États-Unis et dans l'Union européenne.
- Strengthen Your Position est une marque déposée de Bodypoint, Inc. au sein de l'Union européenne et aux États-Unis.
- Ankle Huggers est une marque déposée de Bodypoint, Inc. au Canada, au sein de l'Union européenne et aux États-Unis.
- Aeromesh est une marque déposée de Bodypoint, Inc. au sein de l'Union européenne et aux États-Unis.
- Evoflex est une marque déposée de Bodypoint, Inc. aux États-Unis
- Cinch-Mount, Flat-Mount, FrameSaver, Stayflex, Laminar Pad, Monoflex, Rehab Latch, DuraLatch, PivotFit, MD Series et MD Pull Straps sont des marques commerciales de Bodypoint, Inc.

CONTACTS INSPIRAL

FORMATIONS, RENDEZ-VOUS, QUESTIONS TECHNIQUES ET CLINIQUES...

veuillez contacter votre représentant régional ci-dessous :

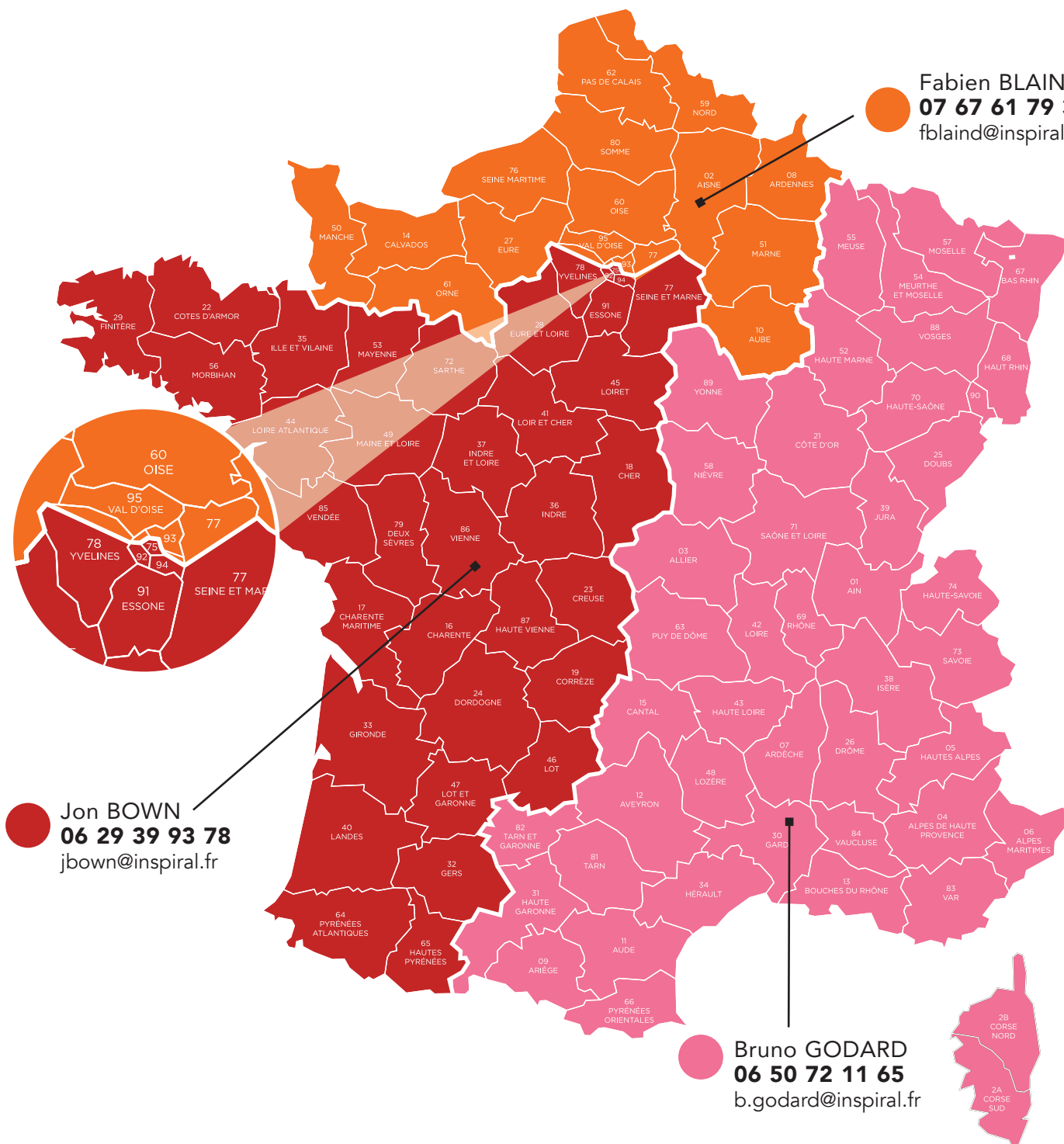

Fabien BLAIND
07 67 61 79 37
fblaind@inspiral.fr

Jon BOWN
06 29 39 93 78
jbown@inspiral.fr

Bruno GODARD
06 50 72 11 65
b.godard@inspiral.fr

SIÈGE À AMBOISE:

POUR TOUTES DEMANDES DE :

Devis, Commande, Demande de Prêt, Logistique,
Qualité, Ouverture de Compte...

CONTACTEZ VOS COLLABORATEURS :

Jon Bown, Christelle Logie, Svitlana Pavlovskaya, Audrey Hallynck

✉ info@inspiral.fr

☎ 02 47 79 75 52

www.  **www.inspiral.fr**



TRANSCENDANCE

« Dès le début j'ai senti que tout le monde chez Bodypoint était investi et prenait son travail très au sérieux. »

Vous savez, nous sommes une communauté très soudée de personnes conscientes que le travail de Bodypoint apporte une réelle valeur à la société et contribue à améliorer la vie des personnes à mobilité réduite.

Bodypoint crée une réelle connexion entre l'utilisateur et son matériel et avec une telle intimité, plus rien ne vous arrête. Vous transcendez le handicap. »

- Josh Dueck, skieur professionnel,
Athlète paralympique et fan de Bodypoint

inspiral 
SÉCURITÉ - FONCTIONNALITÉ - CONFORT

CONTACTEZ-NOUS

www.inspiral.fr

Tél.: 02 47 79 75 52 - Fax: 02 46 65 09 07

info@inspiral.fr



STRENGTHEN
YOUR
POSITION

